

# バインスタリングで SASスクリーニング検査

充電ケースを利用した  
現場運用ガイド

X Detect株式会社  
V1.3



①

事前準備

②

計測

③

データ同期




運用担当

①

# 事前準備

## 充電ケース本体を満充電にしておく

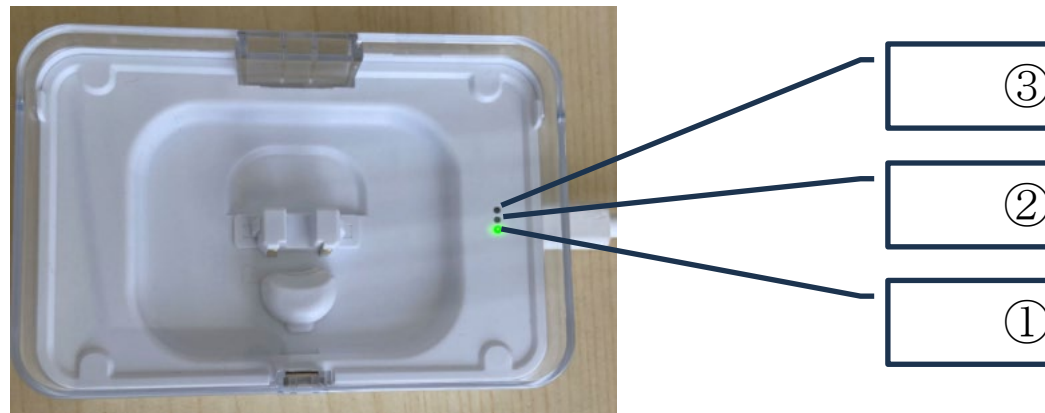

インジケーター

- ①が緑、充電ケースへ充電中
- ②が緑、充電ケースへ充電完了（満充電）
- ③が赤、充電ケースが低残量

※充電ケースへの充電は2時間程で満充電



運用担当 & 対象者


①

# 事前準備

II、試着確認が完了したら、リングは事前準備の充電ケースにセットし充電されたまま、次ページの計測方法の説明を受けたら、対象者に充電ケースごとを持ち帰ってもらう。



## I、対象者にリングを試着させ、装着位置とリングのサイズを調整

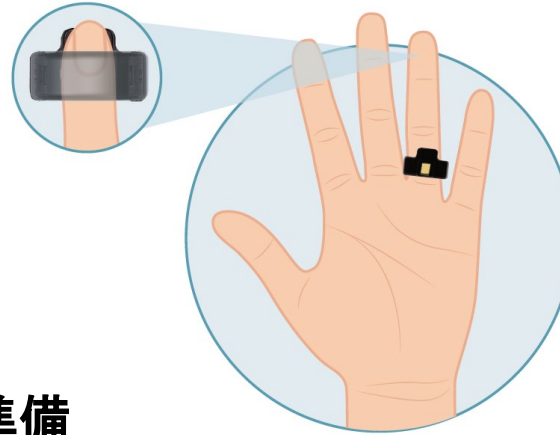

Iの1. 指の第3関節の付け根に、突起部分を上に向け、人差し指、中指、薬指のいずれかに装着

センサー部分が指の腹に当たって  
リングが回りにくいように装着

Iの2. 装着したままリングの裏をチラッと見ると、LEDが点灯していること。  
※点灯してない場合、アプリでデータ同期を行い、再度確認。再度確認しても点灯しない場合、リングを交換。

点灯



対象者


②

計測

注意※

I、就寝直前にリングを充電ケースから取り出し、指に装着

装着方法

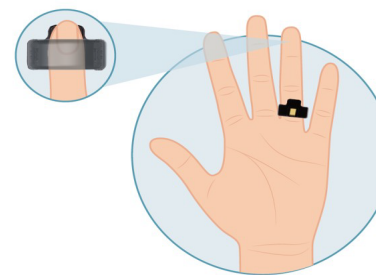

指の第3関節の付け根に、突起部分を上に向け、人差し指、中指、薬指のいずれかに装着

センサー部分が指の腹に当たってリングが回りにくいように装着

注意※

II、起床したら、リングを指から外し、充電ケースにセットし充電させたまま、充電ケースごとを運用担当へ返却



運用担当

③

# データ同期

## 対象者から回収したら

- I、スマホアプリVINSTA Proでリングと接続
- II、データ同期
- III、充電ケースを充電しておく
- IV、次の利用のため、リングを充電しておく

※スマホアプリとのデータ同期を実施しないと、  
リングは次への運用に使用不能  
(充電ケースから外して装着しても自動計測が開始されない)



VINSTA Pro操作マニュアル

データ同期したら5分程でWEB管理画面でレポートの確認が出来ます。

