

乗ったままクルクル回せて
ラクラクきれい！

車いすタイヤのクリーニングサポーター

クリサポ

特許出願済




玄関でのタイヤ掃除、毎回大変ですよね・・・。
クリサポがあれば楽々お掃除！

- ✦ 移乗不要！車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。
- ✦ 使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。
- ✦ スロープで玄関の低い段差を解消できます。
- ✦ コンパクトにまとめて持ち運びできます。

車いす利用者と介助者、お互いのタイヤ掃除の負担を減らして、
もっと気軽におでかけしましょう。

■製品仕様

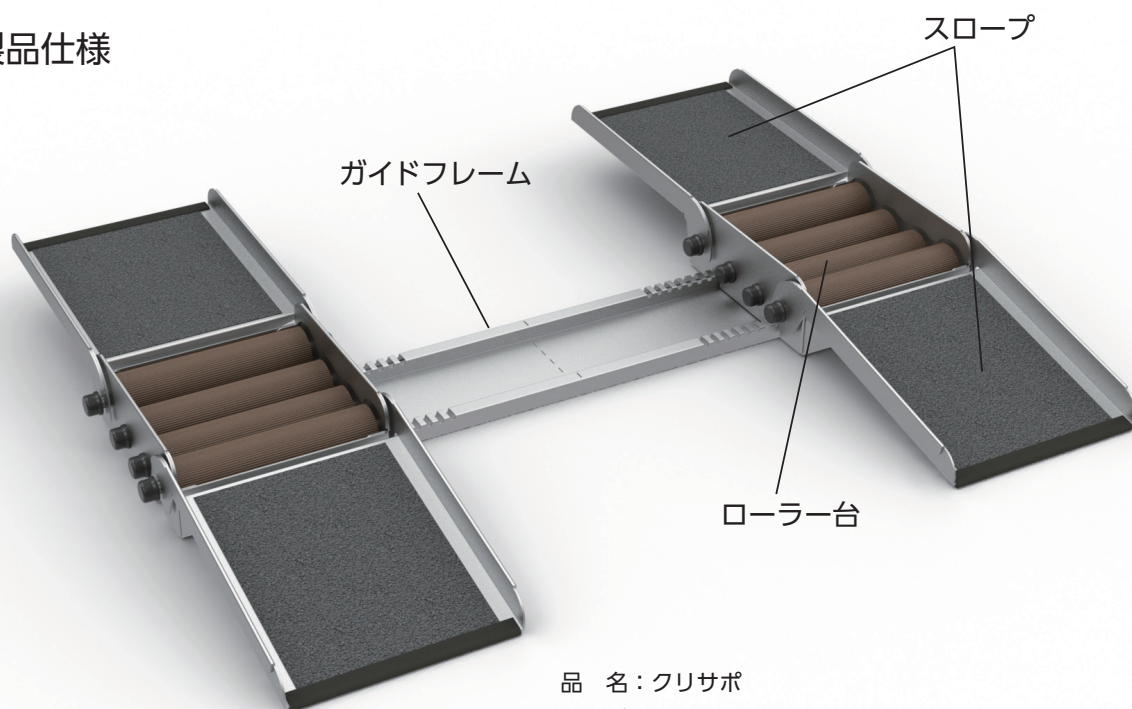

品 名：クリサポ

品 番：YM-151L-ST

定 価：¥74,000

サイズ：幅610～770×奥行600×高さ71mm

重 量：約6kg 耐荷重：115kg

JAN：4903180204809 TAIS：01339-000149

材 質／ローラー台、スロープ、ガイドフレーム：ステンレススチール
ローラー：塩化ビニル樹脂





適合車いすサイズ

① 28cm以上
(キャスター内寸)

② 68cm以内
(後輪外寸)


③ 12cm以内
(キャスター内側～後輪外側)

※あくまで目安のサイズとなります。

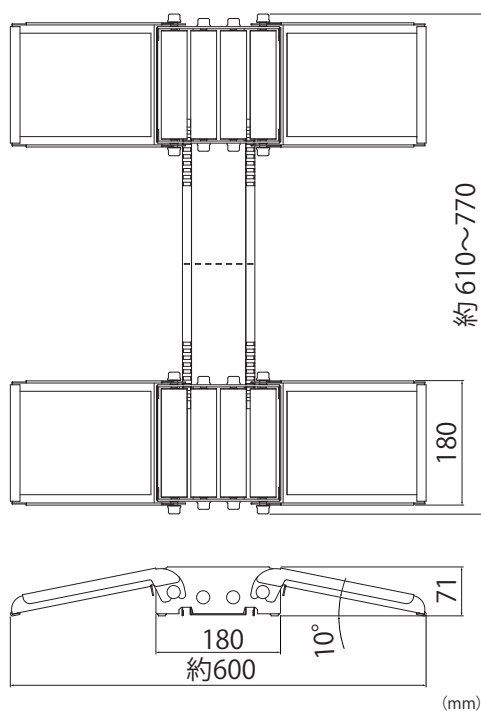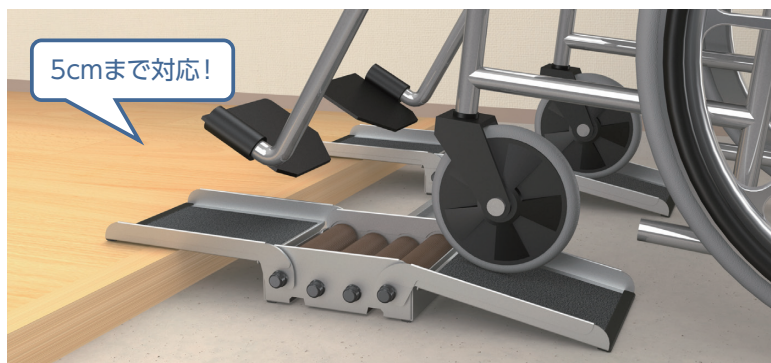


■使用方法


PDFデータでご覧の方は
CLICK

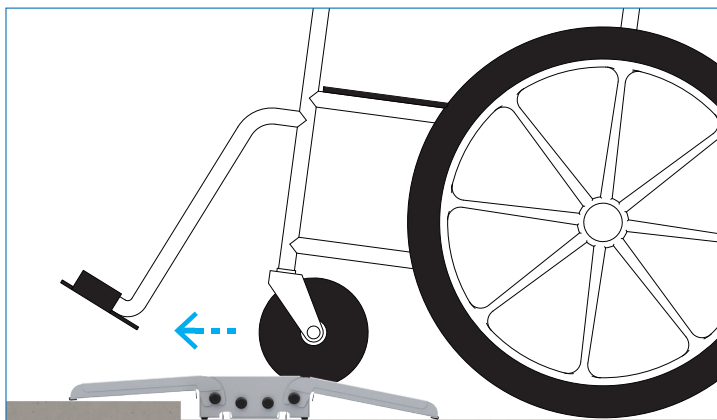


- ① 介助者が車いすを押し進め、スロープを上げて前輪をローラーに乗せる。

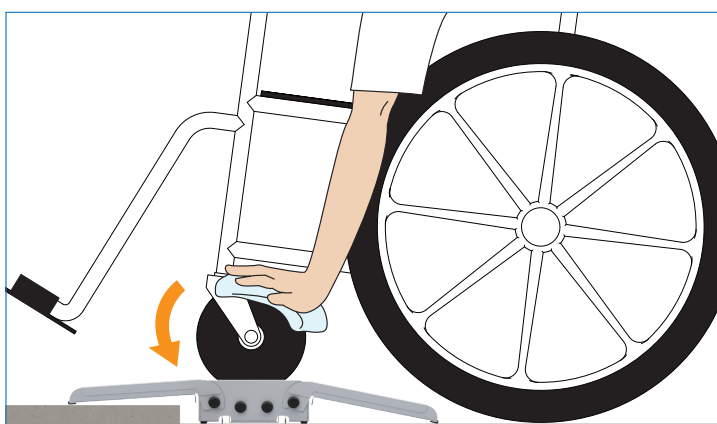

- ② ローラー上で前輪を回転させながら、介助者または利用者がぞうきん等で拭き上げる。
＜前輪の清掃完了＞

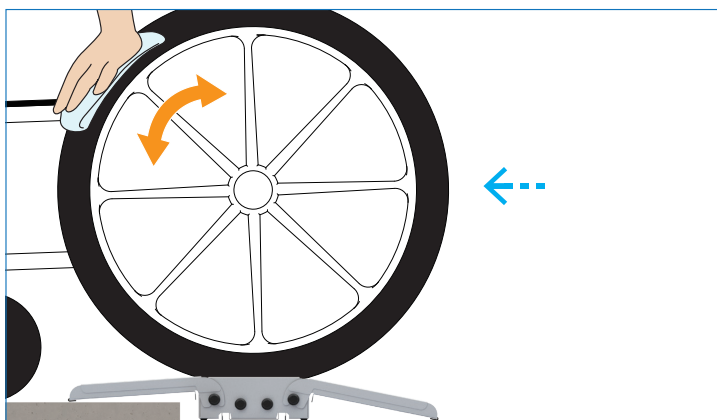

- ③ 介助者が車いすを押し進め、前進して後輪をローラーに乗せる。
④ ローラー上で後輪を手回ししながら、介助者または利用者がぞうきん等で拭き上げる。

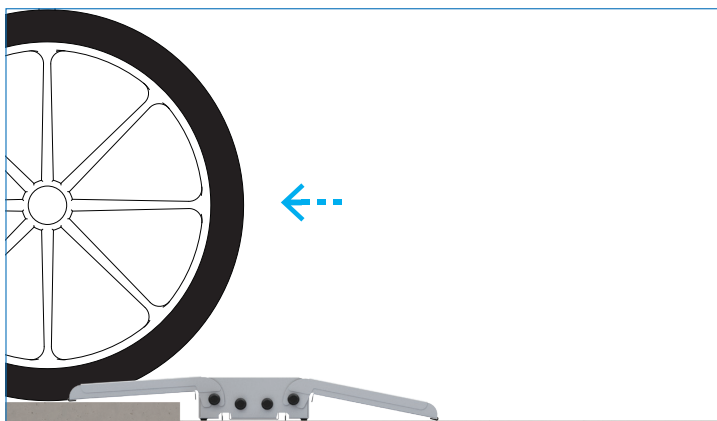

- ⑤ 介助者が車いすを押し進め、前進する。



✨キレイになったタイヤで床を汚さず屋内へ！✨

クリサポ は様々なシーンでご使用いただけます。

自宅



介護施設



学校




体育館



旅館・ホテル



観光文化施設 (美術館・神社仏閣など)

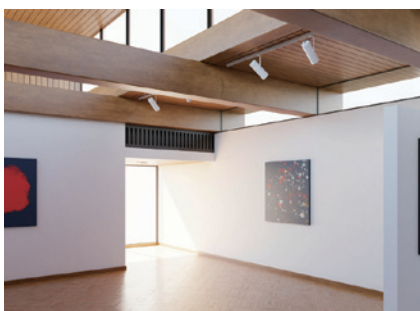

CONDOR
Trust of the Quality
山崎産業株式会社

<http://www.yamazaki-sangyo.co.jp>

第二営業本部 大阪営業所

〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東 3-10-2

TEL : (06)6633-1255 FAX : (06)6632-0274

■ 商品に関するお問い合わせは

カスタマーサービスセンター (9:00~12:00 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)

0120-941-239 FAX (03)5677-3406

メールアドレス info2@yamazaki-sangyo.co.jp

◎商品仕様及び価格は改良のため、予告なく変更することがあります。

◎ご紹介しする商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。

公益社団法人
関西経済連合会 会員
ISO14001 認証取得
本社・製品開発本部・生産本部
栃木工場・伊丹工場・岡山工場
ISO9001 認証取得
栃木工場・伊丹工場・岡山工場



QAIC/JP/0083, QAIC/JP/0084

ホームページ



WEBカタログ



商品情報検索



●お問い合わせは