

吸引器の新提案。

すばやく かんたん 清潔
少量吸引に対応します。

yox candy

ヨックス キャンディ




ポータブル吸引器ヨックスポルタとの組み合わせ例

～使用方法～


1. 接続

カテーテル、パシエントホース
を図の様にに取り付けて下さい。

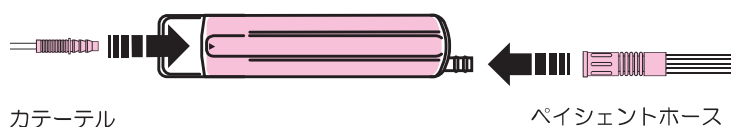

2. 吸引操作


出来るだけ上、または斜め上
に向けた状態でお使い頂くと
無駄なく吸引が出来ます。

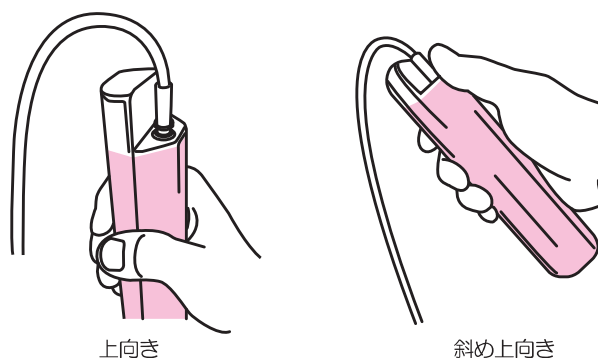

3. 操作終了

ホース側の内部フィルタに水分
が到達すると吸引が自動的に
停止します。

感染廃棄物として廃棄して下
さい。

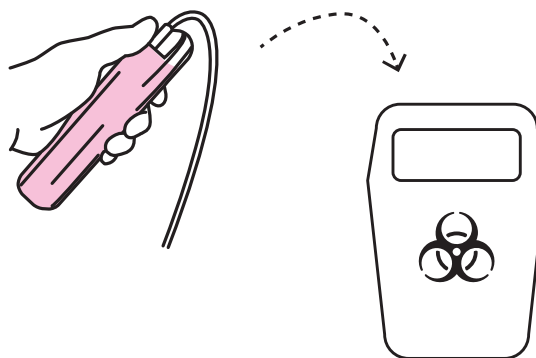

■仕様

販売名	届出番号	一般的名称	クラス分類
ヨックス キャンディ S1001	10B2X00014A00008	吸引器用キャニスタ	一般医療機器
サイズ（単位：mm）	容積／重量	吸引圧力	可能吸引量
全長 185 × 径φ 38	150 mL / 62 ± 10 g	0 ～ -80 kPa	60 mL

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。
- 製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。

発 売 元 株式会社 小 池 メ デ ィ カ ル
本 社 〒132-0031 東京都江戸川区松島 1-24-8
TEL: 03(5662)6605
www.koike-medical.co.jp

製造販売元 株式会社 群馬コイケ

■お問い合わせは…