


SUPPORT JACKET

Bb FIT II

装着方法
取扱説明書

各部位の名称

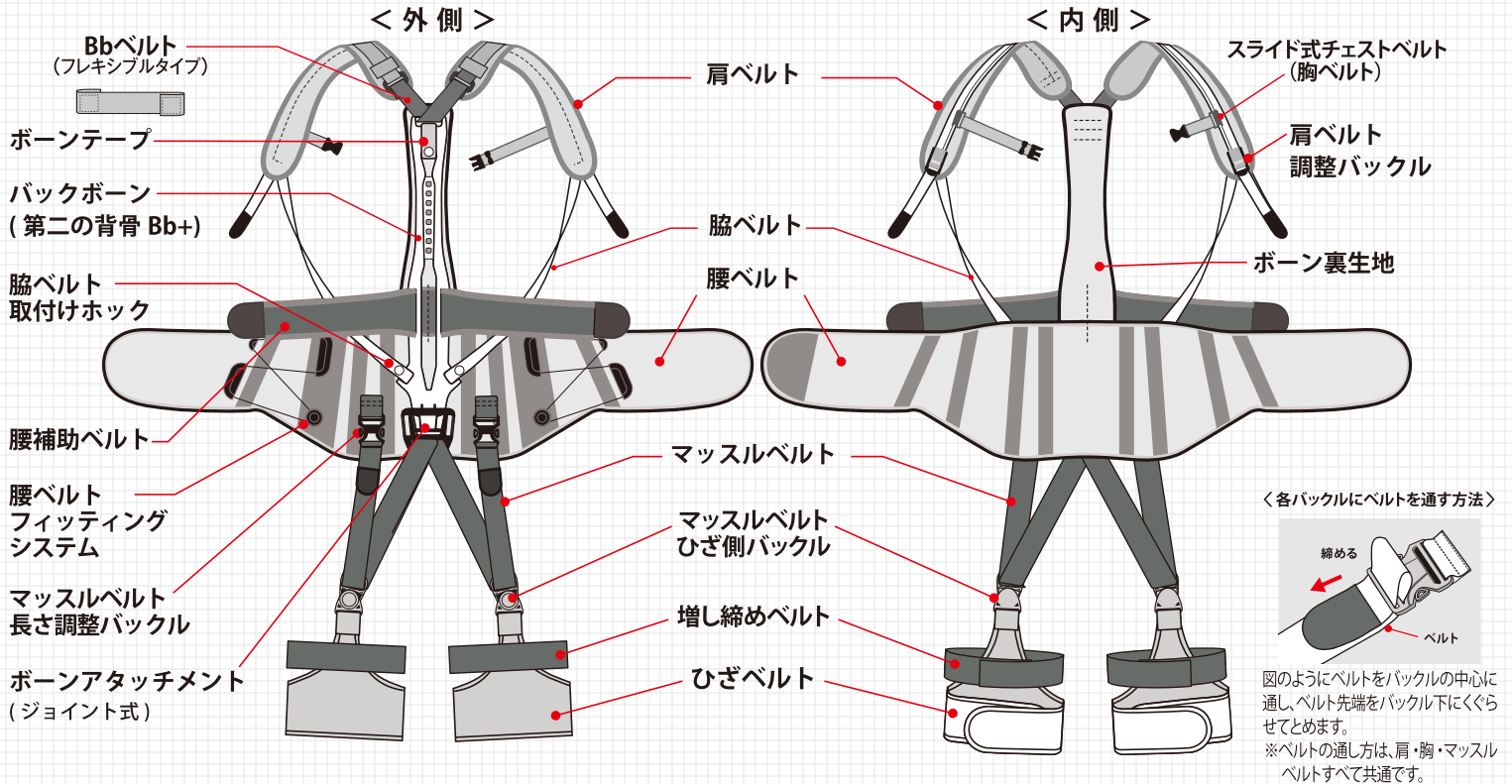

この度は「サポートジャケットBb+FIT II」をお買い上げいただきありがとうございます。

< 本製品の使用方法 >

ご購入後、ご使用するには、下記の QR コードより動画をご覧ください。



A
紹介動画



B
装着方法



C
洗濯方法

■ ■ ご使用にあたって ■ ■

この度は「サポートジャケットBb+FITII」をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品をご使用いただく際には、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。
取扱説明書は紛失しないように保管してください。

本製品の機能

本製品は、前屈姿勢をとることでマッスルベルト等の弾性生地が伸び、張力を発揮します。

日常作業で無意識に負担をかけている身体の状態を理想的な姿勢に導きながら、腹筋と背筋を保護・安定させることで軽作業での立ち姿勢、荷物の上げ下ろし、移動等による腰や身体の負担を軽減させます。

<安全上の注意事項> 必ずお読みください!

警告 誤った取扱いをした時に死亡や重症に結びつく可能性があるもの

- 本製品は腰痛その他の疾患を治療する製品ではありません。
- 本製品を装着して、過度に重たい荷物を持つことや、必要以上に腰に負担のかかる姿勢を取ることはおやめください。
- 軽作業以外でのご使用はお止めください。怪我や本製品の破損の原因となります。
- 本製品は加工、改造、修理を行わないでください。
- 下記に該当する方は着用しないでください。
現在、肩、胸、膝等、装着部位等に怪我や傷、腫れもの、湿疹、アレルギー、血行不良等、異常がある方、その他疾患のある方、妊娠中または妊娠されている可能性のある方、飲酒後の方、低体力の方等
- 使用中に痛みやしびれ、かゆみ、かぶれ、湿疹等の異常や着け心地が悪い等の違和感を感じた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 締め付け過ぎると血行障害を起こす可能性がありますのでご注意ください。
- 長時間使用する場合は適度に着脱を行なってください。圧迫による皮膚障害や血行障害の恐れがあります。
- 薬品等を使用する場所では使用しないでください。
- 急激な温度変化が伴う場所、並びに過度に高温、低温になる場所での使用はしないでください。
- 破損、磨耗、変形、面ファスナーの粘着力が悪くなった製品は使用しないでください。
- 本取扱説明書記載の「本製品の使用方法」QRコードの動画内容に従って正しく装着した上でご使用ください。
- 正しくご使用されない場合、十分な補助やアシストが得られないだけでなく、身体が過度に圧迫されたり怪我や破損の原因となります。
- 製品が周囲に引っかかったり巻き込まれたりする危険がありますので着用時は周りの環境に充分注意してください。
- 膝ベルトを外したまま、歩いたり階段等の昇降はしないでください。
- 本取扱説明書記載の「サイズ」を参照し、サイズが合わないものは使用しないでください。
- 上下、裏表、前後を確認の上、正しく着用してください。
- 使用中にスレやゆるみが生じた場合は、正しく着用し直してください。
- 就寝時には使用しないでください。

注意 誤った取扱いをした時に傷害または他の財物への損害に結びつく可能性があるもの

- 本製品は、軽作業時の腰部ならびに上半身の負担を軽減するために開発したアシストスーツです。必ずしも完全に負担を軽減できるものではなく、装着者が持っている以上の力を発揮出来る製品ではありません。
- 本製品が謳う機能の効果には個人差があります。
- 本製品は、腰部、背骨の安定とサポートを目的とした商品であり腰部や背骨を完全に保護するものではありません。
- バックル留め具やベルトワイヤー、スライダーに衣類や皮膚をはさまないようにご注意ください。衣類の破損や、皮膚等傷つける原因になります。
- 本製品に破れ・亀裂・破損等不良が見られる場合は直ちに ご使用をおやめください。
- 面ファスナーに衣類を挟んだり、貼り付けたりした場合衣類を破損することがあります。
- 面ファスナーはホコリやゴミ等が付着すると、テープ部分の粘着力が弱くなる場合がありますので、ホコリ、ゴミ等は取り除いてご使用ください。
- 他の衣類に色移りする場合があります。
- 弾性生地等に収縮性が無くなった場合はご使用をおやめください。
- 本製品を他の方へ転用（再利用）された場合のトラブルや事故等につきましては責任を負いかねます。
- 本製品は必ず肌着や衣類の上から装着し肌に直接当てないでください。
- 面ファスナーやマッスル機能部のゴムの寿命は、使用頻度や状態により短くなる場合があります。
- 本製品には静電気帯電防止機能はありません。
- 製品の仕様、外観等は改良のため予告無く変更することがあります。
- 安全に使用するために、管理者は使用する前に必ず点検をしてください。

<保管方法>

- 直射日光が当たらない場所、また湿気の無い風通しの良い場所に保管してください。
- 面ファスナーは留めた状態で保管してください。
- 保管状態により変色することがあります。
- 保管の際は、面ファスナーや起毛部分に過度の重みがかからないようにしてください。面ファスナーの粘着力が悪くなる恐れがあります。

<廃棄方法>

- 本体生地はポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンですが、背骨は樹脂素材(ポリプロピレン、POM)を使用していますので、廃棄時には地域のルールに従ってください。

<サイズ> (男女兼用) ※迷われたら大きめをおすすめします

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
腰周り※ (骨盤の周囲)	78~88	86~96	92~104	98~110	104~116
ひざ下周り	23~31	26~34	29~37	32~40	35~43
身長	155~165	162~172	168~178	174~186	180~192

※ご注意 腰周りは骨盤の周囲であり、ウエスト(腹囲)ではありません

<カラー>

グレー

<素材表示>

ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン

<その他>


ダイヤルパーツ(TGF)、金属ボーン・スナップボタン(金属)、
ジョイントパーツ・アジャスター・バックル(POM)、
Bbボーン(ポリプロピレン)、スベリドメ(シリコン・天然ゴム)

<消耗品>

<https://www.upr-webshop.jp/shopbrand/ct25>

当社WEBショップよりお買い求めください。

<洗濯方法の注意事項>

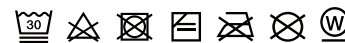

- ベルトについている洗濯表示に従って洗濯してください。(上記、洗濯表示記号)
- 洗濯する際は、必ずボーンをジャケット本体から取り外し、ジャケット本体を洗濯ネットに入れて洗濯してください。ボーンは洗濯機では洗えません。
- 中性洗剤を使用し、30℃以下の水で洗濯してください。
- 他の衣類の色移りや損傷を防ぐため、本製品のみ単品洗いをしてください。
- 干す際は洗剤を充分に落とし、タオル等で水気を取ってから影干しにしてください。
- 乾燥機の使用、ドライクリーニング・アイロン・漂白剤・手絞りは避けてください。
- 洗濯後、本製品に破れや亀裂、ほつれ、破損等の異常が無いかご確認ください。
- 縫製部分がほつれてきた場合、引っ張ったり根元からハサミ等で切らないでください。さらにほつれる場合があります。
- 洗濯の際は面ファスナーを留めてください。
留めずに洗濯すると面ファスナーの粘着力が悪くなる恐れがあります。

「サポートジャケット®」に関するお問い合わせは

UPR ユーピーアール株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-3-2 内幸町東急ビル12F

<https://www.upr-net.co.jp/>

TEL 03-3593-1727

FAX 03-3593-3016

Email pas_info@upr-net.co.jp

【特許登録済】サポートジャケット® はユーピーアール株式会社の登録商標です。