

# ポジショニングクッション アルティ『思いやりクッション』シリーズ

テーマカラーの「ライト・グリーン」は【希望・好奇心・ユーモア・やすらぎ】これらの介護の現場に必要な心理効果に期待を寄せて用いています。

## ①丸洗いでできる




カバーを付けたまま、洗濯機や浴室のシャワーなどで丸洗いができます。

乾燥には専用の「乾燥ネット」(別売)がおすすめ。

## ②思いやり縫製 \*実用新案取得済み

一般的なクッションの縫い目は角に!

アルティクッションの縫い目は少しずれています。

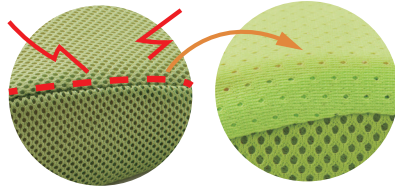

角の部分が縫い目にならないように少しずらした縫製。縫い目の硬い部分が体にあたる、こすれる時の負担を和らげています。

## ③お手入れがラクな撥水加工のカバー



水などをこぼしてもサッと拭くだけでお手入れがラク。

## ④すぐれた通気性の中材



脱幕加工のウレタン使用によるすぐれた通気性。丸洗いをしても乾きがスピーディです。

## マルチパッド

UCGR110



そのまま敷いても丸めて抱えても折って挟んでも使えるマルチパッド  
体側生地:高通気・撥水・防汚・ソフトタッチ  
ベッド側生地:高通気立体織


サイズ(mm)

800×550×30

## ショルダー

UCGR010

血流を妨げず、呼吸が楽にできる、高さや形状。

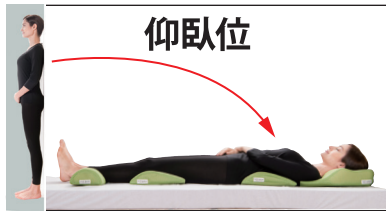


サイズ(mm)

400×500×90

## レスト60

UCGR060

60°側臥位や背臀位(はいでんい)の際、体の下に布を敷き込む事で安定した姿勢を保ちます。

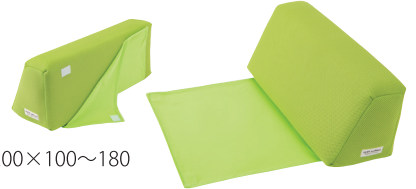

サイズ(mm)

500×200×100~180

## フェイス

UCGR020

中央部の穴は、伏臥位の下向きでは目、鼻、口。横向きでは耳を入れて安定した姿勢が保てます。



サイズ(mm) 240×190×80

## レスト30

UCGR070

30°側臥位をしっかりと保持します。



サイズ(mm)

500×250×5~155

## チェスト

UCGR030

うつ伏せ時の胸部保護。車椅子の背当てや体位変換時の背当てなど様々な用途に対応。




サイズ(mm)

400×400×10~100

## スパーサー

UCGR080

体の隙間を埋める適度な大きさと柔らかさ。

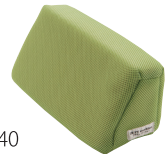

サイズ(mm)

320×150×60~140

## ニー&ウエスト

UCGR040

後頭部・耳・肩甲骨・肘・仙骨・尾てい骨・ひざ内・くるぶし・かかなどの除圧にご使用いただけます。



サイズ(mm)

400×500×60

## ロングシート

UCGR090



サイズ(mm)

850×450×40

車椅子や、自動車のシートに最適。背中から座面、座面から足元といった使い方ができます。



## アンクル

UCGR050

足首のすきまなどに、自然に優しくフィットします。



サイズ(mm)

500×160×80

## チェアシート

UCGR100



車椅子や、自動車のシートに最適。底づきを軽減する二層構造。



サイズ(mm)

400×400×55

## 必ずお読みください。【ご使用上の注意】

- カバーから中身を取り出さないでください。
- 中身のウレタンフォームは、紫外線によって少しずつ変色しますが、物性に対する影響はありません。
- 枕やポジショニングクッションの用途以外ではご使用にならないでください。

## 洗濯について

①カバーをつけたまま「まる洗い」してください。

【洗濯機使用の場合】ソフト洗い(弱水流・手洗い)コースに設定し、  
単独(他の物はいれない)で洗濯してください。

【手押し洗いの場合】優しく手押し洗いをしてください。

ウレタンフォームは、水気を含んだ状態で負荷がかかると亀裂を生じ、  
破損につながりますので、絶対にもみ洗いはお止めください。

②いずれかの方法で洗った後、脱水機にかけて充分水気を切ってください。

(水気が多いと、乾燥に時間がかかり、臭いやカビの発生の要因となります。)

③洗濯、脱水が終わりましたら、風通しの良いところで十分に陰干しをしてください。

別売の「乾燥ネット(UCNET)」をご使用になれば場所を取らず早く乾かせます。

乾燥ネット使用時の陰干し時間の目安:12時間~40時間。

※冬場の気温が低い時期や雨天では中心部まで乾きにくい事がありますので、再度ご使用になる前に押しつぶして水分が残っていないか確認してください。

※中身のウレタンフォームが濡れた状態の時は、大変もろくなっておりますので、取扱いには充分ご注意ください。

※洗濯洗剤の使用に關しまして、粉末洗剤をお使いになるとウレタンフォームの中に残留物が出る可能性がありますので、液体洗剤か水のみのご使用をお勧めします。

※カバーは、色落ちの恐れがありますので、他のものと一緒に洗濯しないでください。

## 殺菌消毒処理について

■エタノール使用可/熱80℃ 10分以下可 (但し火気厳禁です。)

■クレゾール使用不可/次亜塩素酸ソーダ不可/オートクレーブ不可

■推奨①:専用剤(クラスゼロアルティ)2倍希釈品スプレー→乾燥

②:専用剤(クラスゼロアルティ)10倍希釈品1時間浸け置き→洗濯・脱水→乾燥

〈別売オプション〉

・乾燥ネット(UCNET):お手持ちのハンガーが使えて大変便利です。

・クラスゼロ アルティ(水成二酸化塩素水)(CZ010):製品を傷めず安全性の高い高性能除菌剤です。

\*商品には、万全の管理をしておりますが、万一不都合がございましたら、下記までご連絡ください。

生命を包む世界品質

発売元 **ACTION**  
JAPAN

**アクション ジャパン 株式会社**

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL.078-843-5417 FAX.078-843-6817

