

ご注目

- 不慮の事故による死亡原因の同立第1位は転倒転落と窒息
- 女性が要介護状態になる原因の第2位は転倒転落
- 日常生活事故で救急搬送される方の82%は転倒転落
- 病院内での転倒転落事故は72%以上が排泄行動に起因する




生命を包む世界品質
ACTION
JAPAN

転落や転倒による衝撃を緩和する **ワンダーマット**



蓄光シールつき
消灯後、約40分光ります！

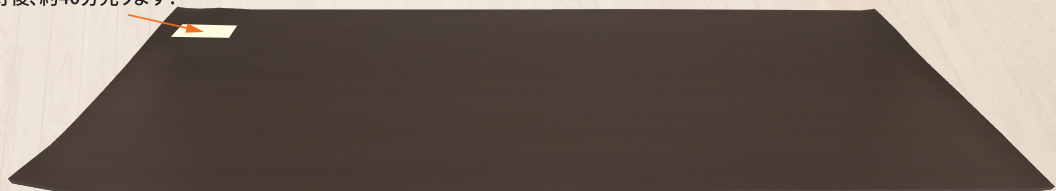

裏面は滑り止め加工


マットがずれにくく、介助作業の足元が安定します。

アルティ
マテリアルシリーズ
ワンダーマット

超薄型衝撃吸収マット

POINT ① 5ミリ厚でも！
転落・転倒の衝撃を緩和！


転倒時大腿骨頸部骨折をシミュレートした衝撃試験データ

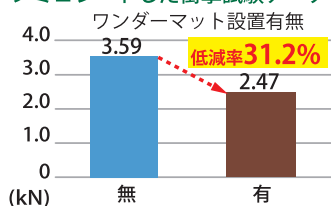

*高齢者転倒転落ダメージ対策協議会推奨の試験方法で、名古屋大学研究室が計測した数値の平均を示しました。

POINT ② 5ミリ厚だから！
段差が気にならない！

マットの3辺が斜め加工されているので歩行や車椅子の走行を妨げません。

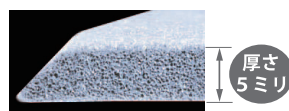

品番	品名	サイズ・重量
UWGY110	ワンダーマットS・グレー JAN:4528949017027	サイズ (約) mm W500×D1000×H5 重量 (約) 0.7kg
UWBN110	ワンダーマットS・ブラウン JAN: 4582310343702	
UWGY210	ワンダーマットM・グレー JAN:4571543561212	サイズ (約) mm W750×D1000×H5 重量 (約) 1.1kg
UWBN210	ワンダーマットM・ブラウン JAN:4571543561229	
UWGY310	ワンダーマットL・グレー JAN:4528949017034	サイズ (約) mm W750×D1500×H5 重量 (約) 1.6kg
UWBN310	ワンダーマットL・ブラウン JAN:4582310343719	

材質：特殊ポリウレタン PORON®

アルティ・ワンダーマット
見守りサービス

ご使用期間の1年経過をお知らせします。

弊社では、ご使用いただいている「アルティ・ワンダーマット」の機能低下による事故を防ぐため、ご登録の使用開始日をもとに「1年定期点検」実施日と点検内容のご案内をメールでお知らせします。

取扱説明書に記載されたQRコードを読み込んで、WEBページにお進みください。本体の6桁のシリアルナンバーと、1年後にご連絡が取れるメールアドレスが必要です。

*個人情報保護について <https://www.kouken-kasei.co.jp/privacy/> をご確認ください。

*本サービス対象製品については、弊社から発送されたシリアルナンバー付き「アルティ・ワンダーマット」に限られます。



衝撃吸収マット
ワンダーマット

検知マット
フロアセンサー

業界初

異業種間コラボで転倒リスクの軽減へ

アクションジャパン株式会社
衝撃吸収マットワンダーマット

株式会社バイオシルバー
検知マットフロアセンサー

推奨

フロアセンサー

バイオシルバー社製：
ワイヤレスフロアセンサーM

サイズ(mm)	質量(kg)	材質
60 × 95 × 4	2.0	PVC

カラー：グレー

ナースコールに
連携させて通知



ワンダーマットについてお客様からのよくある質問 Q & A

Q1 なぜ、厚みが5mmなのですか？

A1 常時敷いた状態で24時間、安全対策ができる床マットを目指して商品開発を行いました。そこで、筋力低下や麻痺により、つま先が上がりにくい方にとって障害物と感じにくい5mm以下の厚みにする必要があったからです。

Q2 厚さ5mmでは薄くて心配なのですが、痛くないですか？

A2 多少の痛みはあると思いますが、素材性能により、骨にかかるダメージは大幅に軽減されます。

Q3 汚れたときは、どのように処理しますか？

A3 中性洗剤やエタノールによる清拭を行ってください。(トルエン・シンナー等の有機溶剤を使用されると材質をいためます。次亜塩素酸Naは変色しますが物性に影響はありません。)

MRSA やノロウィルス対策には、弊社の除菌清拭剤「クラスゼロ・アルティ」のご使用をおすすめします。

Q4 浴室の床で使えますか？

A4 脱衣所でのご使用は可能ですが、浴室内では水に浮いてしまい危険ですのでおやめください。

Q5 床に固定することは可能ですか？

A5 両面テープ等で固定することは可能ですが、完全固定はおすすめしません。

Q6 部屋の床全部に敷き詰めたいのですが？

A6 温度依存性のある素材ですので、低い温度では硬く、高い温度では軟らかくなります。同時に若干の伸び縮みがありますので、寒くなると隙間ができる可能性があります。

Q7 別注サイズの製作は可能ですか？

A7 厚み5ミリ、幅1m、長さ20mまでは別注対応可能です。但し、1.5m以上のテーパー加工はできません。

Q8 ベッドサイド以外でも使用できますか？

A8 トイレ周りやリハビリ室等の転倒転落リスクの高い所への設置をおすすめします。ハサミで簡単に切れますので、柱や家具の出っ張りに合わせてご自分で施工できます。

Q9 離床センサーとの組み合わせはできますか？

A9 ほとんどの離床センサーマットの上に設置して頂けますが、事前に必ず実験を行ってください。超音波や赤外線を使ったセンサーは影響ありません。

使用上の注意

- 設置場所に「突起物」「汚れ・ホコリ」「水分」がない事をご確認下さい。
- 浮きや、めくれの無いようにご注意下さい。
- 一時保管の際は丸めて、立てて置いて下さい。
- 頻回にマットをめくり、床に貼り付いていたり、水分が入り込んでいないかご確認下さい。
- 火気周辺での使用は絶対におやめ下さい。
- 本製品は100%骨折を防ぐものではありません。

生命を包む世界品質
ACTION
JAPAN

アクションジャパン株式会社

〒658-0046 神戸市東灘区御影本町2丁目9-16

アクションジャパンビル

TEL : 078-843-5417 FAX : 078-843-6817

