

環境清拭用クロス

# アメジストワイパー 80

エタノール

火気厳禁

- ・引火性液体
- ・電化製品等の静電気による引火に注意

エタノールタイプ



使用例

- ・ドアノブ、テーブル、ベッドサイド、機器外装など
- ・キーボード、マウスなどのパソコン周り

サイズが選べる

2タイプ



大判

100枚入

100枚入

洗浄  
除菌

医療施設・介護施設の  
環境表面の清掃に



片手で開封可能な  
フタ付タイプ!

※開封後はなるべく早めにご使用ください

# 特長

- **高濃度エタノール+界面活性剤+PHMB 配合**で高い洗浄力があります
- **速乾性**があるため、清拭後素早く乾きます（※当社比）
- 汚れをかきとりやすい**メッシュタイプの不織布**です
- 詰め替えの必要がなく**衛生的**で、持ち運び・保管に便利な**ピロータイプ**です



# 材質劣化試験結果

本試験は試験片での社内試験結果となります  
保証値ではありませんのであくまで参考としてください

※その他機器への使用につきましては、製造メーカー様にお問い合わせください。  
※木材・合皮・天然ゴムなど材質・塗装によっては表面が変色・変質する恐れがあるため、目立たない場所で確認してからご使用ください。


## 試験片による社内試験結果

金属	プラスチック樹脂		ゴム樹脂	
ステンレス	○	ポリエチレン	○	シリコンゴム ○
アルミニウム	○	ポリ塩化ビニル	○	ウレタンゴム △
ニッケル	○	ABS樹脂	○	ニトリルゴム △
銅	×	アクリル	×	
真鍮	×			
鉄	×			
亜鉛	×			

○：変化なし  
△：一部変化あり  
×：変化あり

【試験方法】各試験片を製品で包み、袋で密封した状態で  
14日間（336時間）経過後の外観・重量変化を確認。

# 規格

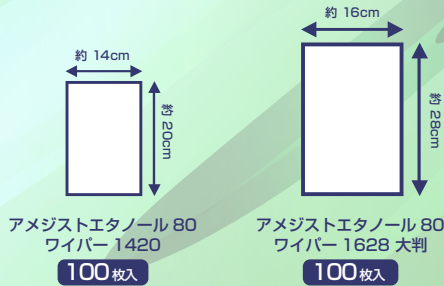

**含浸液について**

引火性の高い液体及び蒸気/強い眼刺激/呼吸器への刺激のおそれ/眠気またはめまいのおそれ/遺伝性疾患のおそれ/生殖能または胎児への悪影響のおそれ/長期にわたる、または反復ばく露による肝臓への障害/長期にわたる、または反復ばく露による中枢神経系への障害のおそれ

品コード	商品名	規格(単位:cm)	単位	外箱入数	ラテックス	バーコード	
2255	環境清拭用 アメジストエタノール 80ワイバー	1420	14 × 20 100枚入	袋	24袋/ケース	無	4904820022555
2256	アメジストエタノール 80ワイバー	1628 大判	16 × 28 100枚入	袋	18袋/ケース	無	4904820022562

【成分】エタノール、水、界面活性剤、pH調整剤 ほか 【素材】レーヨン・ポリエステル不織布

## お問い合わせ・資料請求先

**amethyst** 大衛株式会社

- ☐ 札幌 TEL.011-817-3600
- ☐ 仙台 TEL.022-207-3780
- ☐ 東京 TEL.03-5981-7180
- ☐ 北関東 TEL.03-5981-7180
- ☐ 南関東 TEL.03-5981-7180
- ☐ 名古屋 TEL.052-369-4110
- ☐ 学研都市 TEL.072-856-6531
- ☐ 大阪 TEL.06-6928-7245
- ☐ 広島 TEL.082-211-2166
- ☐ 福岡 TEL.092-622-8415
- ☐ コンシューマ事業本部 TEL.052-355-2711



アメジスト 大衛 検索  
https://amethyst.co.jp