

●歩行車 リトルターンII／リトルターンII抑速プラス

排泄

入浴

住宅関連


移動・歩行

介護予防

食品

衛生用品

部品一覧

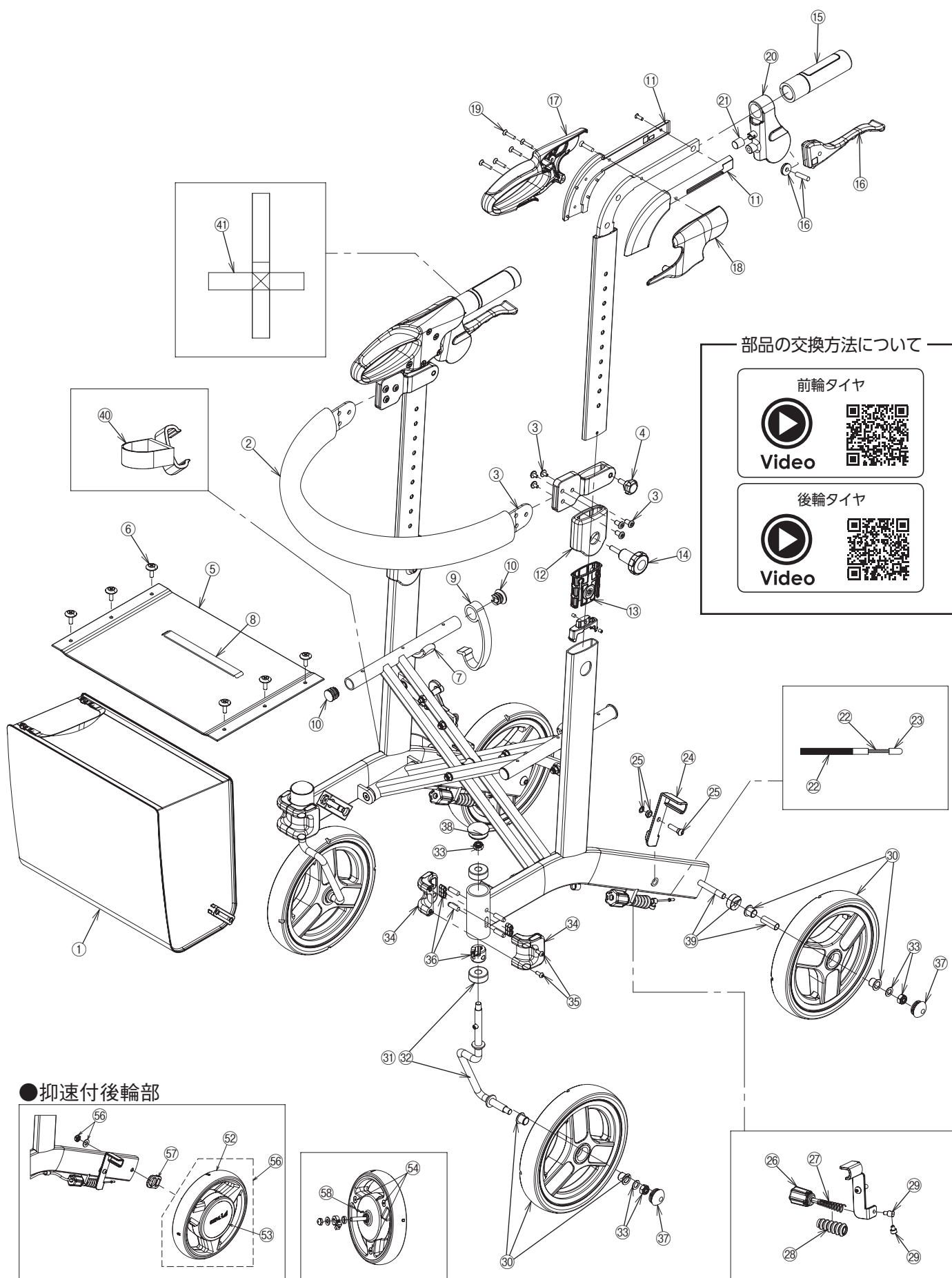

部品の交換方法について




前輪タイヤ

Video 

後輪タイヤ

Video 

●抑速付後輪部

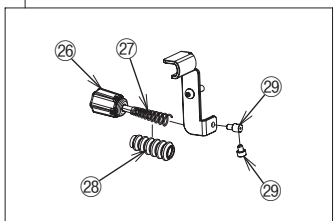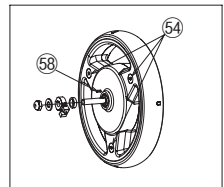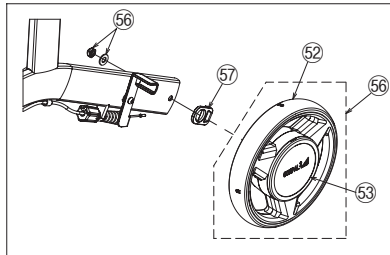

※部品については、お届けまでに日数をいただいておりますので、あらかじめご了承ください。

部品一覽

製品名	No.	部品名	部品コード	価格	備考
リトルターンⅡ/ リトルターンⅡ抑速プラス	①	バッグセット(L/H/抑速用)	591952		リトルターンと共通
	②	姿勢保持ベルトカバー	591953		リトルターンと共通
	③	姿勢保持ベルトセット	591954		リトルターンと共通
	④	姿勢保持ベルト固定ノブボルト(2個入り)	591955		リトルターンと共通
	⑤	座面	591956		リトルターンと共通
	⑥	座面固定ボルトセット(6本入り)	591957		リトルターンと共通
	⑦	座面受けカバーセット(2個入り)	591958		リトルターンと共通
	⑧	折りたたみベルト	591999		リトルターンと共通
	⑨	折りたたみ保持フック	591960		リトルターンと共通
	⑩	シートパイプエンドキャップセット	591961		リトルターンと共通
	⑪	ハンドル基部左右セット(LTⅡ用)	592710		リトルターンⅡ KM と共通
	⑫	高さ調節クランプ外(2個入り)	592711		
	⑬	高さ調節クランプ内(2個入り)	592712		リトルターンⅡ KM と共通
	⑭	高さ調節ノブボルト	592459		リトルターン Z と共通
	⑮	ハンドルグリップセット(2個入り)	592713		リトルターンⅡ KM と共通
	⑯	ブレーキレバーセット	592714		リトルターンⅡ KM と共通
	⑰	楽らくグリップ左右セット	592715		リトルターンⅡ KM と共通
	⑱	楽らくグリップカバー左右セット	592716		リトルターンⅡ KM と共通
	⑲	楽らくグリップ固定ネジセット(10本入り)	592717		リトルターンⅡ KM と共通
	⑳	ブレーキ基部(左右セット)	591967		リトルターンと共通
	㉑	ブレーキ基部キャップ×2	591968		リトルターンと共通
	㉒	ブレーキワイヤーセット(LTⅡ用)	592718		リトルターンⅡ KM と共通
	㉓	ブレーキワイヤー端部キャップ(10個入り)	591971		リトルターンと共通
	㉔	ブレーキ板(左右セット)	592210		リトルターンと共通
	㉕	ブレーキ板固定ボルトセット	591973		リトルターンと共通
	㉖	ブレーキ調節ネジ(内蔵バネ含む)	592488		リトルターン Z と共通
	㉗	ブレーキバネ	591975		リトルターンと共通
	㉘	ブレーキバネカバー	591976		リトルターンと共通
	㉙	ブレーキ固定ソケットセット	591977		リトルターンと共通
	㉚	タイヤセット前輪・後輪共通(2個入り)	592719		リトルターンⅡ KM と共通
	㉛	前輪フォークセット(右)	592720		リトルターンⅡ KM と共通
	㉜	前輪フォークセット(左)	592721		リトルターンⅡ KM と共通
	㉝	前輪・後輪固定ナットセット(10個入り)	592722		リトルターンⅡ KM と共通
	㉞	前輪角度制御レバー左右セット	592723		リトルターンⅡ KM と共通
	㉟	前輪角度制御レバー固定ネジセット(10本入り)	592724		リトルターンⅡ KM と共通
	㊱	前輪角度制御セット	592725		リトルターンⅡ KM と共通
	㊲	後輪キャップ	591979		リトルターンと共通
	㊳	前輪フォークキャップ	591983		リトルターンと共通
	㊴	後輪シャフトセット	592726		リトルターンⅡ KM と共通
	㊵	杖ホルダー	591984		リトルターンと共通
	㊶	杖固定ベルト	591985		リトルターンと共通
	㊷	ブレーキ・駐車ロックシール左右10枚入り	592000		リトルターンと共通 ※
	㊸	ブレーキ調節表示シール10枚入り	592001		リトルターンと共通 ※
	㊹	指はさみ注意シール10枚入り	592002		リトルターンと共通 ※
	㊺	フレーム前方保護シール10枚入り	592727		リトルターンⅡ KM と共通 ※
	㊻	フレーム後方保護シール10枚入り	592215		リトルターン Z、 ショッピングターンと共通 ※
	㊼	ブレーキ指はさみ注意シール左右10枚入り	592006		リトルターンと共通 ※
	㊽	前輪角度位置表示シール10枚入り	592728		リトルターンⅡ KM と共通 ※
	㊾	回転制御表示シール10枚入り	592729		リトルターンⅡ KM と共通 ※
	㊿	補修用スプレーR	592278		リトルターンと共通 ※
①	補修用ペイントR(タッチペン)	592279		リトルターンと共通 ※	
リトルターンⅡ抑速プラス	②	LTⅡ抑速プラス交換タイヤキット1台分	592741		リトルターンZ抑速プラスと共通
	③	LTⅡ抑速プラスセンターキャップ	592742		リトルターンZ抑速プラスと共通
	④	LTⅡ抑速プラスM6皿ボルトセット	592743		リトルターンZ抑速プラスと共通
	⑤	LTⅡ抑速プラス抑速ブレーキ力調節用六角レンチ	592744		リトルターンZ抑速プラスと共通 ※
	⑥	LTⅡ抑速プラス抑速ユニット左右セット	592745		リトルターンZ抑速プラスと共通
	⑦	LT抑速付(M8)タイヤジョイントセット1台分	592336		
	⑧	LTⅡ抑速プラス抑速ユニットシャフトキー	592746		リトルターンZ抑速プラスと共通

「備考」欄に※印がある部品は図示していません。

※部品については、お届けまでに日数をいただいておりますので、あらかじめご了承ください。