




7-1268-03 N1  
 7-1268-01 N2  
 7-1268-02 N4



投入口  
 サイズ：約 35mm×70mm

ペン型注射器用針外し口

注射針外し口  
 (ルアーロック式・ルアースリップ式・  
 歯科用注射針等に対応)

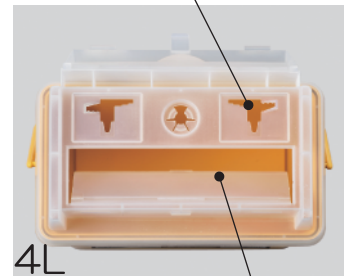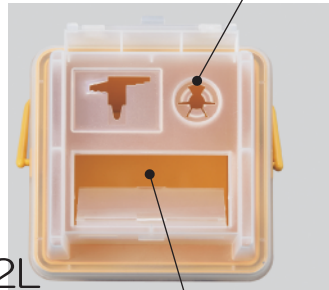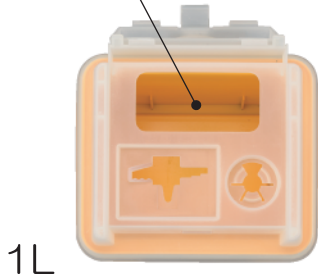

1L

2L

4L

投入口 (転倒時逆流防止板付き)  
 サイズ：約 50mm×100mm


投入口 (転倒時逆流防止板付き)  
 サイズ：約 50mm×190mm

## 【注射針取り外し方法】

### ルアースリップ式注射針



### ルアーロック式注射針

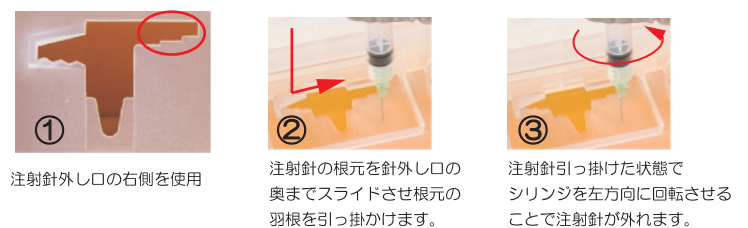

### 歯科用注射針等



### ペン型注射器用針



※ペン型注射器用針を廃棄する場合は交差感染防止のため、複数名でのご使用はお控え下さい。

## 【使用後廃棄方法】



●本体ラベルの上限ライン付近まで廃棄物が溜まりましたら最終ロック用のツメを差込んで下さい。しっかりとロックされていることを確認後、注射針回収ボックスごと廃棄して下さい。



### ⚠ 注意

※注射針が飛び出す危険性がありますので絶対に上限ラインを越えて廃棄物を投入しないでください。  
 ※製品の再使用はしないでください。

## 【仕様】

- 材質：本体 /PP(ポリプロピレン) ●転倒時逆流防止板付き (N2、N4のみ)
- 手提携取手付き (N2、N4のみ)
- サイズ：N1/144×130×145mm、N2/165×170×180mm、N4/255×155×200mm

**アズワン株式会社**  
 AS ONE  
 商品に関するお問い合わせは  
 カスタマー相談センター  
**TEL** 0120-711-875  
**FAX** 0120-700-763  
 問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>  
 受付時間：午前9時～12時、午後1時～午後5時30分  
 土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません