

## ナースコール参照図

参照図に該当するナースコールスイッチは加工や改造の必要がありません。

\*下図以外のナースコールスイッチは弊社にお送り頂き、簡単な加工を行い、製品と共にお届けさせていただきます。

\*ナースコールシステムが変更になる場合は中継ボックスとともに接続アダプタ（35頁参照）が必要になる事があります。

メーカー名	(株) ケアコム									パナソニック		ナカヨ	NTT
番号	①	②	③	④	⑧	⑨	⑮	⑯	*⑱	②	⑩	⑳	㉑
名称	標準2P	トーン2P	標準3P	6mmプラグ	ケアコム4P	ケアコム4PZ	ケアコム5P	ケアコム6PF	ケアコム6PW	トーン2P	パナソニック2P	ナカヨSP	アンシンSP
弊社記号	STD2	T2	STD3	6P	C4	C4Z	C5	C6F	C6W	T2	T2C	NSP	ASP
ソケットの形状													
ナースコールスイッチの形状													
ナースコール子機型番 (1例)	RB-822 RB-822C		RB-823 RB-823C		※⑧⑨は型番を確認して下さい。 BA-511 BA-511Z BA-501 BA-501Z			RB-830Z BA-502Z BA-501Z	RB-826WZ BA-601WZ BA-602WZ	BVH-C804M VHR-560C BVH-R560C		※㉑はメーカーを確認して下さい。	

メーカー名	アイホン(株)													
番号	①	②	③	④	⑤	⑥-B	⑥-C	⑥-E	⑦	⑪	⑫	⑬	⑭	*⑰
名称	標準2P	トーン2P	標準3P	6mmプラグ	アイホン2P	アイホン4PB	アイホン4PC	アイホン4PE	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	アイホン3P	アイホン3PNF	アイホン6V
弊社記号	STD2	T2	STD3	6P	A2	A4-NB	A4-NC	A4-NE	A5	A5NF	A6NF	A3	A3NF	A6V
ソケットの形状														
ナースコールスイッチの形状														
ナースコール子機型番 (1例)	NBR-8A/A NBR-8A-C		NBR-8A/A NBR-8A-C		UAR-8 UBR-8	※⑥-B,C,Eは型番を確認して下さい。 ⑥-Bは一部対応できない場合があります。 NB-RC/A NC-RC NE-RC			UA-SB8 UB-SB8	NFR-8A NFR-8	NF-SBA NF-SB			NL-SB NLR-8 NLR-8-TT

\*⑱ケアコム社製「Well」シリーズの場合は、別途ケアコム社製「分配コンセント」が必要です。



ケアコム社製分配コンセント機種例  
名称：分配コンセント（2P、W6P、一般）  
型式：BB-301WZ-2P/W6P-NC  
定価：¥16,000（税別）

\*⑰アイホン社製「Vi-nurse」シリーズの場合は、壁に「オプション入力コンセント」の有無をご確認ください。無い場合、別途「オプション入力コード」が必要です。



オプション入力コンセント



名称：オプション入力コード  
型式：NLR-CA-OP  
定価：¥8,500（税別）