


Air Massager

包み込まれる  
心地よさ



15 l エアポンプ

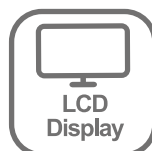

見やすい  
LCD液晶



4つに分かれた  
エアポケット/  
多様なプログラム



軽量かつ  
ハンドル付きで  
持ち運びしやすい

家庭用エアマッサー器  
ナビウェーブ

**NAVI Wave** NV-9100

管理医療機器  
医療機器認証番号 229AHBZX00032000

使用目的または効果 / あんま・マッサージの代用

- 疲労回復 ● 血行の促進
- 筋肉の疲れをとる ● 筋肉のコリをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる

### Aモード

4つのエアポケットの圧力が均一。低/高ボタンで圧力を調節。




### Bモード

4つのエアポケットの圧力が均一。低/高ボタンで圧力を調節。



### Cモード

各エアポケット毎に圧力設定可能。低/高ボタンで圧力を調節。

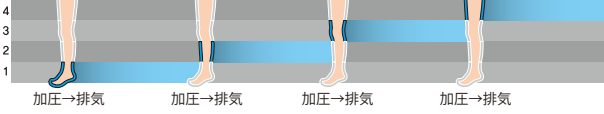

### 特長

- 空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。
- マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類しております。
- Cモードでは4つのエアポケット毎に圧力を設定できます。
- 表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。

各モード全てつま先から太ももへ揉みあげる動作仕様のため効果的に下肢から心臓への静脈還流を促します。



- コース / 時間設定**  
モードの選択、長押しで時間設定ができます
- 電源 ON/OFF**  
運転を開始、もしくは終了します
- マニュアルモード**  
マニュアルモード時に加圧部位の変更ができます

30~120mmHgまで5単位で変更できるため、細やかな圧力設定が可能です

時間設定  
1分単位で行えます

低・高圧力、タイマーの変更ができます



ブーツエクパンダーがあれば、こんなに大きく!



品番	型番	仕様	価格(税別)
7-3180-01	NV-9100	約204×240×127mm	¥ 89,000
7-3180-11		交換用エアブーツ両足セット	¥ 27,000
7-3180-12		ブーツエクパンダー (両足)	¥ 4,500
7-3180-13		交換用本体接続エアホース	¥ 1,000
7-3180-14		交換用ブーツ接続エアホース	¥ 1,400
7-3180-15		交換用T分配器	¥ 200
7-3180-16		交換用エアホースプラグ	¥ 200

- 仕様**
- 電源：AC100V 50Hz/60Hz
  - 消費電力：20W
  - 加圧モード：4モード(A、B、Cモード、マニュアルモード)
  - タイマー設定時間：1～30分(1分単位)
  - 空気圧設定範囲：30～120mmHg(4.0～16.0kPa)
  - 重量：3.4Kg
- セット内容**
- <NV-9100>：本体、エアブーツ両足セット  
<交換用エアブーツ両足セット>  
エアブーツ、接続エアホース、ブーツ接続ホース、T分配器、エアホースプラグ

※-01のみ管理医療機器です。

次の人は、本機を使用しないでください

1. 医師からマッサージを禁じられている人(例：血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症 [皮下組織の炎症含む]など)
2. 骨粗しょう(鬆)症、の人、せきつい(脊椎)を骨折している人、ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急とう(疼)痛性疾患の人
3. ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内挿込み型医用電気機器を使用している人
4. 妊娠中や出産直後の人
5. 脚部に重度の血行障害のある人
6. 装着部におでき、やけど、虫さされなどの急性炎症や化膿性疾患がある場合

医師の治療を受けている時や下記に当てはまる人は必ず医師と相談のうえ使用してください

1. 悪性しゅよう(腫瘍)のある人
2. 心臓に障害のある人
3. 糖尿病など高度な末しょう(梢)循環障害による知覚障害のある人
4. 体温 38℃以上(有熱期)の人(例：急性炎症症状[けん怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)
5. 高血圧症と診断されている人
6. 皮膚の弱い人
7. 治療部位に創傷のある人
8. 治療部位に疾患から生じるむくみや疼痛のある人
9. 治療部位に骨折、脱ぎゅうのある人
10. 自覚症状の意思表示ができない人
11. 安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき
12. 上記以外の疾患で医師の治療を受けている人
13. 上記以外に身体に特に異常を感じているとき



- 大阪本社
- 東京オフィス
- 横浜支店
- 名古屋支店
- 札幌営業所
- 仙台営業所
- 京都営業所
- つくば営業所
- 広島営業所
- 静岡営業所
- 福岡営業所
- 沖縄営業所
- 高松営業所

■ ご用命は信用ある販売代理店へ