

# エクセレン **EXCELENE**<sup>®</sup> 水溶性ランドリーバッグ ご使用上の注意

## 保管時

水溶性ランドリーバッグは、ご使用されるまでジッパーバッグから取り出さないでください。

水溶性ランドリーバッグの使用分を切り離しましたら、残りのバッグは再度ジッパーバッグに入れて封をしてください。

ジッパーバッグに密封することで、空気中の水分に触れることを防ぎます。

ジッパーバッグに密封された水溶性ランドリーバッグは、7°C~30°C、RH 20~70%の環境で保管ください。なるべく乾燥している環境で保管することを推奨します。

推奨保管期間はメーカー出荷後1年間です。

## 使用開始時

水溶性ランドリーバッグは乾燥した手でお取り扱いください。

バッグの強度や品質を維持するため、水分が触れないようご注意ください。

【重要】 まずはじめに乾燥したリネンを先にバッグに入れてください。

これにより乾燥したリネンがバッグ底部に置かれるので、その後に少し濡れたリネンが入れられたとしても、水分のバッグへの接触を最小限に抑えられます。

濡れがひどいリネンは入れないようにしてください。水溶性ランドリーバッグは水分の影響を受けやすい材質で作られています。

## 密封時

水溶性ランドリーバッグを閉める前に、中の空気をなるべく追い出してください。

出てきた空気が顔にかからないよう注意して作業をしてください。

空気を十分に抜くことで、バッグを積んだりする際の強度が高く保たれます。

バッグに付属するオレンジ色のテープを剥がして、このテープでバッグの口を締めてください。

【注意】 バッグの口を直接結ばないでください。結び目が洗濯中に溶け残る可能性があります。

テープで密封された水溶性ランドリーバッグは、他の外袋に入れて持ち運ぶようにしてください。

バッグに穴が開いたりするリスクを減らすことができます。

## 洗濯時

密封された水溶性ランドリーバッグは、直接洗濯機に投入してください。

感染リスクを避けるため、洗濯前に洗濯物を仕分けすることはされないでください。

温度の低い予洗段階でオレンジテープが溶け、バッグの口が開き、汚れたリネンが洗濯槽内に広がります。

バッグを完全に溶解させるために、次のことを遵守ください。

洗濯機の推奨容量以上の洗濯物を投入しないでください。

洗浄中の熱水温度は65°C以上になるようにしてください。

洗剤が投入される前に、65°C以上の熱水で40秒以上まわしてください。その後、65°C以上の熱水で15分以上、洗浄してください。

本資料に記載されている情報は信頼できるデータに基づく代表的な性質の紹介であり、当社及びメーカーが次の事項について保証するものではありません。

(1)本製品から得られる最終製品の性能

(2)本製品およびその情報・推奨事項に関連する有効性や安全性

メーカー、当社およびその代理店は、製品を使用したことによる結果・損失に関するいかなる責任も負いません。

本製品およびその情報・推奨事項の使用・活用につきましては、お客様の責任により十分な試験を実施していただき、使用可否を決定いただけますようお願いいたします。

最終製品における、本製品の安全性や適正については、お客様ご自身で必要な評価・分析を行っていただき、ご判断くださいますようお願いいたします。

本資料に記載されている以外の技術情報、口頭の推奨事項などにつきましても、メーカー、当社およびその代理店は、同様にいかなる責任も負いません。

**West One**  
Corporation

株式会社ウエストワン

<http://www.westone.jp/>

Email: [info@west-1.co.jp](mailto:info@west-1.co.jp)

TEL: 03-4530-9885