



# 貼り方ガイド

## 【オモテ】

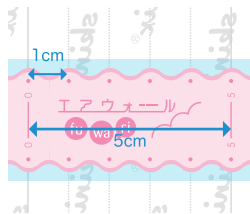


## 【ウラ】

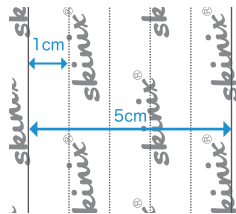

## ウラの紙の形状について

シングルスリットと50mm幅は、スリット位置が異なり、ウラの紙が2枚になっています。作業手順を減らしたい方におすすめです。

### ダブルスリット

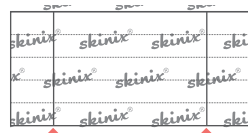

スリット

### シングルスリット



スリット

### 50mm幅



スリット

## 用途に合わせた3サイズ

50mm幅 100mm幅 150mm幅

ロール状なので  
使用する  
分だけカット！



100mm幅のエアウォールふ・わりを使用して説明しています。




テープを使いたいサイズに予めカットします。



ウラの中央の紙をはがします。残りの両端の紙は持ち手にするの、はがさないでください。



テープの両端を持ち、貼ります。

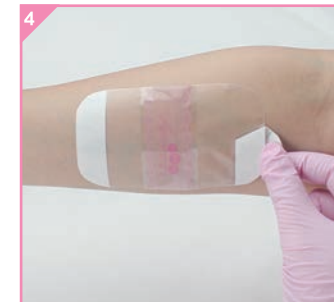

両端の紙をはがし、テープを端まで貼ります。



テープ全体を押さえ、しっかり肌へ密着させます。



ピンクのテープの端から、オモテのフィルムをゆっくりはがします。



残りのフィルムも中央からゆっくりはがします。



最後にテープを肌になじませて完成です。

## はがし方



テープのふちを指の腹でやさしくこすり、少しはがします。



はがしたところを持ち手にして、テープを皮膚と平行に引っ張りながら、ゆっくりはがします。

## 未滅菌ロール状フィルムドレッシング

用途: ガーゼ・パッドなどの被覆固定、入浴・シャワー時の防水、  
ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策などにおける皮膚の被覆など。



エアウォールふ・わりの詳細情報

skinix ふ・わり 検索



【使用上の注意】●エアウォールふ・わりは、未滅菌ですので直接カテーテル刺入部や創部に貼付しないでください。●貼付部分の水分や汚れはよく拭きとり、清潔にしてください。水気があるときにくい場合があります。●小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用してください。●本品の使用により、発疹、発赤、かゆみ等があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使用してください。【保管方法】●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所で保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。  
【ゼロ感覚フィルムドレッシング 注釈】ゼロ感覚とはまるでテープを貼っていないかのような感覚を意味しています。ただし感覚には個人差があります。

テープが医療にできること、もっと。



www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社: 〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28

TEL: 06-6658-8217

FAX: 06-6658-8101

東京支店: 〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16

TEL: 03-5634-3843

FAX: 03-5634-3845

札幌・仙台・名古屋・熊本