

取扱説明書

Instruction Manual

らくらくあるくん～低床型～(ポンベ架付)

お買い上げ誠にありがとうございます。
 取り扱い説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

Rkun-LOP(オレンジ)
 Rkun-LBP(ブルー)
 Rkun-LGP(グリーン)

目次

注意事項…………… P.1
 各部名称…………… P.2
 ご使用方法…………… P.2

仕様一覧…………… P.2
 製品保証…………… P.3

注意事項

必ずお守り下さい

《使用上の注意事項》

- ・使用前は必ず医療機関、福祉用具専門員、介護支援専門員等に相談の上ご使用下さい。
- ・本製品は屋内用歩行補助器です。他の用途には使用しないで下さい。
- ・ご自分で商品を分解・修理・改造などを行わないで下さい。
- ・使用前にキャスターやネジ類・部品等が固定されている事を確認の上ご使用下さい。
- ・肘置きマットの高さ調整の際は、ノブネジの閉め忘れにご注意下さい。
- ・転落・転倒の恐れがある場所では、使用を避けるか、必ず介助の方が付き添い注意して下さい。
- ・認知症の方が使用される際は、必ず介助者が付き添い注意して下さい。思わぬ行動でけがや事故をされる恐れがあります。
- ・次のような時は使用しないで下さい。転倒し、けがの原因になります。
 - ◆飲酒後 ◆薬物等による酩酊状態 ◆睡眠薬服用後
 - ◆麻酔が効いた状態 ◆そのほかの感覚や判断力が正常でないとき
- ・キャスター(車輪)の車軸や旋回部に異物(髪の毛・糸くず・ひも等)が絡まないように注意して下さい。
- ・高さを調節する際は、必ず平坦な場所で行ってください。
- ・急加速や急停止、急激な回転などは転倒の恐れがありますのでしないで下さい。
- ・破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止して下さい。
 そのままで使用すると重大な事故につながる恐れがあります。

《お手入れ・保管時の注意事項》

- ・本製品のお手入れは、水に濡らした布か、柔らかい布で乾拭きして下さい。
- ・ひどい汚れの場合は、中性洗剤をぬるま湯で2～3%に薄め布に浸し、軽く絞ってから拭いてください。
- ・その後、水で浸した布を軽く絞り中性洗剤をよく拭取り、さらに乾いた布で乾拭きして下さい。

各部名称



《特長》

- ・ネ스팅ができるので、保管場所を取りません。
- ・低床ベッド型に対応しており、最大で床上7cmのベッドに使用することができます。

ご使用方法

肘置きマット高さの調節方法

- ①2か所のノブネジを緩めてください。
- ②使用に適したマットの位置で2か所のノブネジを強く締め付けてください。

仕様一覧

- ・材 質: 本体／スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、
 マット部／ウレタン・合皮レザー巻
- ・手摺内寸法: (幅)450×(奥行)280mm
- ・ハンドル高さ: 750～1070mm(ピッチ40mm・9段階)
- ・対応ボンベサイズ: 300L・500L(ボンベ架内径φ108mm)
- ・キャスター: 前輪／φ100mm自在、後輪／φ70mm固定
- ・耐荷重: 80kg
- ・重 量: 10kg

保証書

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送或いは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	
型式	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

アズワン株式会社

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875

FAX 0120-700-763

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120-788-535

FAX 0120-788-763

E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間 午前9時～12時、午後1時～5時30分。土・日・祝日及び休業日はご利用できません。

2017年11月初版