


- 1** 包装を開封したら、クレンメの細溝の中に排液チューブをしっかり挟み込み、チューブが完全に閉鎖していることを確認してください。

注意


クレンメで、直角に排液チューブをしっかり挟み込んでください。斜めに挟み込むと尿もれの原因になることがあります。

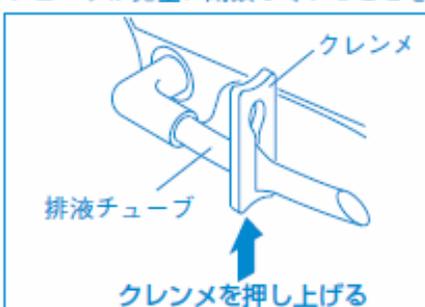


- 2** 導尿チューブ先端のコネクターキャップを外し、カテーテルに接続します。




- 3** ハンガーバンド等でバッグを傾けないように設置します。

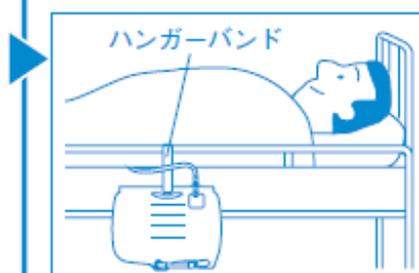

- 4** バッグから尿を排出するときは、排液チューブのクレンメを押し下げて開放します。

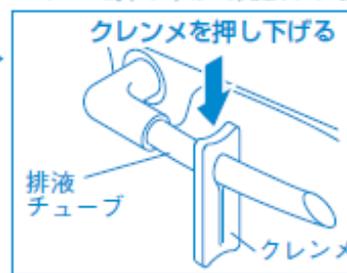**《製品概要》**

- 本製品は、導尿カテーテル留置患者の尿を貯める蓄尿バッグです。他の目的に使用しないでください。

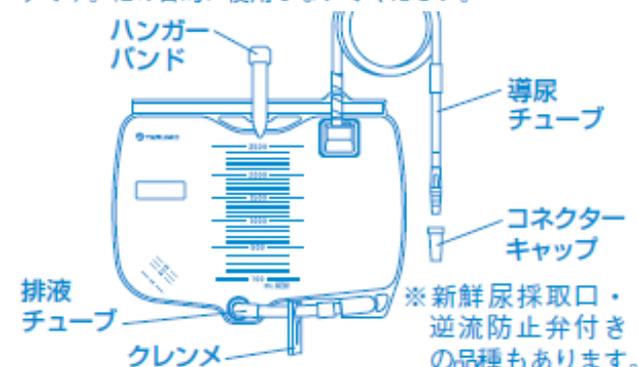**5 新鮮尿採取方法**

(新鮮尿採取口付品種のみ)

1. 導尿チューブを鉗子でとめます。
2. サンプル採取口を消毒し、注射針を穿刺し、シリンジで吸引します。(1回で必要量採取できないときは、繰り返してください。)

注意

誤刺に注意し慎重に行ってください。

《使用上の注意》**注意**

- バッグは、ベッドなどに傾けないように吊り下げ、かつ身体よりも低い位置になるように取り付けてください。尿の逆流や尿流の停滞が起こり、膀胱に損傷を与えるおそれがあります。
- 使用中は、導尿チューブが折れたり潰れたりしていない事を確認してください。過度な折れ曲がりや潰れは尿の流れを悪くします。

《取扱上の注意》

- 本製品は、電子線滅菌され、一回限りの使用になっています。長期にわたり使用する場合は、1週間を目安に新しい製品に交換してください。長期間の連続使用や洗浄、消毒、滅菌しての再使用はしないでください。
- 包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で処分してください。

《保管上の注意》

- 水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保存してください。

輸入販売元：テルモ株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号

MANUFACTURED BY:
TERUMO (PHILIPPINES) CORPORATION
PHILIPPINES

①、TERUMO、ウロガードはテルモ(株)の登録商標です。