

米国EPA
認証除菌剤
(第4級アンモニウム塩)
配合

1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去

除菌&洗浄

1 minute Buster + HPワンミニッツバスター 床用ウェットシート45/60

EPA認証除菌剤配合

CDCガイドラインに準拠

拭拭後の

白残りが少ない

使い捨てで

菌の拡散がない

優れた洗浄効果で

血液除去・油脂除去

素材にやさしい洗浄成分配合のため

金属腐食しづらい

メッシュ素材で

汚れをしっかりキャッチ

第4級アンモニウム塩系のため

持続性がよく、高い安全性

液を多く含んでいるので

45で約30㎡、60で約40㎡清拭可能

床清拭用

広面積清掃可能な
たっぷりの液

サッ!!と除菌&洗浄

あらかじめ洗浄液が含浸されて
いるため開封してすぐに使えます。



洗浄液の希釈作業、塗布作業は不要です。

除菌が必要な床面、手術室床面
(ノンクリティカル)などの除菌洗浄。



HP ワンミニッツバスター床用ウェットシート45/60はダスターモップネオスで使用してください。
他の製品で使用する、やぶける可能性があります。

◆カラーは、[BL・G・W・Y・R]の5色をご用意しております。



PT ダスターモップ ネオス

種別	品番	税抜価格 (1本)	サイズ (mm)	重量 (g)
45	DU664-045U-MB	¥6,000	幅約450 全長約1420	約650
60	DU664-060U-MB	¥6,700	幅約600 全長約1420	約770

●材質 ハンドル：アルミパイプ (φ22mm)、プレート：アルミ

クッションシート：エラストマー製

●梱包数 10本

●JANコード

45 170135 170142 170159 170166 170173

60 170180 170197 170203 170210 170227

45/BL

60/BL

シートサイズ 約
22 cm × 48 cm
5 枚入り
1枚で約30㎡ 清掃可能



シートサイズ 約
22 cm × 64 cm
5 枚入り
1枚で約40㎡ 清掃可能



1枚ずつ袋に入っています。

優れた洗浄効果で

血液除去・油脂除去

血液除去率

※血跡50μmを円形に
2×2cmに伸ばして乾燥した後、
シート拭拭した時の除去率。

95.1%

血液試験前



油脂除去率

※ワセリン50μmをガラスに
2×2cmに伸ばした後、
シート拭拭した時の除去率。

96.4%

油脂試験前



洗浄性試験
ウェットクロスの上に、
汚染剤をセットし、
汚染剤を拭拭する。3回繰り返し。

1 minute Buster + HPワンミニッツバスター
床用ウェットシート

1 minute Buster + HPワンミニッツバスター
床用ウェットシート

種別	品番	税抜価格 (1袋)	サイズ (mm)
45	MO739-045X-MB	¥820	奥行約220×幅約480
60	MO739-060X-MB	¥1,000	奥行約220×幅約640

- シート材質 / ポリエステル・セルロース
- 成分 / 第4級アンモニウム塩・界面活性剤・防腐剤・エタノール
- 液性 / 中性 ●梱包数 / 20袋 (1袋：5枚入り)
- JANコード 45



〈使えないもの〉
・垂鉛、銅、真ちゅう
・水がしみこむ白木・壁材・家具類
・ポリカーボネート
・アルミニウム・木材・皮革などは自立した部分
で確認してから使用してください。

* 全ての菌を除菌または除去するわけではありません。

1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去

米国EPA
認証除菌剤
(第4級アンモニウム塩)
配合

除菌&洗浄



1 minute Buster + HPワンミニッツバスター

除菌洗浄液 4ℓ

EPA認証除菌剤配合

CDCガイドラインに準拠

優れた洗浄効果で

血液除去・油脂除去

素材にやさしい洗浄成分配合のため

金属腐食しづらい

第4級アンモニウム塩系のため

持続性がよく、高い安全性

除菌洗浄液

50倍～200倍に希釈して、
モップ、クロス、スプレーヤー等で使用します。



50倍希釈でEPA認証効果。
200倍希釈までで一般除菌効果。



除菌洗浄液 (4ℓ) 1本で50倍希釈の場合
200ℓの希釈液が作れます。
(HPDSアプリケーターで使用する場合
200ℓ÷1.5ℓ=約133回に相当します。)

HP ワンミニッツバスター除菌洗浄液は
HP DSアプリケーターで使用できます。



本体に、
除菌洗浄液タンク付き。



HP DSアプリケーター

品 番	税抜価格 (1本)	サイズ (mm)	重量 (kg)
C335-000U-MB	¥30,800	幅約500 全長約1425	約1.4

●材質 タンク：PE、ハンドル：アルミ (PEコーティング)、プレート：PVC
●タンク容量：1.5ℓ ●梱包数 1本 ●JANコード 4903180337316

HP DSアプリケーター用クロス



HP DSアプリケーター用クロス

品 番	税抜価格 (1袋)	サイズ (mm)
C335-000U-MB	¥4,000	奥行約130×幅約550

●梱包数 12袋 (1袋30枚入り)
●重 量 約300g/袋 (10g/枚)
●材 質 ポリエステル90%、レーヨン10%
●JANコード 4903180410637



1 minute Buster + HPワンミニッツバスター

除菌洗浄液 4ℓ

品 番	税抜価格 (1本)	容量 (ℓ)
MO740-04LX-MB	¥5,000	約4

●成分 /第4級アンモニウム塩・界面活性剤・
pH調整剤・防錆剤・色素・エタノール
●液性 /弱アルカリ性 ●梱包数 /4本
●JANコード



4 903180 184828

使用方法

- 場合に応じて希釈し、ご使用ください。(原液では使用しない)
- 清掃作業時はゴム手袋を着用してください。原液希釈作業時、スプレー作業時はマスク及び保護メガネも着用してください。

50 倍 希釈 ■ 嘔吐物処理後の仕上げ除菌洗浄
希釈液を直接かけ 1 分間放置する。
必要に応じ、清潔な布、モップ等で拭き取る。

高度な 除菌洗浄 ■ ドアノブ、手すり等、良く触れる
環境表面の除菌洗浄
希釈液を布等につけ、汚れを拭き取り、濡れた状態で
1 分間放置する。スプレー使用する場合は、直接スプレーした
後布で拭き取るか、布にスプレーしてから拭き取る。

200 倍 希釈 ■ 治療室や手術室、フロア・トイレの床面、
壁面等あまり触れない場所の除菌洗浄
希釈液を直接かけるか、布、モップ等につけて汚れを取り、
濡れた状態で 1 分間放置する。壁面等、スプレー使用する
場合は、直接スプレーした後布で拭き取るか、布にスプレー
してから拭き取る。

*全ての箇を除菌または除去するわけではありません。

◎ 価格は、税抜き価格で表示しています。

CONDOR

Trust of the Quality

山崎産業株式会社

http://www.yamazaki-sangyo.co.jp

第二営業本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-10-12

TEL: (03)3432-3201 FAX: (03)3432-3203

商品に関するお問い合わせは
カスタマーサービスセンター (9:00～12:00 13:00～17:00 土日・祝日を除く)

0120-941-239 FAX (03)3432-3203

メールアドレス info2@yamazaki-sangyo.co.jp

●商品仕様及び価格は改良のため、予告なく変更することがあります。

●ご紹介する商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。
(内容は2018年3月現在のものです。)

ISO14001 認証取得

登録範囲 本社・製品開発本部・生産本部
栃木工業・伊丹工場・岡山工場

ISO9001 認証取得

登録範囲 栃木工業・伊丹工場・岡山工場



●お問い合わせは