



RAKUTES®

**ハバック腕置きクッション
取扱説明書**

ハバック腕置きクッション 取扱説明書



- ・この度は、ラクデス商品をお買い求めいただき、ありがとうございます。
- ・ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みになって、正しくお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

危険 ・本品に火気を近づけたり、寝タバコは絶対にしないで下さい。

警告 ・本品は姿勢保持具ですから、姿勢保持以外の用途でご使用にならないで下さい。

注意 ・「クッション」を鋭利なものでキズを付けると、中素材が、外に出てしまう恐れがあります。

中素材が出てしまった時は、ご使用をやめてください。

・中本体は、手洗いで洗うことが出来ますが、中綿が寄ってしまった場合は形を整えてください。

・ファスナーでお肌を傷つけないようにご注意ください。

・車椅子からのクッション転落防止の為、片ベルトにて固定できますが、車輪に挟まるなど、走行の際は、ご注意ください。



【製品概要】

本品は、ポジショニングクッションです。

- ・車椅子のサイズから人間工学に基づいた形状で、ひじから手の平までのせて腕の重さを支えることができます。
- ・座位姿勢をサポートすることで、筋緊張の緩和や拘縮・変形の予防活動の向上などに活躍しています。
- ・クッションの転落を防止する為、U字アームの片側に、ベルトを付けました。
- ・外カバーに特殊素材を組み合わせしており、体幹にフィットします。
- ・中本体は、取り出し易くセットしやすいよう二つに分かれています。外カバー、中本体共に洗濯できます。

〔洗い方〕

- ・外カバーを外して、外カバーと中本体をそれぞれ洗うことができます。

【外カバー】	・洗濯は、ネットに入れて40℃弱にてお願いします。 ・乾燥機は、生地の変縮の恐れがあるため、低温乾燥をお願いいたします。 ・アイロンあては、布を使用してください。  ネット使用
【中本体】	・【洗濯はネットに入れて弱く】、【脱水は弱く】にて、お願いします。 中素材の片寄りに注意してください。 ・洗濯後は、十分に乾燥しているか確認してからご使用ください。  ネット使用

〔仕様〕

品名	サイズ(cm)／重量	材質
ハバック 腕置きクッション	15×50×50 cm 650g	外カバー生地：綿 76%，ポ リウレタン 4%，ポ リエステル 20% 中材：ポ リエステル 100%

※ 中素材の入れ具合は、形状の自由を持たせる為ゆる目の仕様で、軽量設計です。

〔保管方法〕

- ・洗濯後は十分に乾燥してください。
- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

〔耐用年数〕

- ・使用頻度によって異なります。ご購入の販売店へお問合せ下さい。

〔製造販売〕

株式会社丸井商事／ラクデス ホームページ <https://www.rakudes.com/>

本社 〒424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町 4-18

TEL:054-366-1612 FAX:054-366-1738