


専用カバー

形状は、ファスナーを使わない、かぶせ式で全体をカバーします

両側かぶせ式 ポジクッション100、150、ポジクッション100T、180T



片側かぶせ式 ポジクッション60、おざぶ、ポジクッション18T、60T、おざぶT、80角T

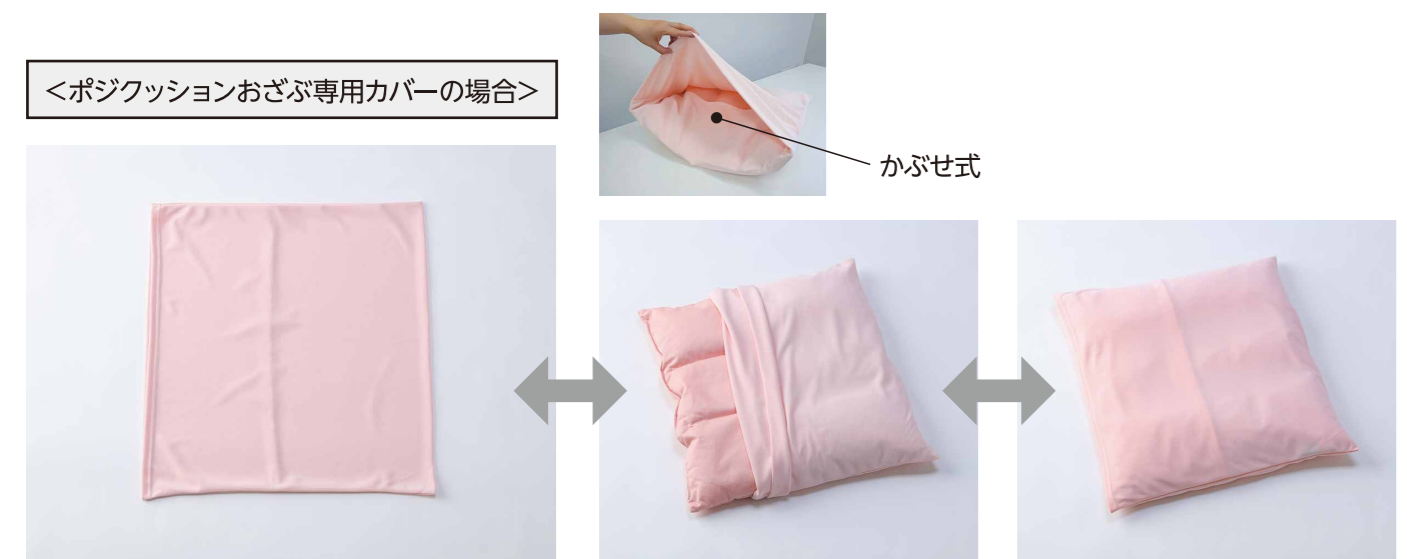

<生地の特長>

肌にふれた時、とてもなめらかでシルクよりさらに、やさしい感触です。ムレやベタつき感を抑え、「吸放湿性能」に優れ、さらに、静電気を素早く逃がします。ストレッチ生地でセッティングしやすく、中素材の流動性を損なわない「なじみの良さ」が特長です。



吸湿・放湿・吸汗・速乾・UV

本体に合わせたお色を準備しています。



〔監修〕 社会福祉法人 五十鈴会
介護老人福祉施設 五十鈴荘
〔技術協力〕 静岡県工業技術研究所
ファルマバレーセンター

製造販売元
株式会社丸井商事/ラクデス
〒424-0045静岡県静岡市清水区東大曲町4-18
TEL.054-366-1612 FAX.054-366-1738
ホームページ：https://www.rakudes.com/
日本製

ラクデス クッション 検索



ポジクッション®

やさしいポジショニング



株式会社丸井商事/ラクデス

RAKUCES (ラクデス)について


ラクデスとは、創業 昭和32年/株式会社丸井商事 製造メーカーの自社ブランドです。

現在もOEM(相手先ブランド製造)として、量販店様、百貨店様、卸会社様→小売店様へ納品させて頂いておりますが、この度、自社商品の展開を始めました。

素材、加工技術、睡眠環境、人間工学などの知見ノウハウを活かして商品作り致します。

ロゴは、地球の中に『人』と『品』を表し、人は、無重力状態のニュートラルな姿勢をイメージしています。健康、良い睡眠が取れることで、周囲にも幸せが広がります。

介護現場にも分かりやすい、やさしいポジショニング

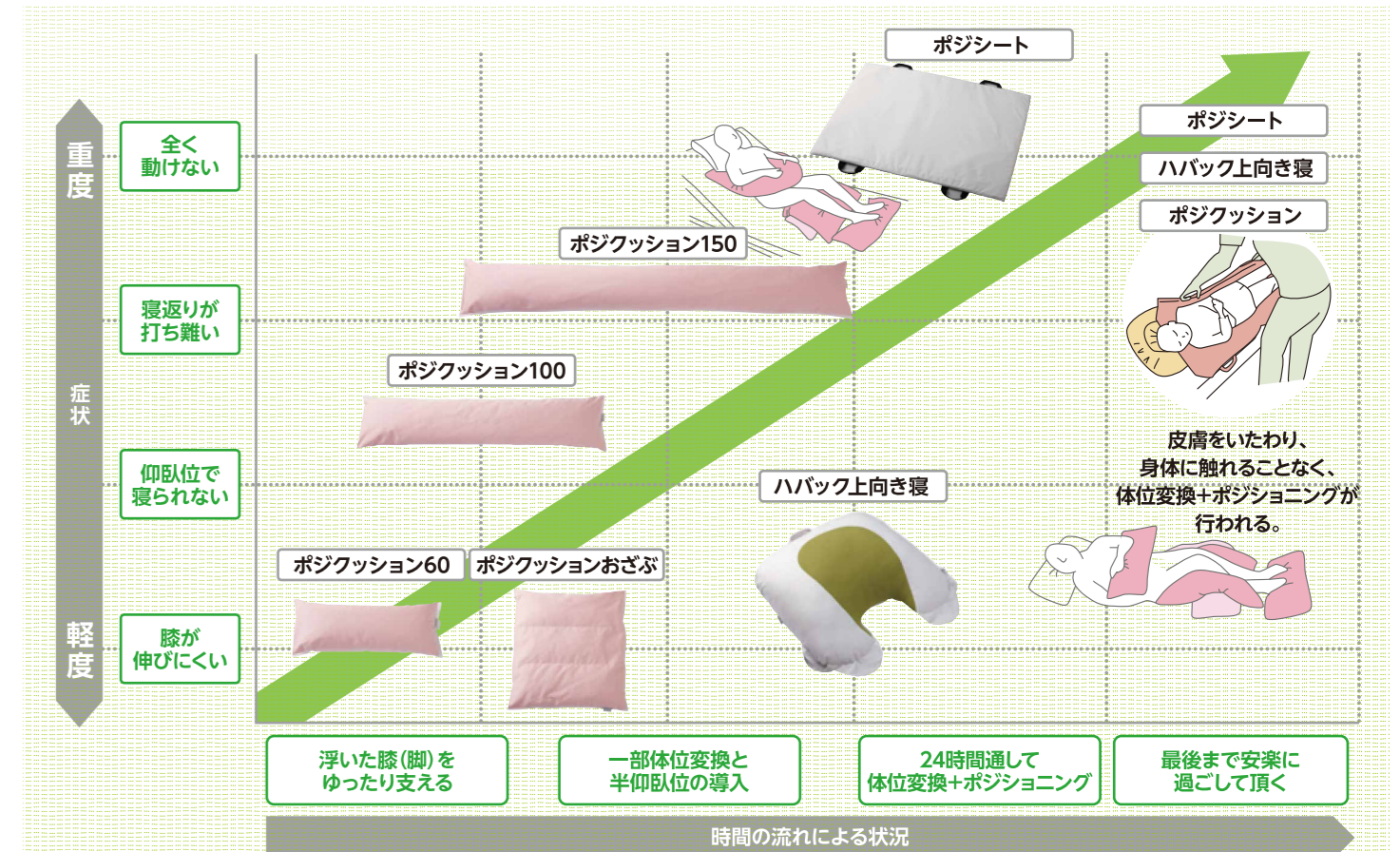

やすらぎと、楽しさと、健康のために、社会貢献をめざしています。

軽度の方からのご使用がオススメです
《クッション1ヶで姿勢が変わる》

特長

特長 1 「日本の高齢者」の体格に合わせた形状とサイズから
「現代の日本人 男女問わず適したサイズ」を2種類ラインアップ

※ 参考資料：日本人身長計測データ

特長 2 「中素材は、動いて押せば安定」 【特許登録 第5762727号】

流動性がありながら、押せば安定する。特殊開発素材「ナジーム」+ビーズ

細かくウレタンを特殊加工した【ナジーム】とビーズを混ぜ合わせることで、振れば自由に動き、押せば素材同士が絡み合い形状を安定させます。素材の変形量や弾力性を吟味して、心地よさを追求しました。

流動性と安定感を確保!

圧縮試験の結果【硬さ40% (N)】

反発が一番少ない事がわかります。これは馴染みが良く、フィット性に優れている証です。


圧縮試験の結果【最大荷重 (N)】

底付かず、適度な柔らかさを保ちます。ビーズ単体では硬すぎて縫製が裂けました。

※1 グラフは、静岡県工業技術研究所 平成25年度工技企第1-47号の数値により作成 一般フォームは自社測定
※2 ポジクッション・ピンク色タイプのデータ値です。グリーン色は、ピンク色のデータ触感に合わせて配合しています。


特長 3 「体圧が分散され、姿勢もよくなる」

身体をクッションで支えることで、拘縮・変形のある方でも安楽に休んでいただけます。

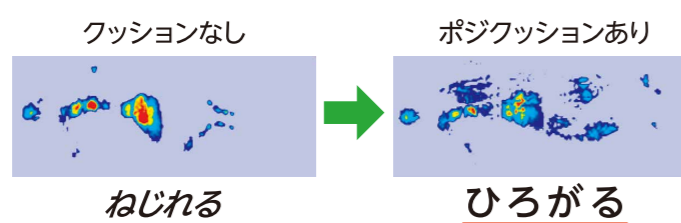

※ ポジクッション・ピンク色での測定値です。被験者：女性145cm、45kg

特長 4 「表生地は、ポジクッションに適した摩擦係数」

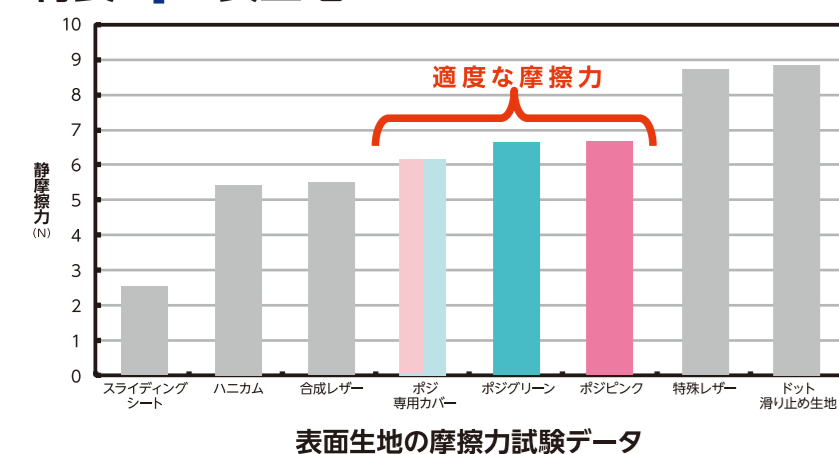

身体がのった際に、滑り過ぎず引っ掛かり過ぎない適度な摩擦係数で安定します。

商品ラインナップ

ピンク色


◎小柄な方向け ◎現場にわかりやすいポジショニング

グリーン色 (耐熱タイプ)

◎現代の日本人の体格をカバーできるサイズ展開


品名	サイズ	使用例
ポジクッション 60	24×60cm 	【人気ナンバー1の形状で、様々な部位にフィットします】 腕置き 膝下 足底 ※ 尖足予防
ポジクッション 100	24×100cm 	【ユーザー様からの圧倒的支持】 半側臥位 頸部～腰 腕置き 肩～指先まで
ポジクッション 150	24×150cm 	【一本のクッションを軸に体幹を整えます】 L字で使用 I字で使用 仙骨を浮かしてあげる 上肢
ポジクッション おざぶ	55×59cm 	【下肢のポジショニングに最適】 伸びにくい膝を安定させることで身体全体が安楽になる! おざぶ スリットの上に脚をのせる 坐骨手前～下肢

モデル身長 153cm

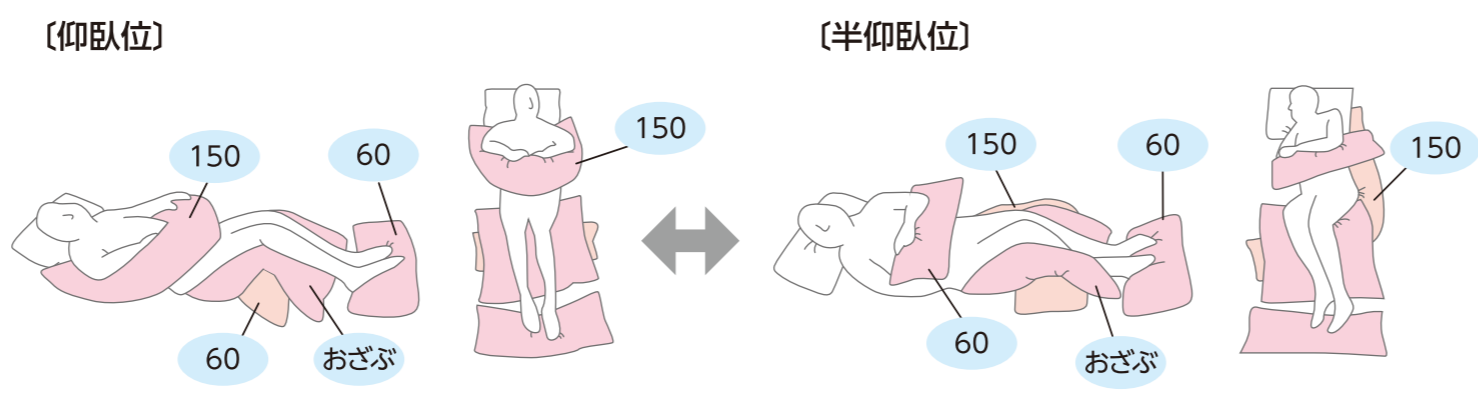

品名	サイズ	使用例
ポジクッション 18T	18×40cm 	【どんな腕の太さでも安定】 腕置き 車椅子の肘あて その他 ・クッションや枕のアンカー ・身体と車椅子やベッドの隙間埋め
ポジクッション 60T	24×60cm 	【人気ナンバー1の形状】 ポジクッション60 ピンク色(ご参考)
ポジクッション 100T	30×100cm 	【ふくよかな方も支えられます】 半側臥位 肩～腰 肩～指先まで
ポジクッション 180T	30×180cm 	【一本で体感を整えます】 中素材を均す 身体に中素材を合わせる リラックス
ポジクッション おざぶT	59×63cm 	【下肢のポジショニングに最適】 ポジクッションおざぶ ピンク色(ご参考)
ポジクッション 80角T	80×80cm 	【用途多様、大判サイズ】 高さ 約30cm 形状の変化 ゆったり下肢をのせる

モデル身長 169cm

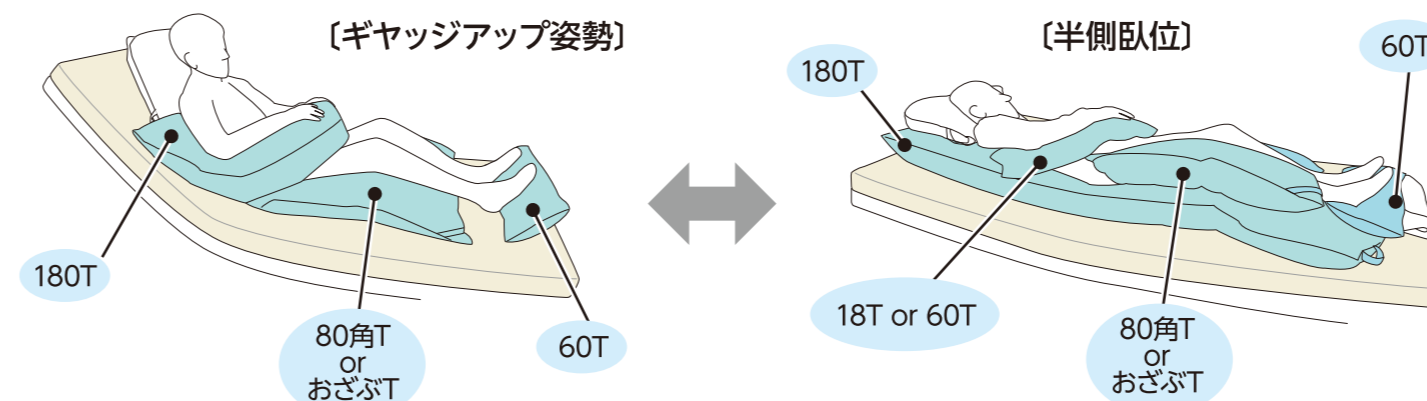

比較

比較 1 「サイズが少し異なります」



比較 2 「自宅でのお洗濯が可能!」

色	洗濯条件	乾燥条件
ピンク色	温水40℃以下、乾燥機は80℃まで対応	洗濯 40℃ 乾燥 80℃
グリーン色 (耐熱タイプ)	温水95℃以下、乾燥機は100℃以下、オートフープ105℃まで対応	洗濯 95℃ 乾燥 100℃

比較 3 「体位変換器として、ポジクッション100T、180T、おざぶT、80角Tが対象になっています」

