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




ポジクッション150



ポジクッション100

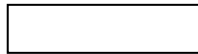

ポジクッション60

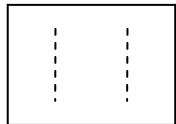

ポジクッションおざぶ

用途：姿勢保持器具

- ・この度は、ラクデス／ポジクッションをお買い求めいただき、ありがとうございます。
- ・ご使用になる前に、この「取扱説明書」をよくお読みになって、正しくお使いください。
- ・お読みになった後は、大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

危険

- ・本品に火気を近づけたり、寝タバコは絶対にしないで下さい。

警告

- ・本品は姿勢保持具ですから、姿勢保持以外の用途でご使用にならないで下さい。

注意

- ・「ポジクッション」を鋭利なものでキズを付けると、中素材が、外に出てしまう恐れがあります。
中素材が出てしまった時は、ご使用をやめてください。
- ・高温80℃以上の乾燥機は、避けてください。
- ・繰り返しの洗濯によって、表皮生地が縮み触感が変わる場合があります。
- ・アイロンは、使用しないでください。中素材の形状、触感が変わる恐れがあります。

- 〔洗い方〕
- ・本品は、ネットに入れて40℃までの温水で洗濯が可能です。
 - ・乾燥機は、80℃以下の低温乾燥をお願いいたします。
 - ・洗濯後は、十分に乾燥しているか確認してからご使用ください。

〔仕様〕

品名	サイズ (cm)	材質
ポジクッション150	24×150	表皮：綿・ポリプロピレン 中材：ウルトン・ビーズ
ポジクッション100	24×100	
ポジクッション60	24×60	
ポジクッションおざぶ	55×59	

〔耐用年数〕 使用頻度によって異なります。ご購入の販売店へお問合せ下さい。

〔製造販売〕 株式会社丸井商事／ラクデス ホームページ <http://www.rakudes.com/>

本社 〒424-0045 静岡県静岡市清水区東大曲町 4-18 TEL054-366-1612 FAX054-366-1738