
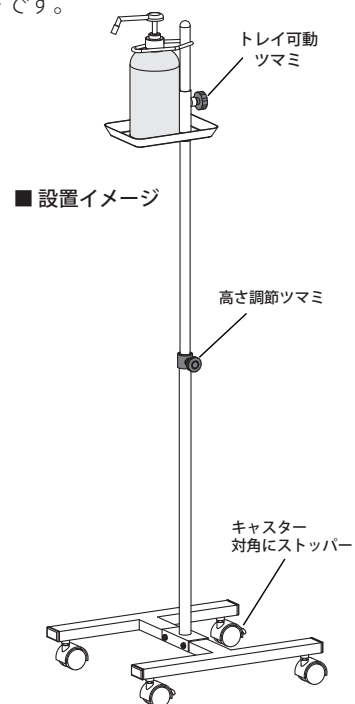


可動式消毒スタンド クリーンポール

組立説明書

この商品は、手指消毒剤や石けんボトルなどを設置するスタンドです。
消毒剤は市販品をご用意ください。

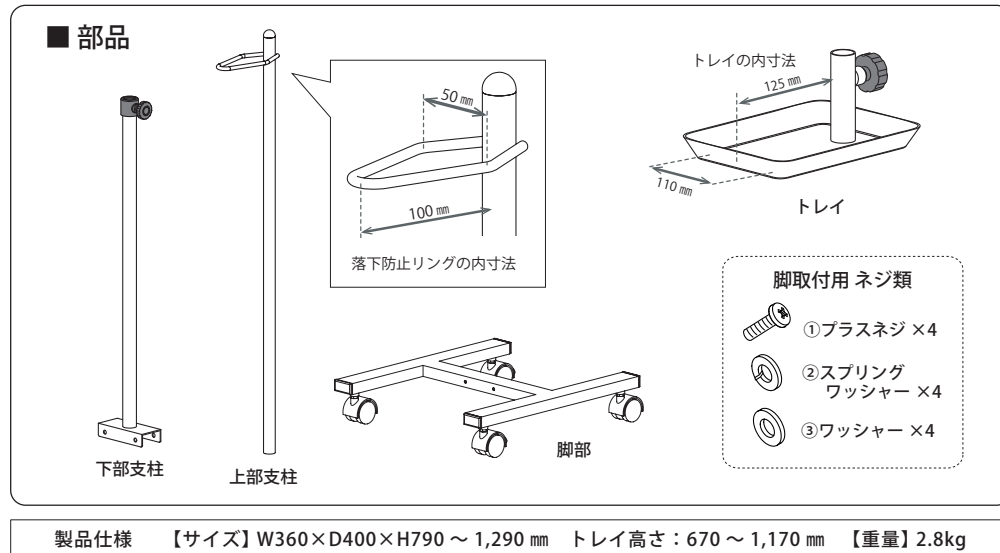


組立手順


❗ プラスドライバーをご用意ください。

1. 脚部と下部支柱を付属のネジ類で固定します。図のように、脚に下部支柱を穴が合うように組み合わせ、①～③のネジ類で4ヶ所固定します。

※ プラスドライバーを使用

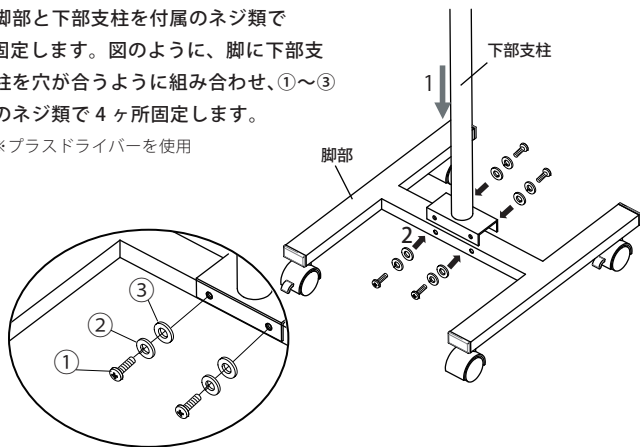


2. 上部支柱へ、トレイを図のように差し込みます。下部支柱の高さ調節ツマミを緩めて、上部支柱を下部支柱へ差し込みます。

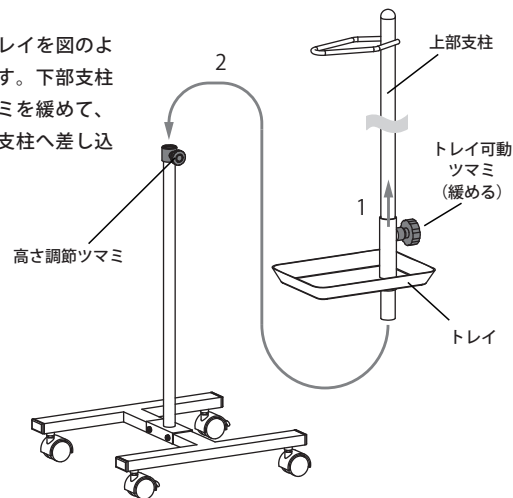


ボトルの設置方法

1. 落下防止リングの位置が、ボトルのポンプの高さになります。上部支柱をご希望の高さまで上げて、高さ調節ツマミでしっかりと固定します。

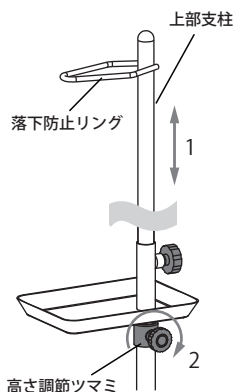

2. トレイにボトルを置きます。トレイをボトルごと上げて行き、落下防止リングの中にノズルを入れます。隙間がなくなるまでトレイを上げたら、トレイ可動ツマミでしっかりと固定します。

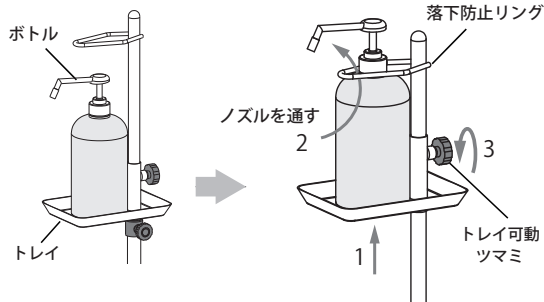

ボトル落下防止のため、高さ調節ツマミとトレイ可動ツマミは、きつく締め付けて固定してください。

3. キャスターのストッパーを利かせて設置完了です。

※ ボトルの高さを変えるには、高さ調節ツマミを緩めてトレイと一緒に上下させます。