

Recommendation from navis  
Arm blood pressure monitor

## バイタルナビシリーズに新登場！！



### 多彩な機能



見やすく  
大きな  
液晶表示



自動  
電源オフ



平均値表示



血圧値  
レベル表示



体動検知



メモリー機能  
60回×2人



暗い所でも  
安心の  
バックライト



電池残量  
お知らせ

 Vital Navi

バイタルナビ 上腕血圧計 NV-1585

毎日の健康管理に便利かつ  
大型液晶で視認性も向上！！

**ACアダプター標準装備！！**

(※単4乾電池4本でもご使用可能)



専用 AC アダプター

**管理**



Vital Navi

バイタル(血圧・心拍数等)の測定を行う際に  
使用する機器類のオリジナルブランドです

**navis**

管理医療機器

一般的名称: 自動電子血圧計


販売名: バイタルナビ上腕血圧計

医療機器認証番号: 301AKBZX00028000

## ※カフ装着時の注意、、、




使用例

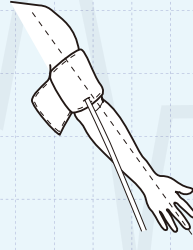

カフの面ファスナーをはがして筒状にし、左腕を通して肘から2~3cm上の部分に巻き付けます。その際カフのエアホース付近についている「Φマーク」が手のひらを上向きにした状態で中指の延長線上に位置するように調整してください。

※左腕での測定が困難な場合は、右腕で測定してください。

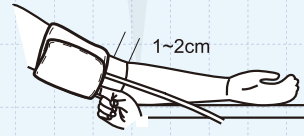

面ファスナーをとめて固定します。腕とカフの間に指が1~2本入る程度の隙間をあげ、腕に沿ってしっかり留めてください。

品番	型番	本体サイズ (mm)	重量 (g)	価格 (税別)
7-6817-01	NV-1585	154 x 106 x 57	約 282	¥7,200
7-6817-11	交換用カフ	適用腕周 : 22 ~ 32 cm		¥1,800
7-6817-12	専用 AC アダプター			¥1,500

※ -01 のみ管理医療機器です。

### 【商品画像】



### 【キャリングバッグ】



収納例

製造販売元：

**アズワン株式会社**

大阪市西区江戸堀2-1-27

製品に関するお問合せはカスタマー相談センター

**TEL : 0120-711-875**

受付時間：午前9時～午後5時30分

(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

### 【商品仕様】

項目	詳細
測定法	オシロメトリック法
測定範囲 (圧力)	0 ~ 299mmHg
測定範囲 (脈拍)	40 ~ 199 回 / 分
適応腕周範囲	約 22 ~ 32cm
記憶機能 (メモリー)	60 回 x 2
平均値	最新 3 回
電源	単 4 乾電池 4 本 (DC6V) AC アダプター 100V 50/60Hz
電池寿命	約 300 回
付属品	カフ、専用 AC アダプター、お試し用 単 4 乾電池 (4 本)、キャリングバッグ、 取扱説明書 (保証書付き)、添付文書

※ご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。

※仕様及び価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

**アズワン株式会社**

**navis**

大阪本社 東京オフィス 横浜支店 名古屋支店  
札幌営業所 仙台営業所 つくば営業所 大宮営業所  
西東京営業所 静岡営業所 京都営業所 沖縄営業所  
広島営業所 高松営業所 福岡営業所