

ニチバン

# サージフィット™



SURGIFIT™

## 術後早期の創管理に

優れた吸収・保水性

高い視認性

肌にやさしい

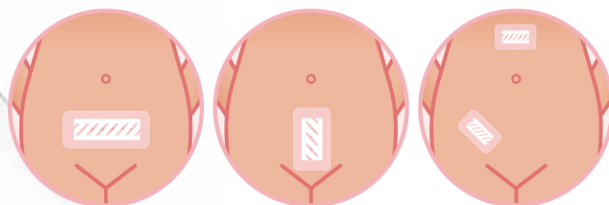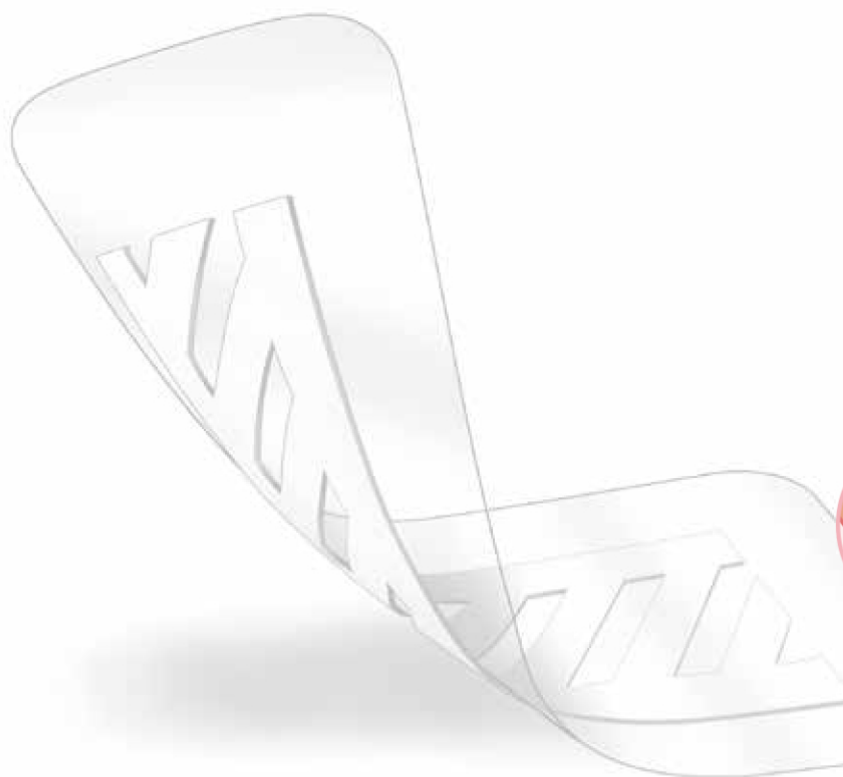


一般医療機器：手術用被覆・保護材(救急絆創膏)  
JMDNコード：34654000(34864000)  
医療機器届出番号:13B2X00218371801

### 規格

| 品番      | サイズ(mm) |        | 入数(個箱) | JANコード        |
|---------|---------|--------|--------|---------------|
|         | テープ     | パッド    |        |               |
| SRG0610 | 60×100  | 30×65  | 30枚    | 4987167091897 |
| SRG0915 | 90×150  | 50×100 | 20枚    | 4987167091903 |
| SRG0921 | 90×210  | 50×160 | 20枚    | 4987167091910 |

# 1 優れた吸収・保水性

▶ ガーゼ 10 枚以上の吸収量があり、吸収速度が速い（右図参照）ため、創部に血液・滲出液が溜まりにくい

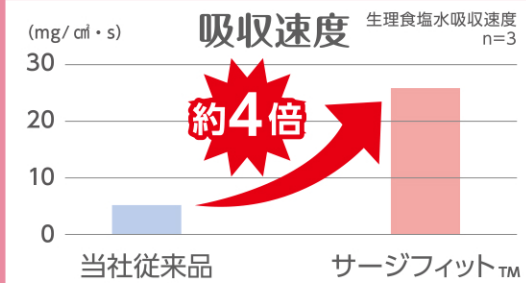


▶ 保水性が高いため、血液等の逆戻りが少ない

創部に適した環境に整える

# 2 高い視認性

▶ パッドに開孔部を設けているため、貼ったまま創部の観察が可能

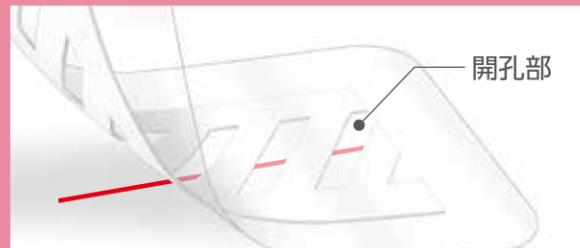


創部の変化を早期に発見できる


# 3 肌にやさしい

▶ 透湿性が高いため、ムレにくい

肌にやさしいウレタンジェル粘着剤を採用

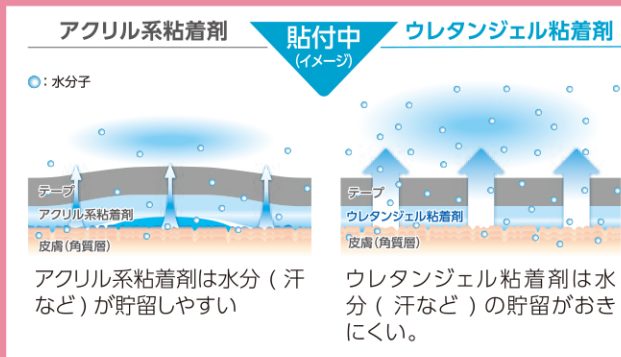


▶ 角質のはがれが少ないため、はく離刺激を軽減

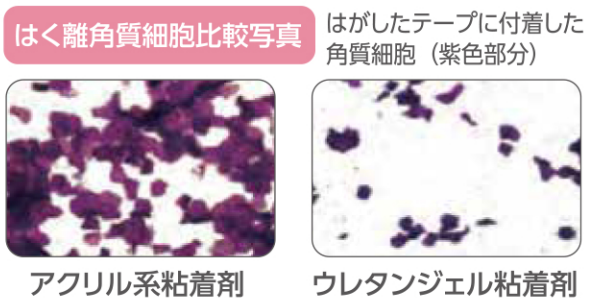

皮膚トラブルが起こりにくい

※掲載データ:すべて社内データであり、保証値ではありません。

## 使いやすさを追求

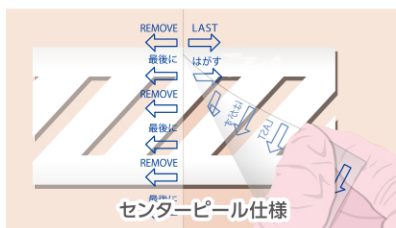

最後にはがすキャリアフィルムは、真ん中からはがせるセンターピール仕様

センターピール仕様だから使いやすい

### <使用上の注意>

重要な基本的注意  
感染創もしくは感染が疑われる部位には使用しないでください。

### <使用目的又は効果>

1. 手術用被覆・保護材用途  
術後創傷の被覆・保護に用いる。
2. 救急絆創膏用途  
傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持等に用いる。

TMIは商標です。

日本製  
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3  
ホームページ <http://www.nichiban.co.jp/>

SEN18NAGP