


シャワー椅子（ひじ掛け付き）

型番 NC355
品番 (7-7692-01)

取扱説明書 Instruction Manual

<各部の名称>

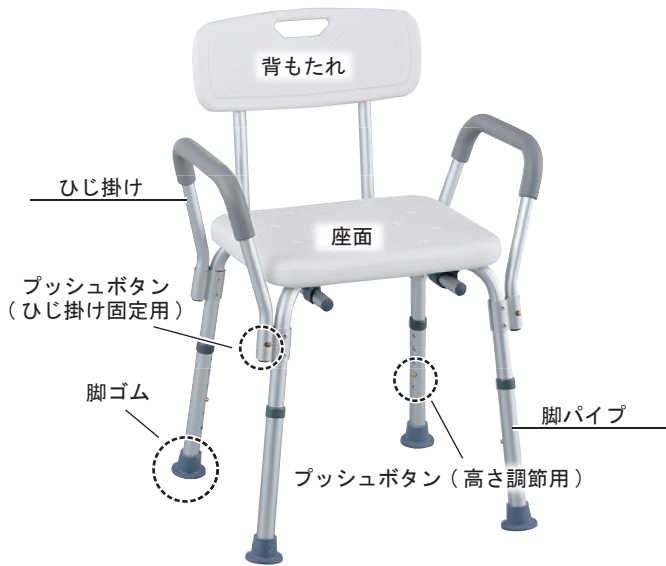

<製品仕様>

| | |
|----------------------|--|
| 品番 | 7-7692-01 |
| 型番 | NC355 |
| 座面高さ | 415 ~ 540mm (6段階調節、25mm 間隔) |
| 座面サイズ | 幅 405mm x 奥行 330mm |
| サイズ (幅 x 奥行 x 高さ) | 560mm x 490 ~ 530mm x 720 ~ 845mm |
| パイプ先端径 | 約φ28mm |
| 材質 | パイプ：アルミニウム、 座面：ポリエチレン、 背もたれ：ポリエチレン、 ひじ掛け：NBR フォーム |
| 耐荷重 ^{※1} | 約100kg |
| 重量 | 約3.2kg |

※1 耐荷重を超えてのご使用は避けてください。

製品の仕様は、改良・改善のために予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

<別売品>

| 品番 / 品名 | 仕様 |
|----------------------|-----------------------------------|
| 0-9847-21/ 交換用脚ゴム | 内径：約φ26.4mm、深さ：約28.3mm、 入り数：1個 |

品番、仕様は変更する場合があります。

本製品は湿気が多い浴室で使用する製品です。ご使用前の確認とご使用後のお手入れを実施いただきますようお願いいたします（2ページ参照）。

<製品について>

ひじ掛け・背もたれを取り外した状態でもご使用いただけるシャワー椅子です。座面高さはプッシュボタン式で容易に調節可能です（座面高さ6段階調節可能）。

安全上のご注意

製品のご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、製品を安全に正しくお使いください。誤った使い方に起因する危害や損害を防止するための重要な事項について記載しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように分けて説明しています。

⚠ 警告（死亡や重傷を負うおそれがある内容）

⚠ 注意（傷害を負ったり、物的損害が発生するおそれがある内容）

●本書は、次の図記号を用いて説明しています。

❗ 「必ず行うこと」

⊘ 「してはいけないこと」

⚠ 「注意すること」

このたびは、アズワン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

製品のご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。お読みになったあとは、お手元においてご使用ください。

製品の譲渡・貸与時は、この取扱説明書を本体の目立つところに添付して、製品と共にお引き渡しください。

警告

製品を安全に正しくお使いいただくために
必ず、お守りください

ご使用前、以下の項目を参考に各部の確認を行っていただきますようお願いいたします。万一、異常や不具合が認められた場合は絶対に使用しないでください。そのまま使用を続けると、製品破損による転倒など大きな事故につながる危険があります。

・脚パイプがプッシュボタンによって4本とも同じ高さで固定されていること。プッシュボタンが半掛かりでなく、「高さ調節穴」から完全に飛び出した状態であること、腐食などでプッシュボタンが破損していないことを確認してください。

➡ プッシュボタンで脚パイプがしっかり固定されていない場合、脚の長さが意図しないで短くなり、バランスを崩して転倒するおそれがあります。


・背もたれ、ひじ掛けがプッシュボタンによって固定されていること、プッシュボタンが錆などで腐食していないことを確認してください。

・パイプに座面を取り付けているネジ・金具などが緩んでいないこと、錆などで腐食していないことを確認してください。

・座面、背もたれ、ひじ掛けなどに著しいキズ、ヒビ、変形などが認められないことを確認してください。

・脚ゴムが脚パイプに固定されて容易に外れないこと、破れ、ヒビ割れ、著しい摩耗がないことを確認してください。

座面の裏側など普段見えない箇所を確認されるときは、床に柔らかいマットなどを敷き、傷つかないようにしてから、椅子を上下さかさまにしてご確認いただきますようお願いいたします。

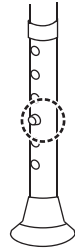

プッシュボタンが完全に飛び出し、腐食などで破損していないこと

ご使用後は以下のことに注意してお手入れ・保管を行ってください。

・使用後はシャワーで石鹸やシャンプーの泡を十分洗い流し、水気を拭き取り屋内で自然乾燥させてください。洗浄時は熱湯を掛けないでください。

・汚れが落ちにくい部分は、中性洗剤をぬるま湯で2～3%に薄め布に浸し、軽く絞ってから取り除いてください。除去後は必ず、中性洗剤を洗い流してください。

・お手入れの際は塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー・ベンジン・アルコール、クレゾール、タワシ（金属ブラシ）、研磨剤入りのスポンジ、クレンザー（磨き粉）を使用しないでください。

➡ 樹脂材料の劣化、破損の原因になります。

・塩素系消毒剤・硫黄系入浴剤、温泉水を掛けたり、掛からないようご注意ください。

➡ パイプ・ネジ・金属部分が腐食して破損する原因になります。

・屋外や直射日光があたる場所、暖房器具の近くなどを避けて保管してください。

ご使用者様のご自身の身体を十分に安定させることができない状態のときは、事故防止のため介助者が必ず、付き添って使用してください。

以下の使いかたは大変危険です。絶対にしないでください。

・座面に浅く座る、座面を踏み台にして立ち上がる

・脚ゴムが装着されていない状態で使用する

・座った状態で後方に大きくのけぞり、背もたれに過度な体重を掛ける

・背もたれ・座面端部を支えにして座ったり立ち上がる、手すり代わりに使用する（製品の一部だけに過度な体重を掛けない）

・座ったり立ったりするとき、ひじ掛けに体重を極端に掛ける

・ひじ掛けの片側のみに体重を掛ける

・使用者が座った状態で椅子を持ち上げたり、椅子を引きずる

⚠ 注意

製品を安全に正しくお使いいただくために
必ず、お守りください

| | |
|---|---|
| ❗ | ご使用に際してケアマネージャー、福祉用具専門相談員など福祉の専門家にご相談いただくことをお勧めします。 |
| ❗ | 椅子に座るときは均等に体重が加わるように座面の中央にゆっくり座ってください。 また、椅子から立ち上がる時もゆっくり立ってください。 |
| ❗ | 浴室の洗い場専用椅子です。他の用途で使用したり、浴槽内では使用しないでください。また、柔らかいマットやスノコの上など、シャワー椅子が安定しないところでの使用は避けてください。 |
| 🚫 | 本製品の改造や分解をしないでください。 ➡ 改造・分解が行われた場合は、保証の対象外となり、弊社は一切の責任を負いかねます。 |
| ⚠ | 耐荷重を超えてのご使用は避けてください。製品破損によってケガをするおそれがあります。 |
| ⚠ | 石鹸やシャンプーなどで座面や床と接触する部分が滑りやすくなります。転倒しないようご注意ください。 |
| ⚠ | 小さいお子様が触れたり、使用したりしないようご注意ください。 |
| ⚠ | 高さ調節の際は、可動部に手や指が挟まれないようご注意ください。 |

<組み立て>

組み立ての際は、前述の「各部の名称」と合わせてお読みください。

床に柔らかいマットなどを敷き、傷つかないようにしてから組み立てを行ってください。ケガをしないよう注意してください。


- ①開梱後、次のものが破損や変形なく同梱されていることを確認してください。

| 部材名 | 数量 |
|--------------------------------------|----|
| 座面・フレーム・脚パイプ (出荷時あらかじめ組み立てられています) | 1 |
| 背もたれ | 1 |
| ひじ掛け | 2 |

- ②背もたれを取り付けてください。

座面裏の取り付け穴(A)から(B)へ「背もたれパイプ」を差し込み、プッシュボタンで固定してください(背もたれの取り付け位置は2段階調整可能)。

注意 座面裏側△マークが前側です。背もたれを取り付ける方向に注意してください。

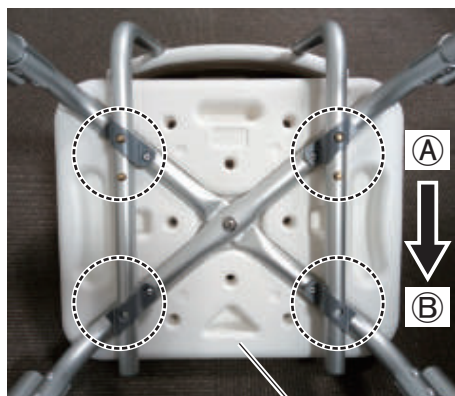

△マーク

- ③ひじ掛けを取り付けてください。


座面側面の差し込み穴(左右4箇所)にひじ掛けを差し込み、プッシュボタンで固定してください。

ひじ掛け差し込み穴(4箇所)



すべてのプッシュボタンが完全に飛び出していることを確認してください。

<座面の高さ調節方法>

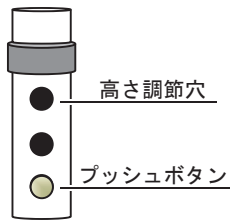

プッシュボタンを任意の調節穴から出します。プッシュボタンを出す穴を変えることで座面の高さを調節することができます。高さは6段階で調節可能です。

脚が4本とも同じ高さになるようにしてください。

すべてのプッシュボタンが高さ調節穴から完全に飛び出して、固定されていることを確認してください。

プッシュボタンが見えなくなったときは、脚パイプを一度抜き取ってボタンの位置を確認後、再度パイプを取り付けてください。

<脚ゴムの交換>

脚ゴムに著しい摩耗や劣化などが認められた場合は、使用を止め新しいゴムに交換してください。

脚ゴムは4個とも一度に交換してください。

交換手順

- ①脚パイプをしっかりと持ち、脚ゴムをねじりながら引っ張って取り外します。
- ②新しい脚ゴムを取り付けます。脚ゴムが固定されて容易に外れないことを確認してください。

<トラブルシューティング>

故障と判断する前に次の項目をご確認いただきますようお願いいたします。

組み立て後や脚ゴム交換後に脚がガタつく

対処①：脚ゴムが脚パイプにしっかりと、はめ込まれ固定されているかを確認してください。

対処②：脚ゴムの取り付け向きを変えてみて、ガタつきが改善されるかを確認してみてください。

<廃棄方法>

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や各地域の市町村が定める方法に従って廃棄してください。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の際は右記保証規定により修理いたします。

| | |
|--------|----------------|
| 品名 | シャワー椅子(ひじ掛け付き) |
| 型式 | NC355 |
| 機番 | |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お客様 | 様 |
| ご住所 | TEL: |
| 取り扱い店名 | 担当者印 |
| 住所 | TEL: |

アズワン株式会社

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品に関する最新の情報を弊社ホームページでご案内しています。

次の代表型番のQRコードからアクセスしてください。



(NC355)

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

●商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター
TEL 0120-711-875



スマートフォンから

問い合わせ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

●修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口
TEL 0120-788-535



スマートフォンから

問い合わせ専用URL <https://www.as-1.co.jp/faq/support/>
(E-mail) repair@so.as-1.co.jp

受付時間: 午前9時~12時、午後1時~5時30分
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

2024年3月 第2版
Made in China