

NAVISTELLI



COMPACT & REASONABLE

- シンプル操作で使いやすい
- 消費電力の少ないエコモード搭載(待機電力1.4W)
- 滅菌条件は121℃と135℃
- コンパクトサイズ

機械も、手のかかる子ほどかわいい

※注意点 毎回給水が必要です。また、乾燥工程時は扉を開きにして下さい。

ナビステリ

卓上型高圧蒸気滅菌器 TBD

337,000円^(税抜)


7-7918-01 送料 ¥6,000





【仕様】

幅×奥行×高さ(mm): 412×469×344
 重量(kg): 21
 缶内有効寸法: φ220×340mm
 収納力: 18cm丸カスト2個、または角カスト(NS-250-6) 1個
 貯水槽容量: 3.5L(滅菌約1回分の容量)
 乾燥方式: ヒーター加熱(ドア開け乾燥)
 滅菌温度: 121℃・135℃
 滅菌時間: 121℃/24~99分、135℃/7~99分
 乾燥時間: 0~99分(標準30分)
 安全装置: 安全弁・温度ヒューズ・空焚き防止温度ヒューズ・漏電ブレーカー
 対応規格: JIS規格(JIST7324:2005等)、EMC規格(JISC1806-1:2010)
 使用水: 水道水・蒸留水・精製水
 電源: AC100V 50/60Hz(電源コード長2.7m)
 消費電力: 950W
 付属品: スノコ、給水カップ
 医療機器認証番号: 227AGBZX00084A02

【外形寸法】

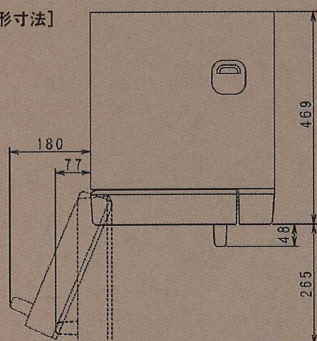

チャンバーサイズ:φ220×340mm

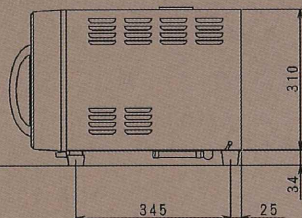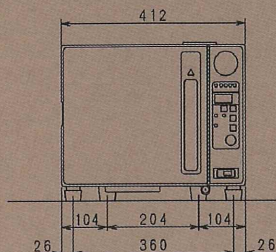

【被滅菌物収納の目安】

被滅菌物	収納物	重量・数量	動作モード
ガーゼ(カット品)	専用角カスト	150g	滅菌温度:135℃ 滅菌時間:7分 乾燥時間:30分
	18cm丸カスト×2	150g(丸カスト1個あたり)	
脱脂綿(カット品)	18cm丸カスト×2	50g(丸カスト1個あたり)	
滅菌バッグで 包装した器具類	専用トレイ×1	重ならない程度	
	専用金網バスケット		
器具類	専用角カスト	内容積の約20%	
注射器 (分解したもの)	専用トレイ	10ml×10本	滅菌温度:121℃ 滅菌時間:24分 乾燥時間:30分

商品の詳しい情報は検索サイト「AXEL」をご覧ください



商品名や品番で
簡単に検索できます

AXEL

<https://axel.as-1.co.jp>

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

navis