

寝たまま測る新しいスタイル

# トランスファーボードスケール MS7800 (検定付)

背の高い方も十分使用できる長さ

左右各5ヶ所の持ち手で  
引き寄せやすく！



使用例

- ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで  
寝たきりの患者様の体重測定が可能
- 移乗の際にも使用可能



操作部



- ワンタッチで簡単に使用できる体重計



- 測定部に身長目盛があり、  
おおよその身長も測定することが可能


- 測定だけでなく、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用が可能

〔移乗ボードとしての使い方〕


- ① シーツ等を準備し、対象者の下に敷きこみます。



- ④ 安定した移乗の為、移乗先との高さは平行、なおかつその距離は10cm以内としてください。

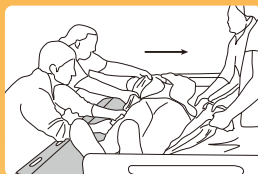

- ② 移乗する前、つかむシートを挟み込まないように対象者側に折り曲げてください。

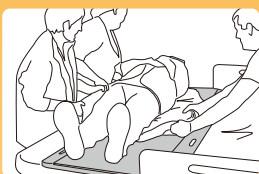

- ③ ベッドのキャスターは固定してください。(対象者はシートを敷いている状態であること)



トランスファーボードスケール MS7800 (検定付)

7-8380-01

642,000円(税抜)



〔仕様〕

サイズ(mm):1800×700×30

重量(kg):11 秤量:250kg 目量:500g

電源:充電バッテリー内蔵

HOLD機能付き

精度等級:4級

付属品:充電ケーブル(約0.8m)

※国家検定付き ※ご注文の際は使用地域をご指定ください。

商品の詳しい情報は検索サイト「AXEL」をご覧ください



商品名や品番で  
簡単に検索できます

AXEL

<https://axel.as-1.co.jp>

AS ONE アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

navis