


# 折りたたみ式簡易隔離ブース 組立手順書 (OKKB-1N)

---


## <各部の名称>

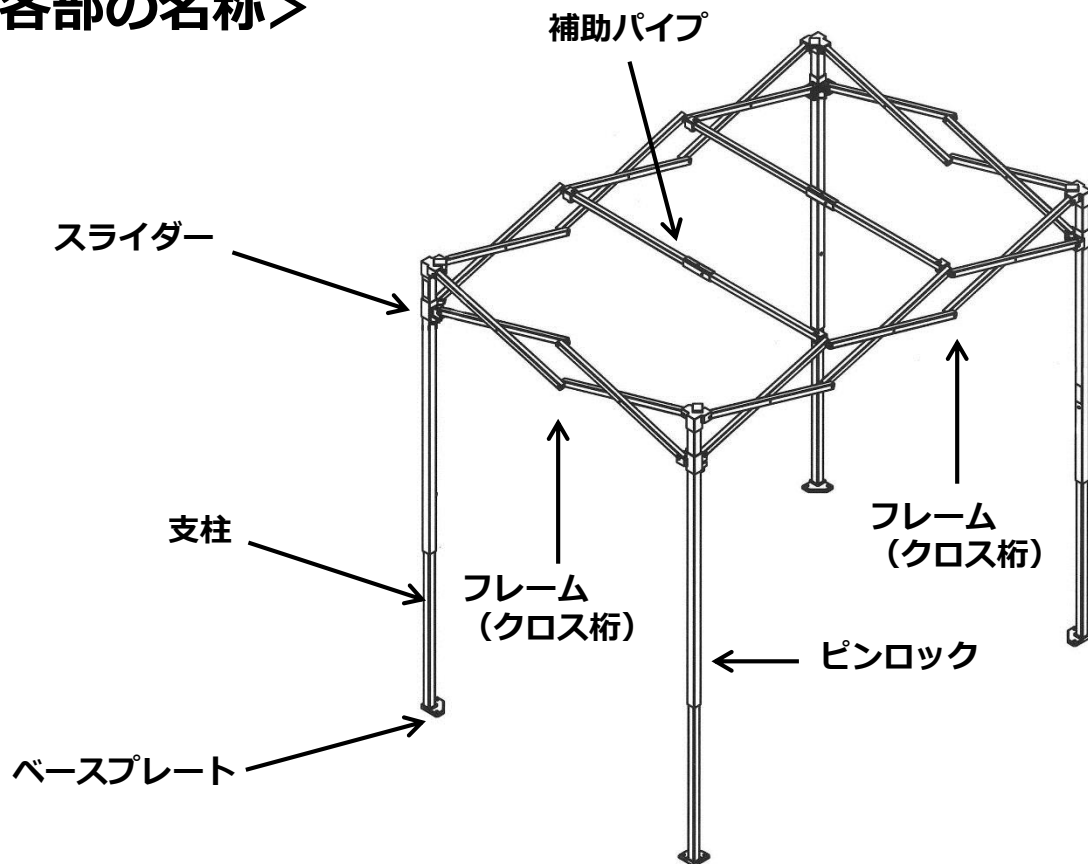

スライダー



ピンロック

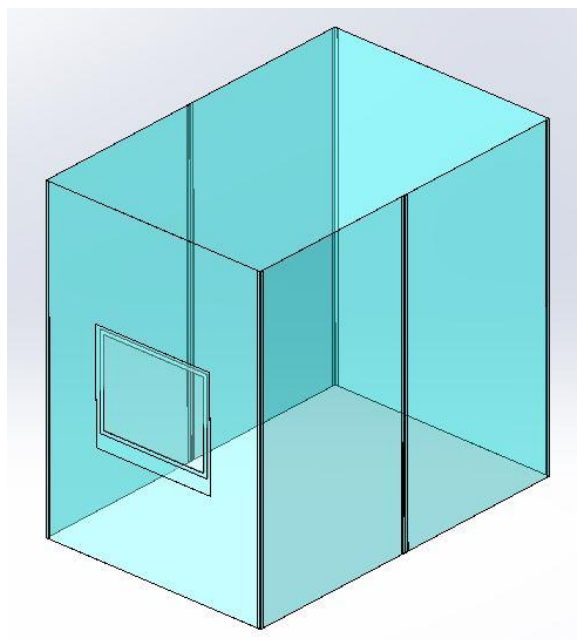


ビニールカーテン

## <組立手順>

(注意) フレームの展開・収納作業の際は手指を挟まないように注意して下さい。



- ①垂直に立てたフレームの支柱を持ち、ベースプレートを少し浮かせながら左右に広げていきます。
- ②クロスしたフレーム（クロス桁）の下側を押し上げながらさらに左右に広げて展開します。  
各支柱のスライダー部から「パチン」と音がしてロックが掛かるまで開ききって下さい。

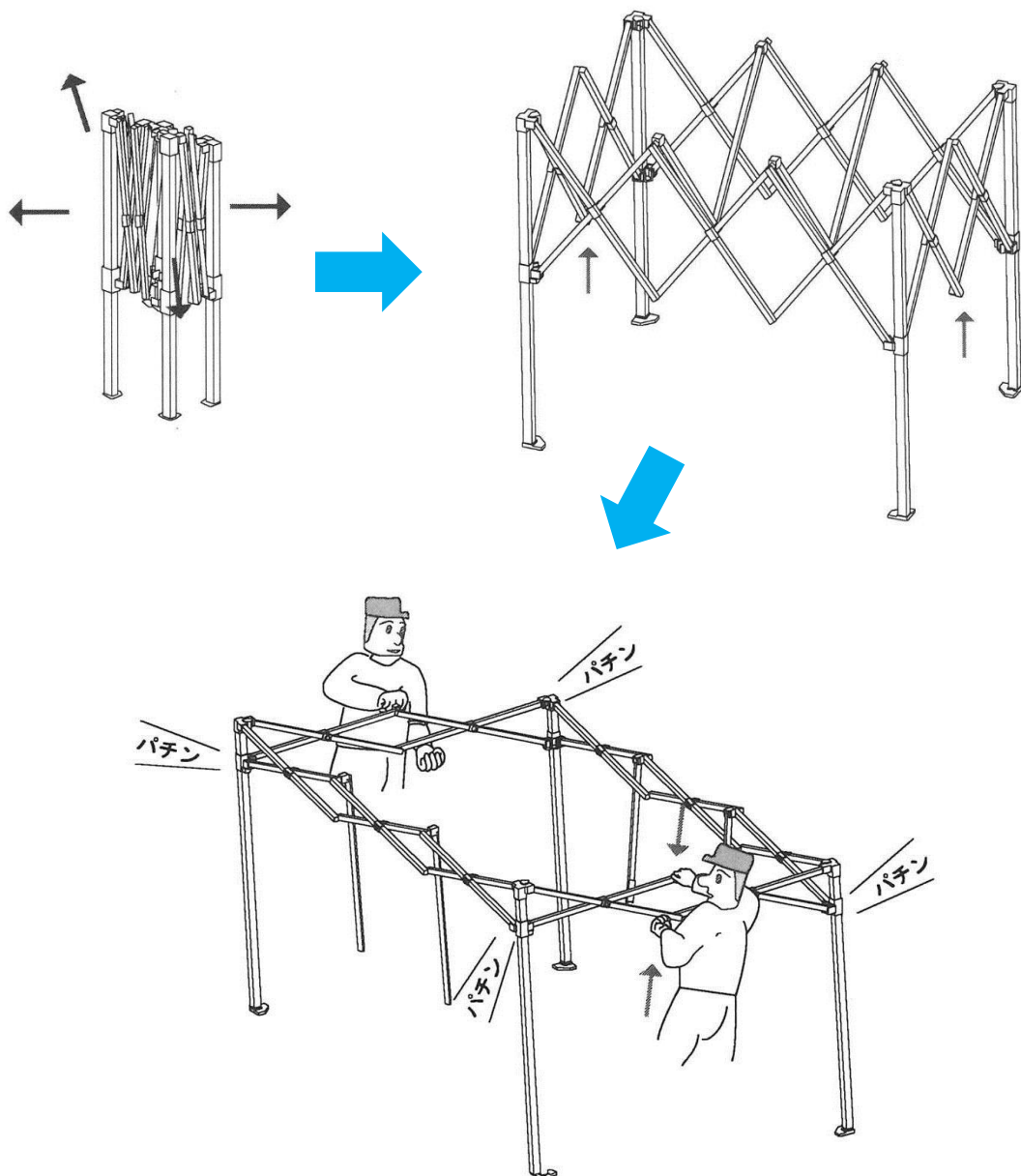

※すべての支柱にロックが掛かったことを必ず確認して下さい。




## <組立手順>

③左右の補助パイプを黒いカバーに差し込んで固定します。

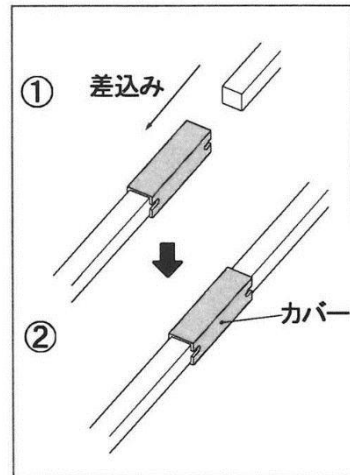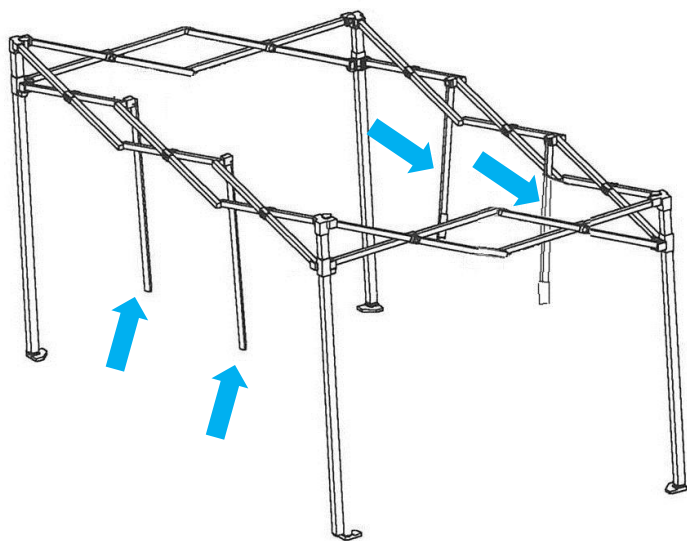

※補助パイプ（2カ所）はカバーにしっかり差し込んで下さい。


④ビニールカーテンをフレーム上部から被せます。

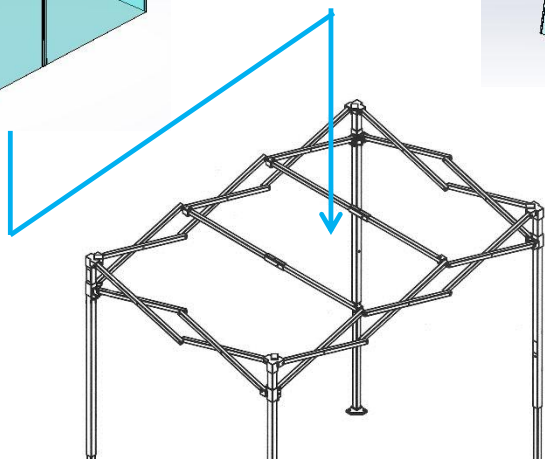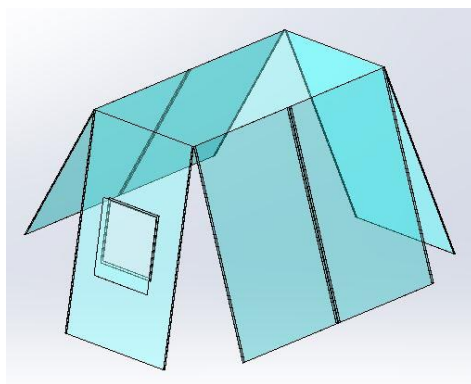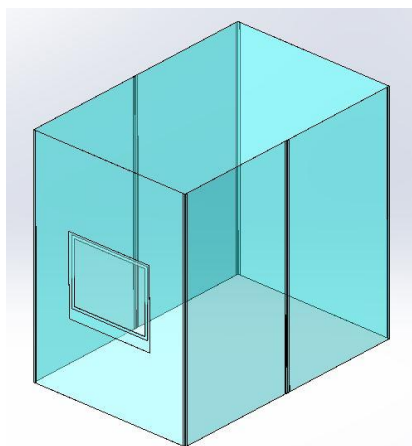

カーテンはボックス形状ですが、  
四隅のファスナーを開いてから  
被せることもできます。


## <組立手順>

- ⑤支柱のベースプレート足を足で押さえながら、支柱を上引き上げて伸ばします。  
各支柱のピンロックから「パチン」と音がしてロックが掛かるまで伸ばしきって下さい。

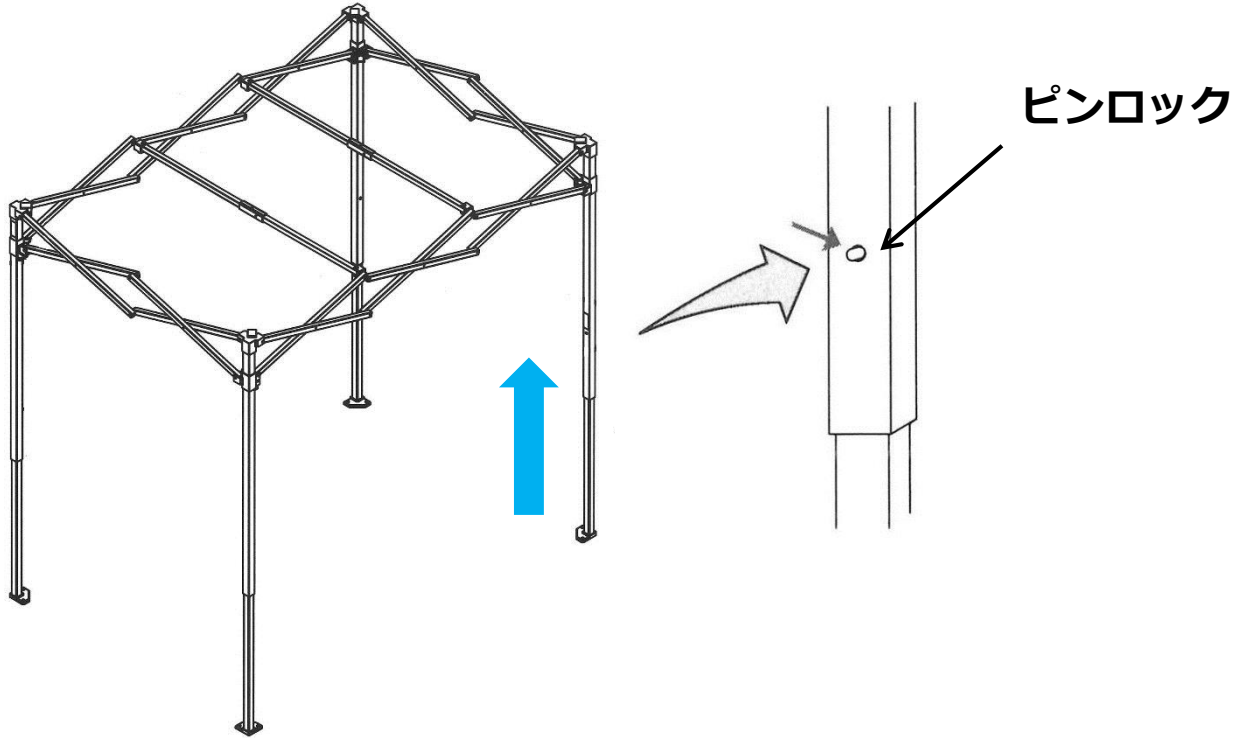

※すべての支柱にロックが掛かったことを必ず確認して下さい。


- ⑥ビニールカーテンの四隅にあるファスナーと、前後2面にある出入り用ファスナーを閉めて完成です。

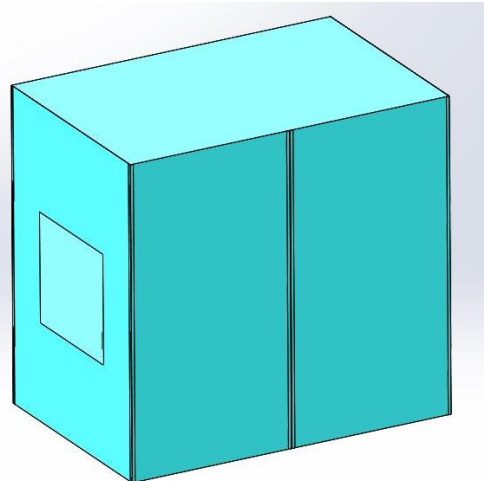

# <セーフティクリーンパーティションのセット>

全身陰圧フードを組み立てたら、セーフティクリーンパーティションをセットします。

- ①セーフティクリーンパーティションを陰圧フードの外側に仮置きします。
- ②ビニールカーテン短辺の開口部と、セーフティクリーンパーティションの前面パンチング枠の位置を合わせます。
- ③ビニールカーテン開口部のラバーマグネットをセーフティクリーンパーティションのパネルに当てて、カーテンと密着させます。

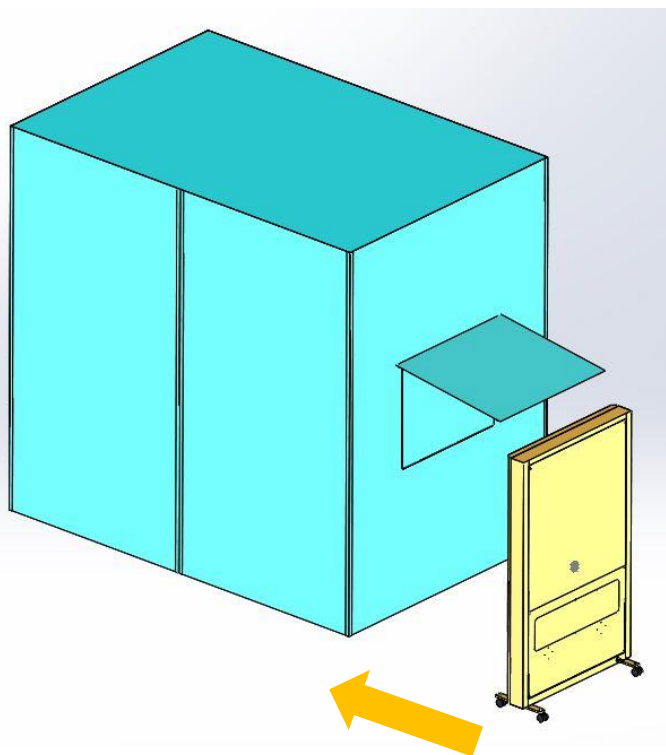

開口部のラバーマグネット



開口部を合わせる



塞ぎカバーは背面に垂らす



## <解体手順>

### (注意)


支柱のロックを解除すると製品の自重で下がります。  
スライダーのロックを解除しても同様に自重で下がったり、フレームを縮めるにつれてパンタグラフ状に閉じるため、手指を挟まないように注意して下さい。

- ① ビニールカーテンの四隅にあるファスナーを開けて支柱を持ちます。
- ② 支柱のピンロックボタンを押し込んでロックを解除し、高さを下げます。

※ロックが解除されると陰圧フード全体が自重で下がります。  
手指等を挟まないように注意して下さい。

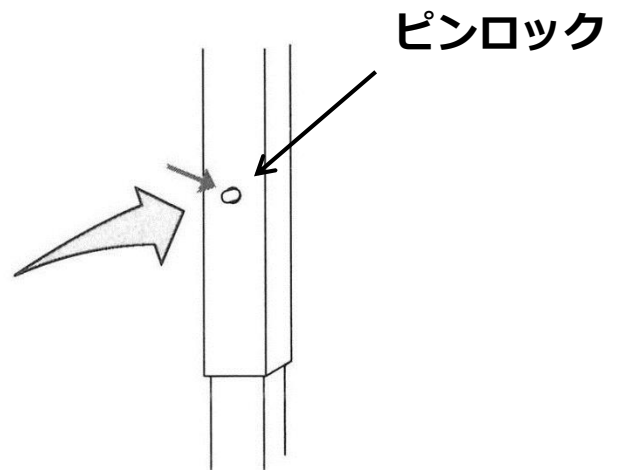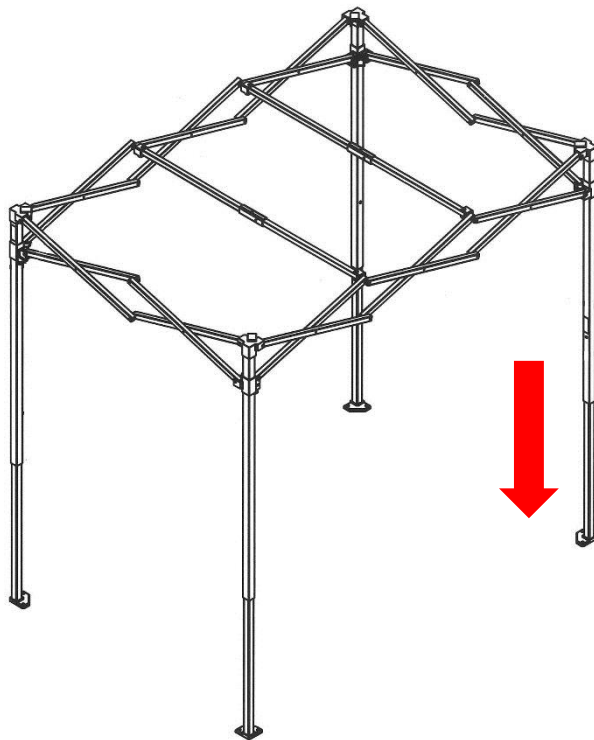

- ③ ビニールカーテンをフレームから取り外します。
- ④ 補助パイプを分解します（中央のカバーからフレームパイプを引き抜きます）。

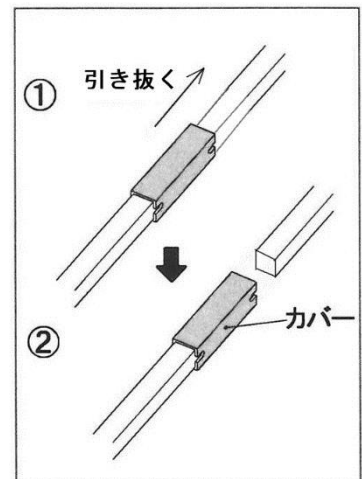


## <解体手順>

- ⑤支柱のスライダー部にあるリングを引っ張ってロックを解除します。
- ⑥支柱を持ち、ベースプレートを少し浮かせながら支柱を寄せて縮めます。

※ロックが解除されるとフレームが自重で下がります。  
また、フレームを縮めるにつれてスライダーやフレームが移動するので、  
手指等を挟まないように注意して下さい。

※すべての支柱のロックが解除されないと折りたたむことができません。

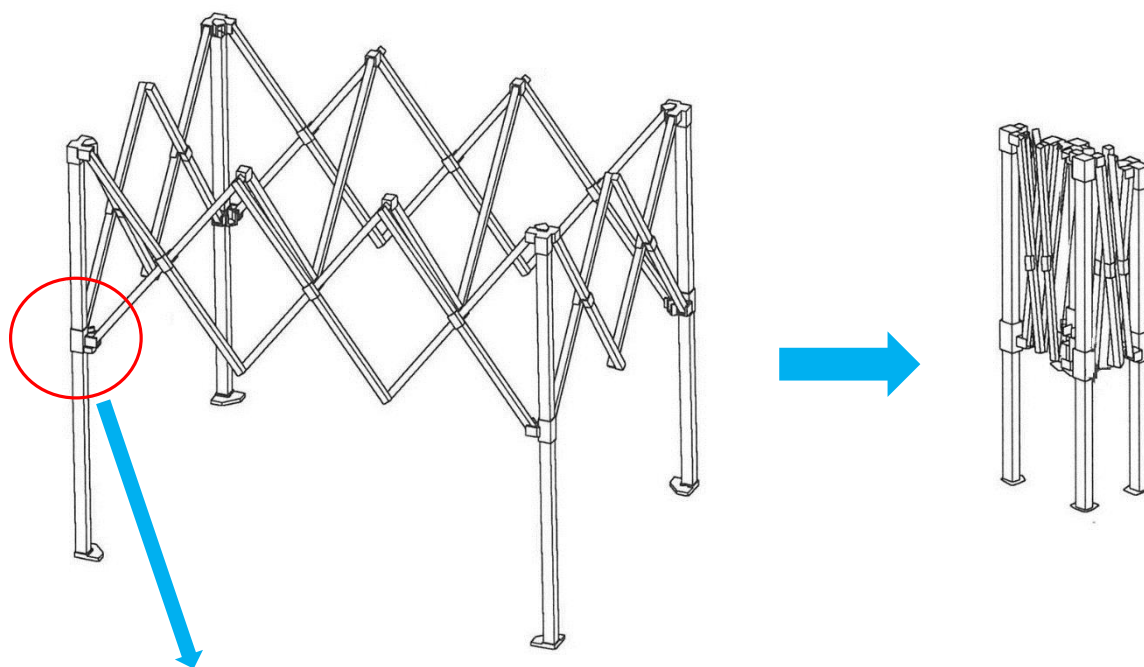

リングを引っ張って  
ロック解除