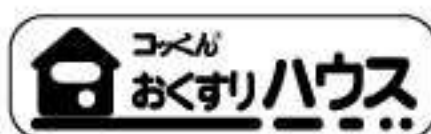


見守り機能搭載 **Wi-Fi接続****自動服薬支援機**

Wi-Fi みまもり機能 セットアップガイド

目次

- | | |
|------------------------|-----|
| 1. 準備作業 | (1) |
| 2. Wi-Fi 接続作業 | |
| ① スマートフォン (iPhone) の場合 | (2) |
| (Android) の場合 | (3) |
| ② パソコンの場合 | (4) |
| 3. 機器設定画面への入力 | (6) |
| 4. 確定作業 | (7) |

ご使用まえに (Wi-Fi 設定)

本製品を Wi-Fi に接続するには、無線で通信できる接続環境が必要です。
Wi-Fi に接続することにより、設定した服薬時間に本機からお薬ケースを取り出すと、登録したメールアドレスに服薬情報を送信することができ、離れた場所から見守りができます。

1. 準備作業

1. 付属のACアダプターをコンセントに差し込む。



ACアダプター (付属品)

2. 本体背面の電池カバーを外し、電池ボックス内の中央にある基板のMODEボタンを押しながらACアダプターの電源コネクタを差し込む。



MODEボタン



電源コネクタ

※ 電源コネクタの差し込みは、向きを合わせて無理な力を入れずに行ってください。

ツメ部が上



3. statusランプが点滅したらMODEボタンを離す。



statusランプ



点滅

2.Wi-Fi 接続作業

① スマートフォン

iphone の場合

1. 「設定」アイコンをタップする。



2. 設定を開いたら「Wi-Fi」をタップする。



3. 「Wi-Fi」をONにして、「kokkun-00000」を選択する。



4. パスワードを入力して「接続」をタップする。

パスワード : kokkunokusuri

※インターネットは未接続です。



5. ウェブ検索画面 (Safari) を開き、「192.168.4.1」を検索する。



注意 : 「Safari」 以外は検索できません。



「Safari」のこの検索窓に入力する

- 機器設定画面が開く。
「3. 機器設定への入力」を行ってください。

2.Wi-Fi 接続作業

① スマートフォン

Android の場合

1. 「設定」アイコンをタップする。



2. 設定を開いたら「Wi-Fi」または「ネットワークとインターネット」をタップする。



3. Wi-Fi が OFF になっている場合はボタンを「ON」に切り替える。



4. 表示された「kokkun-00000」を選択する。



5. パスワードを入力して「接続」をタップする。

パスワード：kokkunokusuri

※インターネットは未接続です。



① スマートフォンの機種や設定によっては、以下の画面が表示される場合があります。その場合は、次の手順に従って操作してください。



① ここを
タップする



② 「はい」を
タップする

6. ウェブ検索画面に、「192.168.4.1」を入力する。



機器設定画面が開く。

「3. 機器設定への入力」を行ってください。

2.Wi-Fi 接続作業

② パソコンの場合

1. デスクトップ右下の通知領域に表示されている『ネットワーク』アイコンをクリックする。

Windows10 Ver.1903 以降



Windows10 Ver.1809 以前



2. 表示された利用できる Wi-Fi の「kokkun-00000」をクリックする。



3. ネットワークセキュリティに「kokkunokusuri」を入力して【次へ】ボタンを押す。

※次回からの接続は入力不要です。



4. ブラウザを開きアドレスバーに「192.168.4.1」を入力し【Enter】キーを押す。

※検索窓に入力しないこと！



- 機器設定画面が開く。
「3. 機器設定への入力」を行ってください。

※ IPアドレスを固定に設定してあると「機器設定画面」が開きません。
次ページの「IPアドレスを自動的に取得する手順」に従って、設定の変更をしてください。

IPアドレスを自動に取得する手順

1. デスクトップ画面左下の「スタートボタン」を右クリックし表示されるメニューで「ネットワーク接続」を選択する。




2. 「アダプターのオプションを変更する」を選択する。

ネットワークの詳細設定

アダプターのオプションを変更する
ネットワークアダプターを表示して接続設定を変更します。

ネットワークと共有センター
接続先ネットワークについて、共有するものを指定します。

3. 「Wi-Fi」を右クリックして、「プロパティ」を選択する。

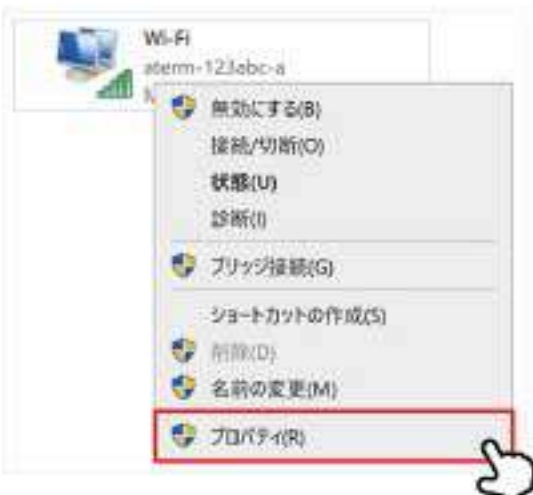

4. 「インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)」を選択し【プロパティ】を押す。



5. 「IPアドレスを自動に取得する」を選択して「OK」ボタンを押す。



3. 機器設定画面への入力

1. 機器設定画面に必要事項を入力する。

機器設定

ネットワーク

SSID: ①
パスワード: ②

デバイス

デバイス ID:
デバイス名: ③
通知トリガ:
トリガ確定時間: 秒

通知先メール

メールアドレス (To):
メールアドレス (Cc): ④
メールアドレス (Cc):

- 入力内容
- ① SSID: 「おくすりハウス」をご使用になるご自宅などの Wi-Fi の SSID (ネットワーク名) を入力
 - ② パスワード: 接続する Wi-Fi のパスワード (暗号化キー) を入力
 - ③ デバイス名: 患者さんのお名前などを入力
※ 出荷時は製品のシリアル番号になっています。
※ 「デバイス ID」、「通知トリガ」および「トリガ確定時間」は変更しないでください。
 - ④ 通知先メール: 送信先のメールアドレスを 3 件まで入力できます。

2. 入力が終わったら「設定する」をタップする。



3. 「設定確認画面」が表示される。

機器設定

ネットワーク

SSID: abc123
パスワード: *****

デバイス

デバイス ID: 00001
デバイス名: 宮坂太郎
通知トリガ: ON
トリガ確定時間: 10

通知先メール

メールアドレス (To): mskcg@po7.lcv.ne.jp
メールアドレス (Cc):
メールアドレス (Cc):

4. 確定作業

1. 電源コネクタを抜く。「status ランプ」消灯



※電源コネクタの抜き差しは、向きを合わせて無理な力を入れずに行ってください。

ツメ部が上



2. 再度、電源コネクタを差し込み、「status ランプ」が点灯したら設定完了。



※「status ランプ」が点灯しない場合は、
3. 機器設定画面の SSID またはパスワードの入力が違っている可能性があります。もう一度やり直してください。

3. もう一度、電源コネクタを抜いて、電池カバーを取り付ける。
電源コネクタを差し込めば、服薬時間にお薬ケースを取り出すと登録したメールに送信される。



【製造・販売元】

株式会社 **ミヤサカ工業**

〒391-0012 長野県茅野市金沢5568-1
TEL 0266-79-7115 (代) FAX 0266-79-5597

本製品に関する取扱方法などのご相談や、販売店に修理、メンテナンスのご相談ができない場合



0120-383-509

【受付時間】午前9時～午後5時 土日除く