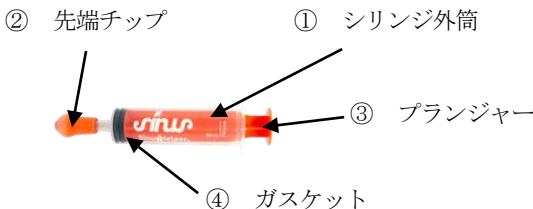


2023年12月(初版)

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 手動式生体用洗浄器 34630000
サイナスヘルパー

【禁忌・禁止】

- 手術後の方はご使用前に主治医にご相談ください。脳の手術において鼻からの手術操作があった場合、使用できないことがあります。
- 鼻の炎症(鼻詰まり等)がひどい、または耳に疾患がある方は、医師にご相談の上ご使用ください。
- 家族を含め他者と共有しないで下さい。個人使用に限ります。
- 小さな部品が含まれるため、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。誤飲の危険があります。
- 使用中や使用後に異常を感じた場合は、ご使用を中止してください。
- 消毒液や漂白剤等の薬液に晒さないでください。

【形状・構造および原理】

注入器と先端チップで構成されている。先端チップで鼻孔を塞いでプランジャーをゆっくり押すことによって鼻腔に食塩水が注入され、反対の鼻孔から食塩水と共に分泌物などが流れ出る構造である。

容量：60ml

寸法：長さ 185 mm×幅 48 mm (公差±5%)

重さ：37 g (公差±5%)

〈原材料〉

- 先端チップ：シリコーン
- シリンジ外筒：ポリプロピレン(PP)
- プランジャー：ポリプロピレン(PP)
- ガスケット：合成ゴム(IR；イソプロピレンゴム)

【使用目的または効果】

本品は、鼻腔へ液体を手動で噴出する装置である。対側鼻腔から液体と共に異物を洗い流すことで衛生状態の維持又は治療の一環として用いるものである。

【使用方法等】

- 250ml のぬるま湯に食塩水用精製塩 1 包 (2.5g) を溶かします。
- 注入器で食塩水を吸い上げます。
- 洗面台・洗面器などの上で、どちらかの鼻孔を完全に塞ぐように本品の先端チップを鼻にあてて「アー」と発声しながら、ゆっくりと食塩水を注入してください。

食塩水は鼻腔を満たし、分泌物とともに反対側の鼻孔へ流れ出ます。食塩水が喉を下ってしたたる場合もありますが、有害ではありません。

- 洗浄後は鼻をかんで鼻腔内の洗浄物を排出してください。
- 反対の鼻孔から同様の操作を行います。
- ティッシュ等で鼻から余分な食塩水を取り除いてください。食塩水が鼻にとどまり、数時間後に排出される場合があります。予防するために洗浄後すぐに頭を前に傾け、左右に振り、十分に食塩水を鼻から出してください。

【使用上の注意】

- お子様は保護者の指導の下でご使用ください。鼻を十分にかめるお子様にはご使用いただけません。
- 食塩水を作る場合は水道水か精製水をお使いください。やむなく井戸水を使用する場合は、煮沸してお使い下さい。濁りが酷い場合は使用しないでください。
- 温泉水や海水は使用しないでください。海水には、藻類や異物が含まれている可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない清潔な場所で保管してください。
- プランジャーはシリンジ外筒に収めた状態で保管してください。プランジャーを抜いたまま保管するとガスケットが膨張し、摺動性に影響する恐れがあります。
- 使用頻度により異なりますが、通常は4ヶ月から6ヶ月毎の交換を推奨します。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**〈製造販売業者〉**

株式会社エントリージャパン
神奈川県横浜市中区錦町9-3

〈製造業者〉

設計：
Netop Industrial Company Limited (中国)
主たる組立/最終製品保管：
ディエスヴィ・ソリューションズ株式会社 (日本)

取扱説明書を必ずご参照ください