

# 3M™ サージカルクリッパー（可動ヘッドタイプ）

## 3M™ Surgical Clipper with a Pivoting Head

# 使用方法



### Changing Blades 替刃の着脱



**取り付け方**  
ブレードのパッケージの裏紙を剥がして、45度の角度で押し込む。



**取り外し方**  
45度の角度にクリッパーを持ちながら、使用済みブレードを破棄容器へ押し出す。

※交差感染を防ぐため、患者様ごとに新しいブレードを使用してください。



**9660**  
3M™ サージカルクリッパー  
可動ヘッドタイプ用 ブレード（替刃）

### Clipping クリッピング



体毛の生えている方向に逆らって、少しずつ除毛する。

### Cleaning 使用後のお手入れ

#### 流水洗い



クリッパー本体のヘッド部分を温水などで洗い流す。よく拭いてクリッパー本体を乾かす。

#### 清拭



クリッパーのスイッチを“OFF”にして刃を取り外す。消毒用ワイブまたは水・消毒剤を少量含浸した布で拭く。

（清拭時に使用可能な消毒剤は、70% イソプロピルアルコール、5000ppm 除菌漂白剤液、第四級アンモニウム塩製剤、3% 過酸化水素水です。）

### Charging 充電

約4時間の充電で約160分間使用できます。

初めて使用する前には4時間充電してください。

- 充電中：橙色に点滅
- 充電完了：緑色に点灯
- 使用中：緑色に点灯

※インジケータライトが緑色の点灯から橙色の点滅に変わったら、残りの使用時間は約10分です。充電して下さい。



専用充電器