

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全に、また良好な状態でご使用いただくために『取扱説明書』をお読みになって、正しくお使いください。

『取扱説明書』をお読みになった後は、お使いになられる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。また、製品を譲渡されたり、貸与される時には新しく使用者となられる方が安全で正しい使い方を知るために『取扱説明書』を製品本体の目立つところに添付してください。

## 特長

本製品は、傷病者を運搬する際の担架として設計されています。

2つに折りたたみ、場所を取らずに保管が出来ます。


YDC-1A1はキャスターがついており、1人でも運搬が可能です。

YDC-1A4Hは担架面がアルミ製ですので、汚れた時には容易に清拭できます。


付属の固定ベルトで傷病者を安全に固定し、運搬できます。

## 外観・各部名称

展開時

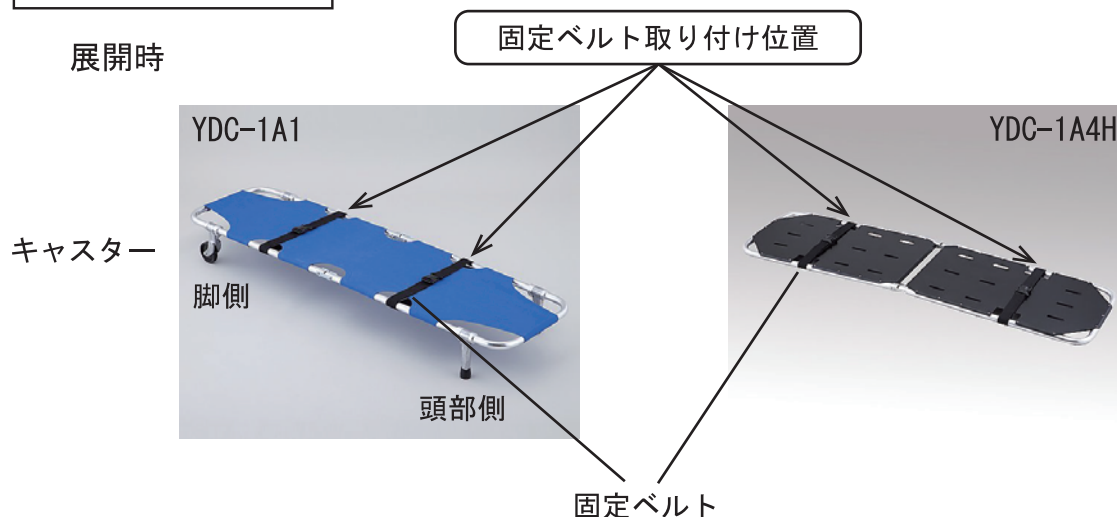

折りたたみ時

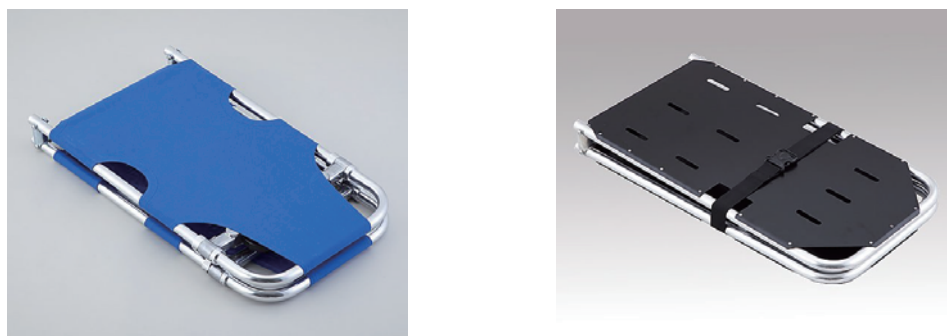

## ご使用上の注意

- 本製品はけが人や病人を運搬するために使用する運搬具です。本来の目的以外に使用しないでください。
- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。安全性が低下し、事故の原因となります。
- 固定ベルトや各部に緩みやがたつきがない事を確認してください。緩みやがたつきがあった場合、違和感を感じた場合には使用を中止してください。
- フレームの展開、キャスターの伸展時に、可動部に手を挟まないよう注意してください。
- 運搬時は必ず付属の固定ベルトを使用し、傷病者をしっかり固定してください。
- 傷病者を運搬する際には、必ず2名以上で運搬してください。（YDC-1A4H）
- YDC-1A1はキャスターを使用して1人でも運搬することが可能です。運搬する際には傷病者に恐怖や危険を与えるような角度で運搬しないよう、十分に注意してください。また、運搬する際はゆっくりと運搬してください。
- 担架の上で立ち上がらないでください。転落事故の原因となります。
- 運搬中、片側を高く上げたりしないでください。けがや転落事故の原因となります。
- 本製品を火気に近づけないでください。火災や火傷などの原因となります。

## ご使用方法

### ●ご使用の前に

- ①【ご使用上の注意】を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- ②ご使用前に、次の確認を行ってください。
  - ・各部の破損、フレームのゆがみや、ボルトなどの部品の脱落はないか。
  - ・付属品は揃っているか。

※万が一異常があった場合は、すぐにお買い求めの販売店へご連絡ください。

### ●固定ベルト取り付け方法

- ①バックルの表裏とバックルのオス側・メス側を確認します。凹凸のある面が表になります。
- ②ベルトがねじれないように注意しながら、ベルトの先端をバックル（オス側）の先端側のスリットへ、下から上に差し込んでください。
- ③ベルトの先端部をバックル（オス側）の末端側に上から下に、差し込んでベルトの先端を引いてください。

①



メス側 オス側

②



③



- ④バックル（オス側）を取り付けたベルトを裏側が上になるように持ち、ベルトの輪側を固定ベルト取り付け位置にある担架本体の穴に通します。この時、YDC-1A1は頭部側、脚側にそれぞれ頭部側のベルト、脚側のベルトがくるように取り付けてください。
- ⑤バックル（オス側）をベルトの輪の中に通し、引っ張って固定します。
- ⑥反対側も④⑤と同様に、バックル（メス側）がついているベルトを担架本体に固定します。
- ⑦同様に、もう1箇所の固定ベルト取り付け位置にも2本のベルトをそれぞれ通し、固定します。

## ご使用方法

### ●傷病者の運搬方法

- ①傷病者を担架の上に寝かせます。※傷病者を寝かせる際は、必ず専門知識を持った人（医師や救急隊）の指示に従ってください。
- ②固定ベルトの長さを傷病者に合わせて調節し、体の上でバックルを差し込みます。
- ③ベルトを締めて傷病者をしっかり固定してください。
- ④慎重に担架を持ち上げ、運搬してください。

### ●収納方法

ご使用後は二つ折りに折りたたんで、収納することができます。

【外観・各部名称】の折りたたみ時の様に、折りたたんで固定ベルトで止めて保管してください。

## 定期点検について

- 定期的に以下の項目を確認し、安全点検を行ってください。
  - ・各連結部のピン、ボルト、ナットの緩みや脱落がないか。
  - ・シートのキズ、破損がないか。
  - ・車輪の破損や摩擦による極度のすり減りがないか。（YDC-1A1）
  - ・フレームにゆがみがないか。

## 製品仕様

商品名		折りたたみ担架	
品番		8-2252-01	8-2252-12
型番		YDC-1A1	YDC-1A4H
材質		本体／アルミニウム合金、シート／ビニールレザー（YDC-1A1） 固定ベルト／ナイロン、バックル／POM	
サイズ	使用時	W1850×D520×H230 mm	W1850×D500×H50 mm
	折りたたみ時	W930×D520×H100 mm	W930×D500×H70 mm
	キャスター	φ100 mm（可倒式）	なし
重量		5kg	7kg
耐荷重		約160kg	
付属品		バックル式固定ベルト／メス側×2本・オス側×2本 （使用時調節長さ：約520～800 mm、幅：48 mm）	

※本仕様は性能向上のため、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

# 保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に下記保証規定（1）に基づく正常な使用状態での故障の節は下記保証規定により修理いたします。

品名	折りたたみ担架
型式	YDC-1A1, YDC-1A4H
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買上日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL.
取扱店名	担当者印
住所	TEL.

**アズワン株式会社**

## <保証規定>

- （1）弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- （2）次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
  - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
  - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
  - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
  - ・車両・船舶等での使用による故障。
  - ・消耗部品、付属部品の交換。
  - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- （3）ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- （4）本保証書は日本国内においてのみ有効です。

商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL. 0120-711-875

問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間 午前9時～午後5時30分

土・日・祝日及び弊社休業日はご利用できません。

Made in China  
2022年6月 第4版