


YOSHIDA



安心をいつでもどこでも。

わずか1.4kgの軽さ
2つ折りのコンパクトさ
3ステップで簡単な装着

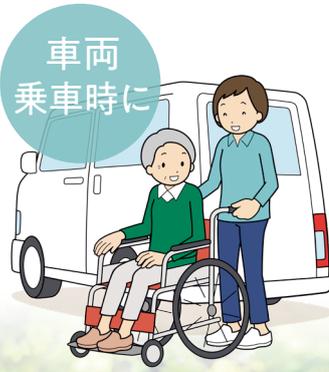

今お使いの車いすを簡単に“ハイバック”タイプにアップグレードできる姿勢保持具

サポタくん



枕位置を調整できる



頭部や背中をしっかりとサポート

サポタくんBSで頭部や背中がしっかりとサポートされ、姿勢の安定感が高まります。また、介助者の介助姿勢の負担が軽減されます。訪問歯科診療の現場の声から生まれた、歯科医療機器メーカー・吉田製作所によるサポートグッズです。

※車いすへの装着イメージ

サポタくん BS

安心を考えた設計



● **守る!**
幅広枕で、頭部と首を優しく守ります。
少々身体が傾いても、頭から枕が外れません。

● **支える!**
2本のベルトで背板を車いすへしっかり固定。
ずれることなく頭部や背中をしっかりサポートします。

使いやすさへのこだわり

● **通気性が良く軽いメッシュ素材**
計算されたたわみを持たせ、フィット感を追求しました。
汚れたら外して洗えます。

3ステップで簡単装着



背板を展開して
ロックする



背板を差し込んで
ベルトを留める



枕を装着し
上下位置を合わせる

- サイズ (幅×厚さ×高さ)
背板 (使用時) : 360×42×750mm
(折りたたみ時) : 360×48×450mm
- 枕 : 295×90×190mm
- 専用2Wayバッグ : 420×90×500mm
- 重量 : 約1.4kg (背板・枕計)
- 主材料 背板 : アルミニウム、ナイロン
- 枕 : 合成皮革、ポリウレタン
- セット内容 : 背板・枕・専用2Wayバッグ各1
- 価格 : オープン
- TAISコード : 02032-000001



一般的な車いす (JIS標準品) に
取り付け可能

持ち運びやすい工夫



折りたためば
A3+αサイズの
コンパクト設計



専用2Way
バッグ付き



1.4kg
(背板・枕計)

■内容は予告なく変更される場合があります。

無断転載禁止

