


“アンシルク®プロJ” 専用 補助スリッパ

- ・弾力性ストッキング“アンシルク・プロJ”を着用される方やその介助をされる方の負担を軽減し、より快適にストッキングをお使いいただきたくご用意しました。
- ・本品をご使用いただくと、ストッキングがスムーズに足首付近まで入ることにより、着用が楽になります。


使用上の注意

- ・本品は“アンシルク・プロJ”着用時の補助品としてのみご使用ください。
- ・ご使用の際は裏面の「スリッパの使い方」を良くお読みください。
- ・本品をはいたまま歩くのはおやめください。
- ・本品はポリエステルを樹脂加工しています。これらの素材に過敏症のある方はご使用にならないでください。また、本品使用により皮膚炎等の不具合が現れた場合は、速やかに使用を中止し医師にご相談ください。
- ・汚れが気になる場合は軽く水洗いをし、陰干しをしてください。洗濯機やアイロン等のご使用はお避けください。


スリッパの使い方

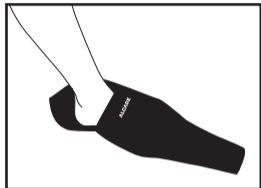

① 白いロゴマークの入っている面を上、つま先がスリッパ内側の先端に当たるくらいまで足を入れます。下の長い面はかかとまでくるようにしてください。

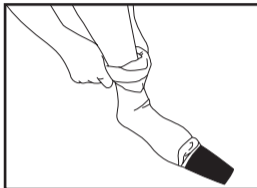

② スリッパの上からストッキングをはきます。その際、ストッキングは足首付近のスムーズに入るところまで結構です。その際かかと部分を合わせるようにはいてください。

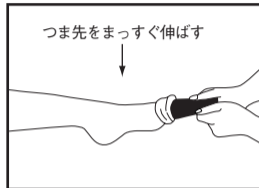

③ ストッキングの、足の裏側にあるモニターホール部分から、つま先を出すようにし、そこからスリッパの先端を引き抜きます。※つま先をまっすぐ伸ばすとより引き抜きやすくなります。

※スリッパを脱いだ後に、ストッキングをしっかりと引き上げてください。
ストッキングの使用方法は、アンシルク・プロJの取扱説明書を参照ください。

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
お客様相談室 ☎ 0120-770175