

キャストシュー・WP

Castshoe-WP

歩行用キャストカバー(防水)

Walking Cast Cover

はじめに

《キャストシュー・WP》は、足関節などに巻いたキャスト材を保護し、屋内または屋外での歩行による汚れを防ぐ製品です。強い衝撃を吸収するための製品ではありません。

ご使用にあたっては、必ず医師にご相談のうえ正しくお使いください。

また安全にご使用いただくため用途以外の使用はせず、この取扱説明書に従いご使用ください。

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書をお手元に置き、必要に応じてお読みください。

製品概観図



種類と規格

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		足長(目安)	全長(内寸)	
LL	17731	26.5~29.5cm	32.0cm	1コ
L	17732	24.5~26.5cm	28.0cm	1コ
M	17733	22.5~24.5cm	26.0cm	1コ
S	17734	20.5~22.5cm	24.0cm	1コ

※サイズは、規格の「足長」を目安とし、ご自分の足のサイズに合わせてお選びください。

※2つのサイズにまたがる場合には、大きいサイズをお選びください。

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

(土・日・祝日を除く、午前9:00~午後5:30)

www.alcare.co.jp

使用上のご注意

*[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。

⚠ 警告 人身事故につながるおそれのある注意事項

- 本品の使用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。
- 本品は単回使用製品です。1名に使用した本品は再使用しないでください。
- 使用中、または使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 本体にたるみがないように装着してください。
- 本品が破損・変形したり、著しく汚れた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本体に面ファスナーがしっかりとまっていること、また本体が抜け落ちないことを確認してからご使用ください。
- 面ファスナーが長すぎる場合には、適切な長さにカットしてご使用ください。
- 雨天時における屋外での使用や濡れた床での使用は、滑りやすく転倒するおそれがありますのでご注意ください。
- 適切なサイズをお選びのうえご使用ください。サイズが合っていない場合、転倒などのおそれがありますのでご注意ください。
- 固定材の種類、手技、足関節の肢位によっては本品を装着できない場合があります。医師に相談されるか、装着をお試しのうえでご購入ください。

注意 物損事故につながるおそれのある注意事項

- 本品が水や汗などで濡れた場合は布で拭き取るか、よく乾かしてからご使用ください。
- 本品を濡れたまま放置すると、変形や縮みの原因となります。水に濡れた後は、拭き取るか、十分に乾かしてください。
- 本体には撥水・防水加工を施した生地を使用しておりますが、多量の水で濡れてしまう場合や、生地の表面に水が染み込む場合があります。また、水中での使用に耐えるものではありません。ご使用の際は十分にご注意ください。
- キャスト材が十分に硬化してからご使用ください。
- 面ファスナーを着衣にひっかけないようにご注意ください。

組成・成分表示

- ナイロン、ポリウレタン、EVA、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリプロピレン

保管上のご注意

- 水濡れに注意し、直射日光および高温・多湿を避けて、室温保管してください。

取扱方法

- 30°C以下の水で中性洗剤を布などに染みませ汚れを拭き取ってください。
- 漂白剤、洗濯機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯後は陰干してください。

廃棄方法

- 上記組成・成分に関する各自治体の判別方法に従ってください。

ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 ☎130-0013

TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp