

嘔吐物処理や汚染された環境表面の洗浄・除菌に。 次亜塩素酸ナトリウム配合

医療・介護向け





泡で出るタイプの除菌洗浄剤

- 次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透。しっかり除菌※します。
有効塩素濃度1000ppm以上(製造時)。
※すべての菌を除菌するわけではありません。
- 泡で出るので飛散しません。
- 希釈不要なので緊急時にもすぐに使えます。

*ふきんやスポンジの除菌・漂白・消臭には、つけおきタイプの「病院用ハイター」をおすすめします。
*じゅうたん、色柄物にはお使いいただけません。脱色する恐れがあります。
じゅうたん、色柄物の除菌には粉末酸素系漂白剤の「キッチンワイドハイター 業務用」をお使いください。

血液汚れ、油汚れもしっかり落とす!

次亜塩素酸ナトリウムを0.5%(5000ppm)にうすめた液と比較して、優れた洗浄性能を発揮します。

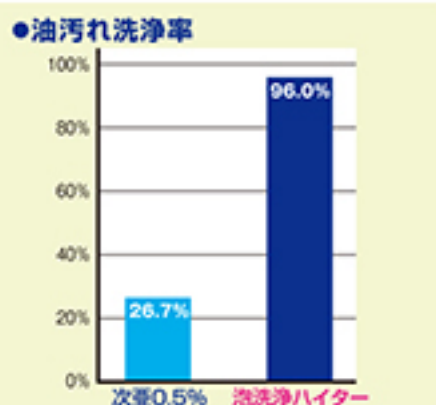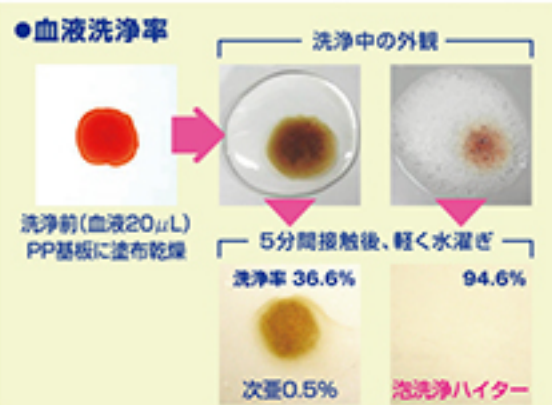

血液汚れ…ヒツジ血液20 μ L(ヘパリン添加後、PP基板に塗布して乾燥)
油汚れ…中鎖型脂肪酸トリグリセリド20mL(ズダンで着色、PP基板に塗布して乾燥)
※洗浄率塗布した汚れの重量の変化により算出【(洗浄前-洗浄後)÷洗浄前×100】
洗浄方法 油汚れに対して1mLで処理 5分間静置後少量の水で濯ぎ

突然の嘔吐発生など緊急時の対応にも

液体除菌漂白剤での希釈作業は…



● 突然の嘔吐物処理に備えて「かんたん汚物処理キット」と合わせてご準備ください。



こんな場面でお使い下さい。

血液汚れに

ベッド替え時の
洗浄・除菌に

環境表面の洗浄・除菌に (吐物などで)
汚染された環境表面に

使い方



●透析室・血管造影室



●病室



●手すり・ドアノブ



●廊下・病室

対象物に直接スプレーするか、不織布などにスプレーして拭き取ります。その後、液が残らないようしっかり拭き取るか、流水で洗い流します。