

医療・介護向け

除菌 洗淨剤

医療施設用クリンキープ

体液汚れから血液汚れまで、 除菌と洗淨が一度にできる除菌洗淨剤

除菌 洗淨剤

- 中性で、素材にやさしい洗淨成分を配合。プラスチックを傷めません。また非塩素系の製品なので臭わず、ほとんどの金属をいためません。
(ポリカーボネート及び銅など一部金属を除く)

病院や介護施設など、業務用の現場でご愛用いただいている、花王プロフェッショナル・サービス株式会社の製品です。プロの衛生管理をサポートします。病院・施設ではもちろん、在宅での介護でも。


● 薄めて使うタイプ ● 中性

※すべての菌を除菌するわけではありません

特長

除菌力

優れた除菌力を発揮します。
除菌成分として第4級アンモニウム塩を配合。

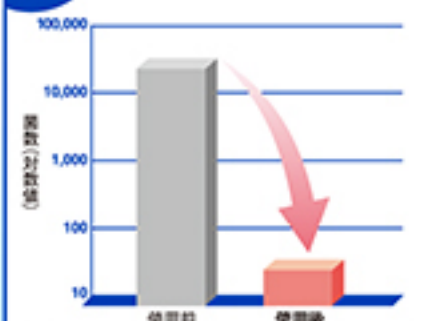

医療施設用クリンキープ(薄めタイプ)使用前・使用後の菌数変化を測定。
(試験はモダン系で実施)

洗淨効果

除菌と同時に洗淨ができます。
体液汚れや血液汚れなども、しっかり落とします。



●透析装置タッチパネルの有機物汚れを
しっかり落とします。

コンタクトポイント (手が頻繁に触れる箇所)の 洗淨・除菌に



ドアノブ・手すり、
ベッド柵など
手の接触面に



処置室・ICU・
手術室・フロア・
トイレなどの床に

ご使用例 用途に合わせて薄めてご使用ください。

- 手の接触頻度の多い環境表面の
清掃、汚染時の清掃



直接スプレーしたあと、布などで拭き取ります。
あるいは布などにスプレーし、拭き取ります。

- 手の接触頻度の少ない環境表面の
定期的な清掃



希釈液を直接かけるか、ブラシやモップなどにつけて汚れをこすり取ったあと、充分水拭きします。

小分け・計量グッズ

- Kao業務用ボトル専用
小分けキャップ



- Kao計量ポンプ



- Kao業務用ボトル
専用計量キャップ



つめかえには
「Kao業務用ボトル専用小分けキャップ」
(別売り)をご利用いただくと便利です。

計量には「Kao計量ポンプ」または
「Kao業務用ボトル専用計量キャップ」
(ともに別売り)をお使いいただくと
簡単に計量できるので使いすぎを防ぎ
経済的です。

※画像のボトルはキッチンハイター5kgです。