

取扱説明書

Instruction Manual

松葉杖

HC2216-GR-AS 8-389-01

HC2217-GR-AS

8-389-02


HC2218-GR-AS 8-389-03

HC9009-GR-AS

8-389-11

この度は本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。
また、お読み頂きました後も大切に保管してください。

外観と各部名称

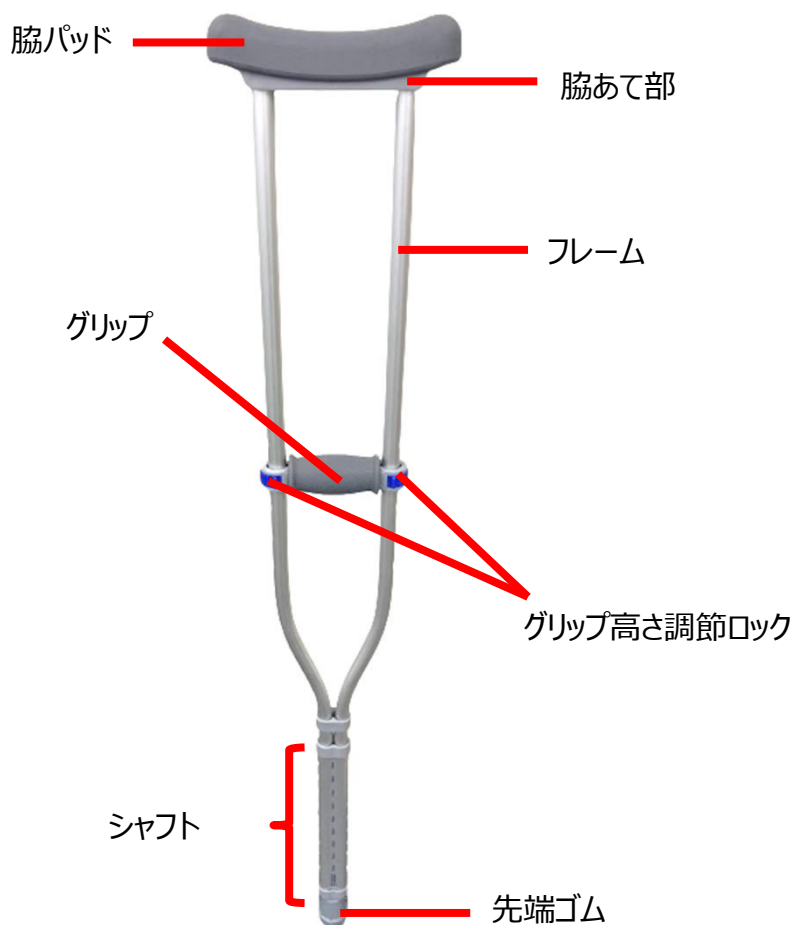

目次

安全上のご注意	2-4
全長調節手順	5
グリップ高さ調節手順	6-7
グリップ・脇パッド・先端ゴム交換手順	8-10
お手入れ手順	10
仕様	11
使用前点検チェックリスト	12
保証書・お問い合わせ先	13

本製品の耐用年数は**4年***です。

*厚生労働省の補装具としての軽金属松葉杖の耐用年数です。

〈安全上のご注意〉

製品のご使用前に『安全上のご注意』をよくお読みいただき、製品を安全に正しくお使いください。誤った使い方に起因する危害や損害を防止するための重要な事項について記載しています。

- 本書や本体に使われている図記号の意味は、次の通りです。



「してはいけないこと」を示しています。



「注意すること」を示しています。



警告 取り扱いを誤ると大ケガや事故などにつながる恐れがあります

本製品は医療事業者向け商品です。家庭用・一般用商品ではありません。

本製品の使用時は周囲の状況に十分ご注意ください。周辺への注意を怠ると思わぬ段差に引っ掛けて転倒し、大けがをする恐れがあります。

使用頻度・状況などにより大きく左右されますが、使用期間は4年としています。ラベル（p4参照）に使用開始日を必ず記入し、**4年を超えて使用しないでください**。また、破損などがあった場合は**使用期間内であっても**すぐに使用をやめ、買い替えなどをご検討ください。

※ 使用期間は先端ゴムなどの消耗部品を除き、通常のご使用で修理不能となるまでの予測年数を示したものです。保証期間とは異なり、期間中の使用を保証するものではありません。



注意

使用前に以下のことをご確認ください。（p12『使用前点検チェックリスト』をご活用ください）

- ・ **各部に割れや破損、変形、サビ、ぐらつきなどの異常がないか**
→該当する場合は直ちに使用をやめ、買い替えなどをご検討ください。
- ・ グリップの位置がしっかりと固定されているか
- ・ 先端ゴムに亀裂・摩耗や損傷がないか（亀裂・摩耗や損傷があるまま使用すると転倒の恐れがあります）
- ・ 本書p5の『全長調節手順』の手順に従って適切な長さに調節されているか
- ・ 全長調節穴に全長調節ボタンが左右同じ高さでしっかりとハマっているか

医師や専門の指導員の指示に従って正しくご使用ください。

歩行時に先端部が溝などにはまらないよう十分ご注意ください。破損やケガの恐れがあります。

 禁止	次のような場所での使用は避けてください。転倒によるけがの恐れがあります。 ・ 濡れているところや凍結した地面などといった、滑りやすいところ ・ 凹凸の激しいところ ・ 砂利道や砂の多いところ ・ 段差のあるところ
	フレームが変形した場合など、破損や異常、サビ、異音などがある場合は絶対に使用しないでください。突然の破断により転倒し、大けがをする恐れがあります。
	本製品を歩行補助以外の目的（椅子がわり、護身用など）や登山用ステッキとして使用しないでください。本来の目的以外に使用して事故などが起きた場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
	危険ですので本製品の分解・改造・ご自身での修理は絶対にしないでください。保証の対象外となります。
	先端部を人に向けたり、本製品を振り回したりしないでください。
	極端に斜めに松葉杖をつかないでください。破損や転倒につながる恐れがあります。
	本製品の耐荷重は100kgです。体重100kg以上の方は使用しないでください。
	本製品を火気に近づけないでください。やけどや製品の変形の恐れがあります。
	グリップ高さ調節ロックを解除した状態や、グリップ高さ調節ロックがしっかりとロックされていない状態で使用しないでください。使用中にグリップが突然移動し、転倒する恐れがあります。

 注意 取り扱いを誤るとケガや製品の破損などにつながる恐れがあります	
 禁止	強い衝撃を与えたり乱暴に取り扱ったりしないでください。破損の恐れがあります。
	破損の恐れがありますので、調節可能な範囲を超えて全長を調節しようとししないでください。
	破損の恐れがありますので、グリップ高さ調節ロックに無理な力をかけないでください。
	お手入れの際に腐食性の洗剤や強い酸性の洗剤を使用しないでください。
 注意	ご自身の身長に合わせたサイズの松葉杖をご使用ください。8-389-01～03それぞれの適応身長の目安はp11の仕様欄に記載されています。
	全長調節の際は全長調節穴や接合部などに指を挟まないよう十分ご注意ください。
	先端ゴムの交換時は先端ゴムがしっかりと奥まで入っているかご確認ください。
	先端ゴム・脇パッド・グリップは消耗品です。摩耗・損傷した場合は交換してください。
	70%アルコール、次亜塩素酸水での消毒はできません。本製品のお手入れには中性洗剤をご使用ください。
	廃棄する際は自治体の規則に従ってください。


◆ ラベルについて（重要）

本製品には①ご使用開始日記入用のラベル、②ロット番号（製造年月）記載ラベルの2種類のラベルが2本両方ともに貼られています。開封時に必ずご確認ください。

① ご使用開始日記入用のラベル

ご使用開始日記入用のラベル（図1）は図2のようにフレーム上部に貼りつけられています。**使用期間を確認できるようにするため、必ず開封時に「ご使用開始日」欄への記入をお願いいたします。**また、ラベル右側には和文取扱説明書（本書）のQRコードも記載されています。（※下のQRコードはサンプルです。）

図1

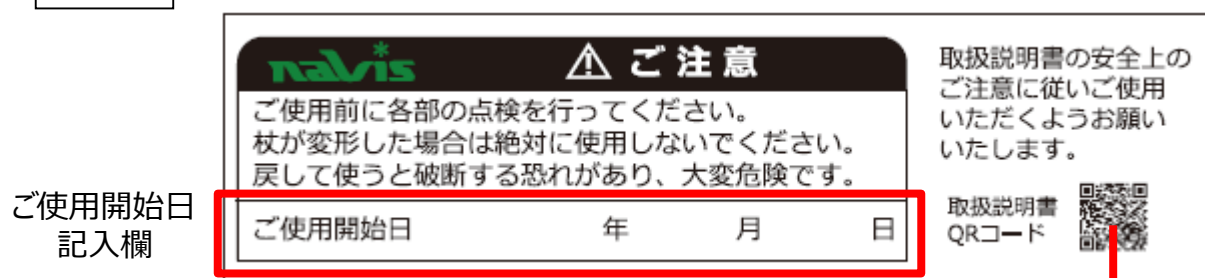

和文取扱説明書QRコード

図2



② ロット番号（製造年月）記載ラベル

ロット番号（製造年月）記載ラベル（図1）はフレーム上部（図2）に貼られています。ロット番号は製造年下2桁＋製造月2桁で記載されています。例えば図1の場合では製造年月は2023年5月となります。不具合などがあった場合はお問い合わせの際にロット番号をお伝えください。

図1



※上の製造年月（ロット番号）はサンプルです。

図2



全長調節手順

注意：全長調節時は全長調節穴や接合部などに指を挟まないようご注意ください。

- ① 片方の手で左右の全長調節ボタンを押し込みながら、もう片方の手でシャフトを持って引っ張り、任意の位置にある全長調節穴にボタンを出します。全長調節ボタンの位置が上がると松葉杖の全長が長く、下がると全長が短くなります。



※ 全長調節穴付近に各調節穴に調節した場合の適合身長（参考）が記載されています。全長調節する際の目安としてご確認ください。適合身長はで9段階（3cm間隔）で記載されています。適合身長の範囲はp11『仕様』をご確認ください。



※ 上図は8-389-02のものです。

- ② カチッと音がして全長調節ボタンが全長調節穴にしっかりと入っていることをご確認ください。また、全長調節ボタンの位置が左右で同じ高さになっているか必ずご確認ください。
- ③ 一般的に直立した状態で脇パッドが脇下3～5cmくらいの位置にあるときが適切な高さですが、専門の医師や指導員の指示に従って適切な全長に調節してください。

グリップ高さ調節手順


- ① フレームを持ちながら左右のグリップ高さ調節ロックを外側（下図矢印の方向）にカチッと音がするまで引き出し、ロックを解除します。



ロック時



グリップ高さ調節ロック拡大図

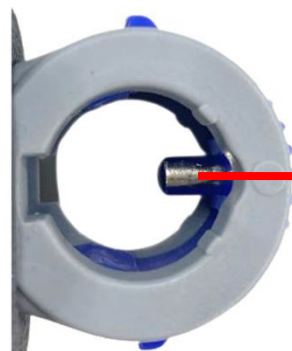


グリップ高さ調節ロック断面図

ロック解除時





グリップ高さ調節ロック拡大図

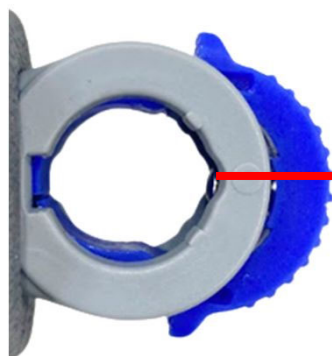

グリップ高さ調節ロック断面図

② フレームを持ちながらグリップを上下にスライドさせ、任意のグリップ高さ調節穴の高さに調節します。

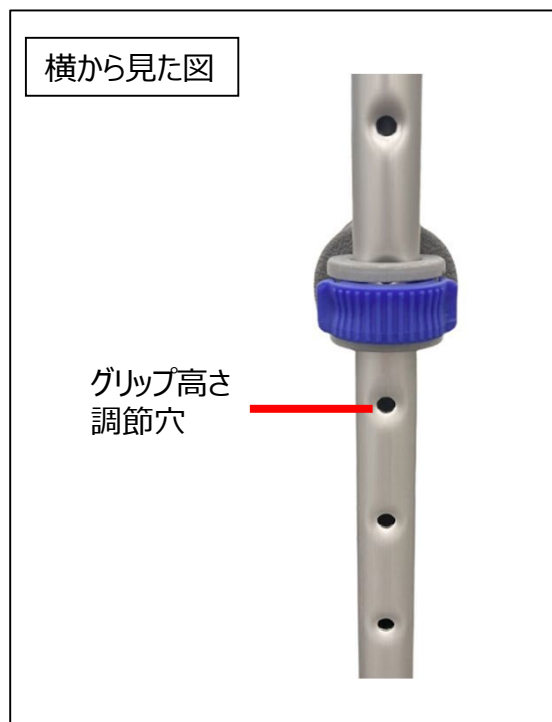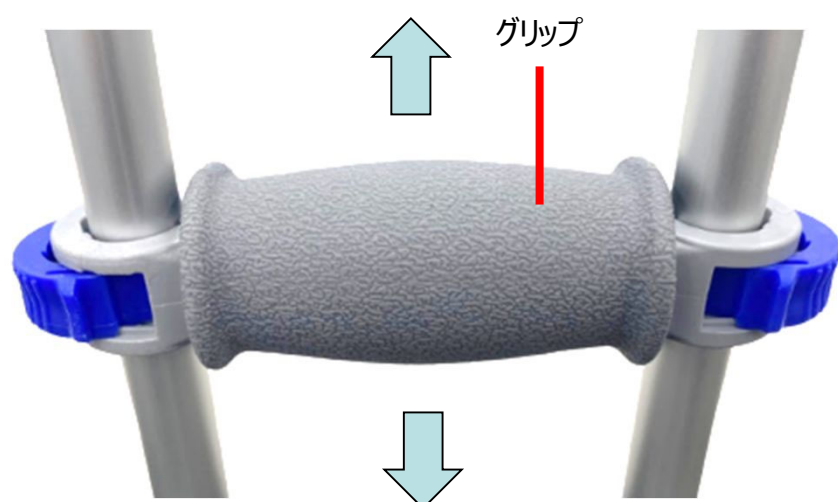

③ グリップ高さ調節ロックのピンが調節穴にしっかり入る位置にあることを確認し、グリップ高さ調節ロックを内側（下図矢印の方向）に押します。ピンがグリップ高さ調節穴にしっかりと入っていないとグリップ高さ調節ロックが完全にロックされません。完全にロックできない場合はピンがグリップ高さ調節穴に入っているかご確認ください。




④ グリップの高さを調節した後は、グリップがしっかりと固定されており、ぐらつきなどがないかご確認ください。**グリップが完全にロックされていない状態で絶対に使用しないでください。**

グリップ・脇パッド・先端ゴム交換手順

グリップ・脇パッド・先端ゴムは消耗品です。摩耗・損傷した場合は新しいものと交換してください。交換品は必ず本書に記載の品番のものをご使用ください。


● グリップ交換手順

- ① 脇パッドを脇あて部から取り外します。（p10参照）
- ② フレームを押さえながら、下図のように脇あて部をフレームから引き抜きます。

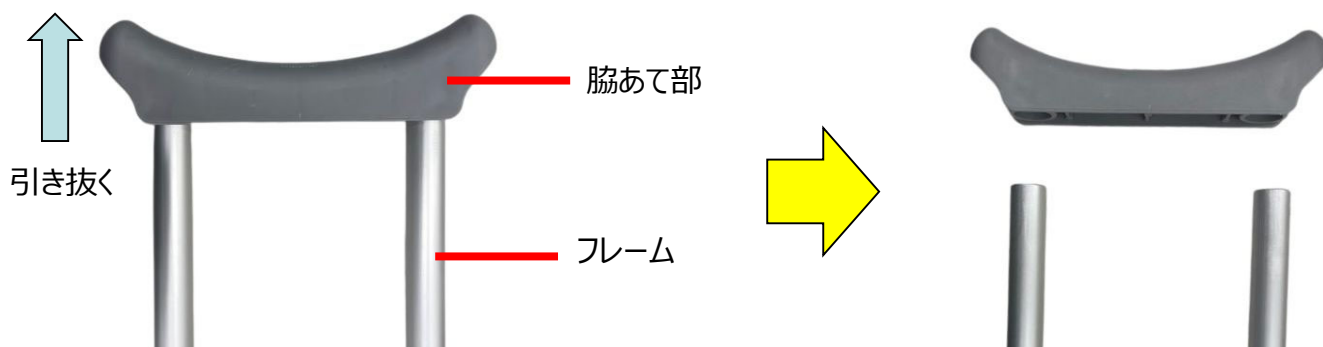

- ③ 左右のグリップ高さ調節ロックを外側に引いてロックを解除し、古くなったグリップ（下図丸印部分）をフレームから引き抜きます。

※ グリップを引き抜いた際、グリップ高さ調節ロック（下図青色のパーツ）がグリップから外れます。紛失しないようご注意ください。

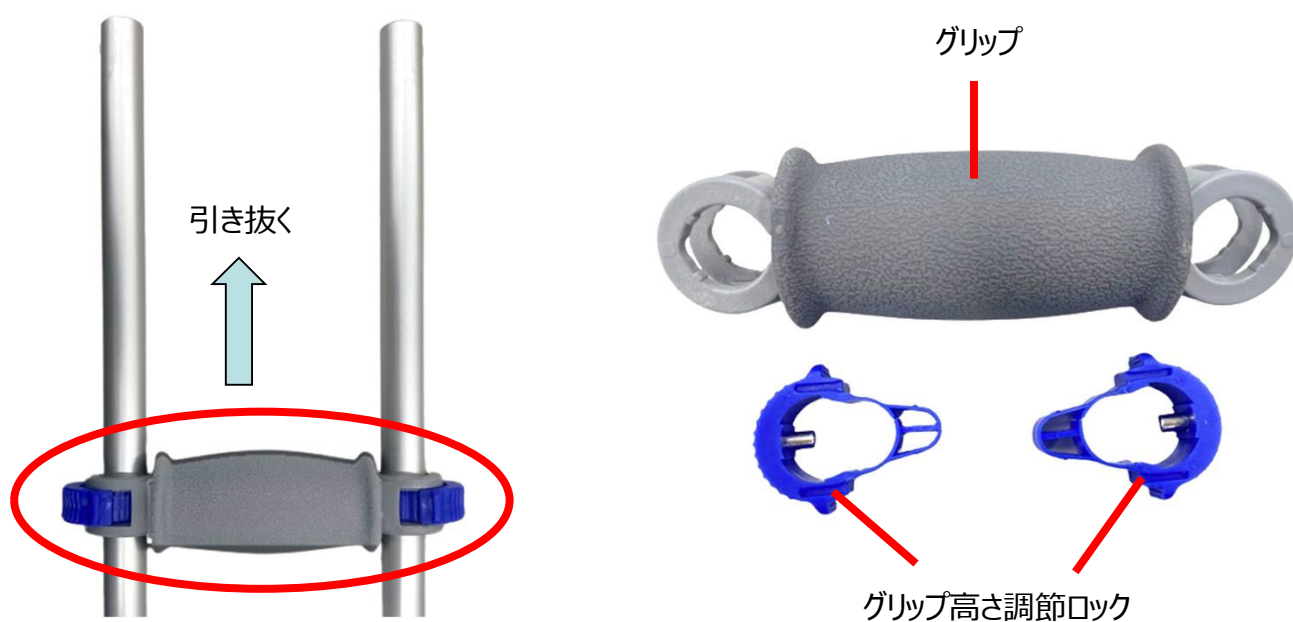

④ グリップを新しいものに交換します。（交換用グリップの品番：8-389-11）

※ 品番：0-6617-52の交換用グリップは形状が異なるため使用できません。

⑤ 左右のグリップ高さ調節ロックを図1のようにグリップの両端に差し込みます。その際、図2のようにピンがフレームに当たらない位置（ロック解除時の位置）に調節してください。ピンがフレームに当たる位置（ロック時の位置）まで差し込んでしまうと、ピンがフレームに当たってグリップをフレームに通せませんのでご注意ください。

図1


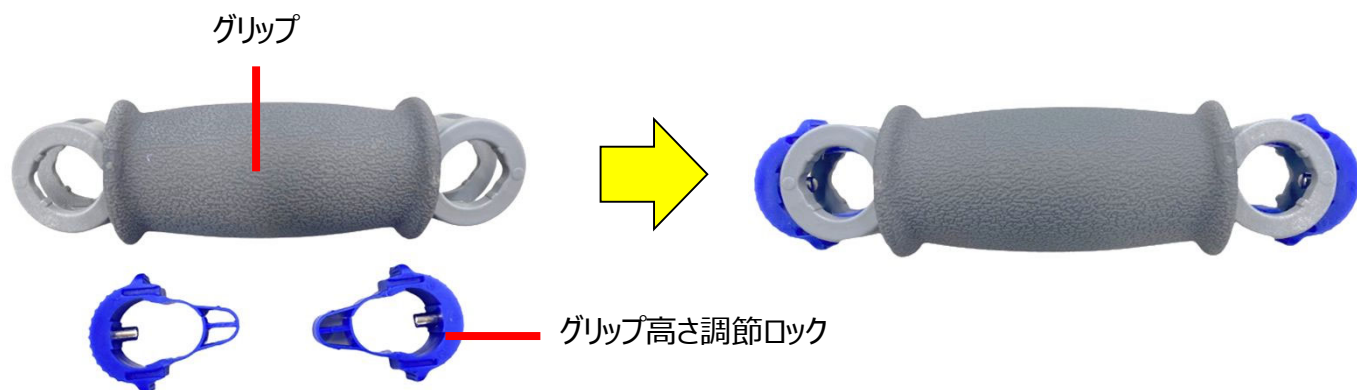


図2



⑥ ⑤をフレームに通した後、脇あて部をカチッと音がするまでフレームに押し込んで戻します。脇あて部を戻したら、脇パッドを元のように取り付けてください。

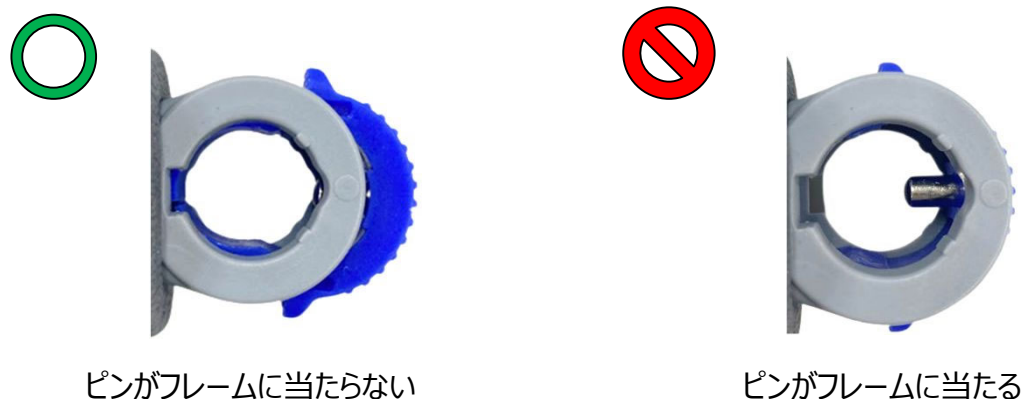

⑦ p6-7『グリップ高さ調節手順』と同じ要領でグリップの高さを調節し、任意の高さの調節穴でグリップ高さ調節ロックを内側に押してロックします。グリップ高さ調節ロックが完全にロックされていることをご確認ください。


● 脇패드交換手順

古い脇패드を脇あて部から引き抜き、新しい脇패드（品番：0-6617-51）を元の位置にしっかりと差し込んでください。



● 先端ゴム交換手順

摩耗・損傷した場合は必ず新しい先端ゴム（品番：0-6617-23）に交換してください。そのまま使用されますと、転倒などの事故につながる恐れがあります。交換するには古い先端ゴムをねじりながら取り外し、新しい先端ゴムをしっかりと奥まではめてください。

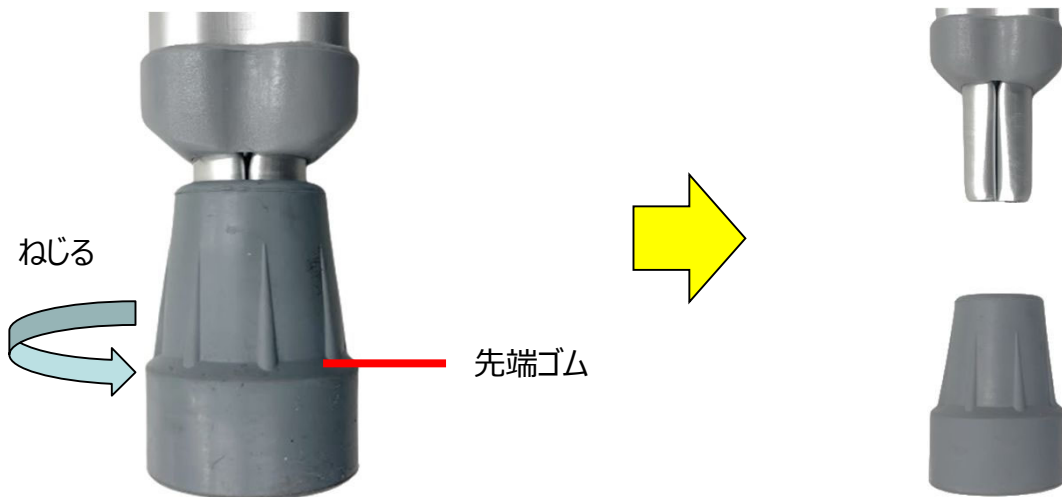

お手入れ手順

- ・ 本製品のお手入れは少量の中性洗剤を含ませた柔らかい布か、乾いた柔らかい布で拭いて行ってください。
- ・ 70%アルコール、次亜塩素酸水での消毒はできません。
- ・ 腐食性の洗剤や強い酸性の洗剤は使用しないでください。

仕様

品番	8-389-01	8-389-02	8-389-03
型番	HC2216-GR-AS	HC2217-GR-AS	HC2218-GR-AS
適応身長（目安）	約137～157cm	約157～178cm	約178～198cm
全長	950～1150mm	1130～1330mm	1330～1530mm
製品重量（1組）	約1.56kg	約1.7kg	約1.82kg
耐荷重	100kg		
入数	2本1組		
調節幅	全長／約25mm幅 × 9段階、 グリップ高さ／約40mm幅 × 5段階		
材質	本体／アルミニウム（メッキ加工）	脇パッド・グリップ／TPR	
	脇あて部・グリップ高さ調節ロック／プラスチック	先端ゴム／天然ゴム	
シャフト先端径	Φ22mm		
先端ゴム	穴径 Φ20 × 接地面径 Φ44 × 高さ 55mm		
脇パッド概寸	幅 約210 × 高さ 約35mm（内寸：幅 約170 × 高さ 約20mm）		
グリップ概寸	幅 約95 × 高さ 約44mm（グリップ高さ調節ロック部分を除く）		

● 交換用オプション品

品名	脇パッド	グリップ	先端ゴム
品番	0-6617-51	8-389-11	0-6617-23
型番	HC9008GR	HC9009-GR-AS	HC9023
色	グレー		
入数	1個		

※ 上記の仕様は予告なく変更となることがあります。あらかじめご了承ください。

使用前点検チェックリスト

松葉杖の使用前に下表の点検事項をご確認ください。万が一異常や破損などが見つかった場合は使用年数にかかわらず使用を中断し、ご購入先までご相談いただくか、新しいものに買い替えてください。

グリップ・脇パッド・先端ゴムが摩耗・損傷していた場合はp8-10の手順で新しいものを交換してください。

お問い合わせの際は ①ご購入時期 ②異常の詳細内容 ③ロット番号 （③の記載位置はp4-5参照）の3点をお伝えください。

点検箇所	点検項目	チェック
使用時の注意	ご使用開始日がラベルに記入されており、使用期間が耐用年数（4年）以上経過していないか	
	体重100kg以上の方が使用していないか	
	身長に合った適切な長さ・サイズで使用しているか	
	グリップ・先端ゴム・脇パッドは本書で指定しているものを使用しているか (p11『●交換用オプション品』参照)	
フレーム・シャフト	異音がないか（例. カラカラと音がする、使用時に軋むなど）	
	接合部などにガタツキがないか	
	亀裂、キズ、へこみ、変形などの損傷がないか	
	サビがないか	
	各調節穴に破損や異常はないか	
	全長調節ボタンがしっかりと全長調節穴から飛び出しているか	
	左右の全長調節ボタンが同じ高さになっているか	
	全長調節ボタンがスムーズに動くか（押しこみ・飛び出し）	
グリップ	グリップが摩耗・損傷していないか	
	グリップ高さ調節ロックが完全にロックされているか	
	グリップがしっかりと固定されているか	
	グリップ高さ調節ロックが損傷・変形していないか	
先端ゴム	先端ゴムに亀裂が入ったり、摩耗・損傷していないか	
	先端ゴムがしっかりと奥まで差し込まれているか	
脇パッド	脇パッドが摩耗・損傷していないか	
	脇パッドがしっかりと取り付けられているか	

保証規定

- 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送等による落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に左記保証規定 1 に基づく正常な使用状態での故障の節は左記保証規定により修理いたします。

品名	松葉杖
品番	8-389-01～03
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
お買い上げ日	年 月 日
お名前	様
ご住所	TEL.
取り扱い店名	担当者印
住所	TEL.

商品についてのお問い合わせは カスタマー相談センター



TEL 0120-711-875


問合せ専用URL <https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～午後5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません

修理・校正についてのお問い合わせは 修理窓口



TEL 0120-788-535



<問合せ専用> URL <https://www.as-1.co.jp/faq/support>
E-mail repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分まで
土・日・祝日及び弊社休業日はご利用いただけません