

## 使用上の注意

-ご使用前に必ずお読みください-

- 本品は厳重な品質管理下で製造されていますが、万一のため、ご使用前には必ずスポンジ部と柄の接着状態をご確認下さい。
- 本品は、使い捨てでお使いください。

## ご使用方法（下図をご参照下さい）

- 袋から取り出し、そのままお使いいただけます。粘膜が弱っている方にお使いになる場合は、ぬるま湯、お茶等にスポンジ部を湿らせて、軽くしぼってからお使い下さい。
- 口蓋や、歯茎と頬の間には、痰・食物の残りが付きやすいのでチェックしましょう。

