

折りたたみベッド

型番（品番）

FB4-60 (8-587-01)

最初にお読みください

＜安全上のご注意＞ 2

＜使用・保管時のご注意＞ 3

使いかた

＜各部の名称とはたらき＞ 4

＜操作の方法＞ 4

お手入れ

＜お手入れ・メンテナンス＞ 5

製品仕様と保証について

＜製品仕様＞ 5

＜廃棄方法＞ 5

＜製品保証＞ 6



（写真 FB4-60）

このたびは、アズワン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

製品のご使用前に必ず、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
お読みになったあとは、お手元においてご使用ください。

製品の譲渡・貸与時は、この取扱説明書を本体の目立つところに添付して、製品と共にお引き渡しください。

最初にお読みください

＜安全上のご注意＞

製品のご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みいただき、製品を安全に正しくお使いください。誤った使い方に起因する危害や損害を防止するための重要な事項について記載しています。

●誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように分けて説明しています。

 警告	死亡や重傷を負うおそれがある内容です。
 注意	傷害を負ったり、物的損害が発生するおそれがある内容です。

●本書や本体に使われている図記号の意味は、次の通りです。

	「必ず行うこと」を示しています。※
	「してはいけないこと」を示しています。※
	「注意すること」を示しています。※

※ 本書では、おもな使用場面ごとに分類しています。

	接触禁止を示しています。
	分解・改造禁止を示しています。
	指を挟まないよう注意を示しています。
	機器の転倒注意を示しています。
	火気禁止を示しています。

<使用・保管時のご注意>

 警告 製品を安全に正しくお使いいただくために 必ず、お守りください	
 操作運転	キャスターの取り付けなど一部にネジを使っておりますので、ご使用前にゆるみがないか、ご確認ください。
	床面が平滑なところで使用してください。凸凹のある床面で使用されますと、本体やキャスターなどの部品が破損する原因になります。
	エレベーター等の乗降の際は、キャスターが隙間に落ちないようにご注意ください。
	もし使用中に変形や曲がり、ネジのゆるみなどによるガタツキや異音がした場合には、直ちに使用を中止し、増し締めしてください。改善されない場合は、購入された販売店にご相談ください。そのまま使用されますと、本体の破損やキャスターの脱落により怪我をする恐れがあります。
	移動は必ず折り畳んだ状態でゆっくりとしてください。開いた状態でしないでください。急や無理な移動をすると転倒し、破損や怪我をする恐れがあります。
	屋内のみで使用してください。
	ベッドを立てて保管する際には転倒することがないように注意してください。
	ベッドは周囲の壁、家具等の障害物から 5cm 以上離して置いてください。ベッドの動きにより、周囲のものを損壊する恐れがあります。
	折りたたみ時や移動の際、床面に傷がつかないように十分ご注意ください。特に材質の柔らかい床材等は、傷がつく恐れがありますので十分にご注意ください。
	幼児や取扱説明書、警告ラベルの内容が理解できない方には、操作をさせないでください。内容を理解できない方が操作しますと、事故の原因となります。
 操作運転	ベッドを開閉する際や使用時は、可動部などのすき間に指などを入れないでください。
	ベッドを開閉する際は、周りに人や障害物がないことを確認してください。
	本製品を目的以外の用途で使用しないでください。また、分解および改造は絶対にしないでください。破損や怪我をする恐れがあります。
	無理な荷重は転倒や破損の原因になります。
	直射日光、またはストーブ等の熱を避けてください。変色や変形の原因となります。
	本製品は一人用です。二人以上での使用は避けてください。(耐荷重 150kg)
	お子様をベッド近くで遊ばせないでください。事故の恐れがあります。
	ベッドの上を歩いたり飛び跳ねたりしないでください。転倒や怪我、またはベッドが破損する恐れがあります。
	ゆするなどの無理な力をかけないでください。

使いかた ＜各部の名称とはたらき＞



＜操作の方法＞

◆開き方



- ① マットを支え安全バーを外します。 →
- ② 持ち紐を持ちながらフレームを開く方向に引きます。

⚠ 必ず持ち紐を持ってください。脚が勢いよくつくため危険です。

⚠ 指を挟まないように十分気をつけてください。



- ③ 床にゆっくりと置きます。
反対側も同じ要領で開きます。

⚠ 足の上にぶつかけたり床を傷つけないようにゆっくりと置いてください。

◆折りたたみ方



- ① 両方の持ち紐を持ち上に引き上げます。 →
- ② 持ち紐を持ちながらフレームを折りたたむ方向に引きます。

⚠ 完全に折りたたむまで持ち紐を離さないでください。



- ③ 反対側も同じ要領で折りたたみ
安全バーをかけます。

⚠ 指を挟まないように十分気をつけてください。



お手入れ

＜お手入れ・メンテナンス＞

本製品の清掃方法について説明します。

- お手入れの際は、必要に応じて、手袋等を着用してください。
- 拭き取りは、よく絞った柔らかい布で水拭きしてください。また、取れにくい汚れは布に少量の中性洗剤を含ませ取り除いてください。除去後は必ず、乾いた布で本体に付着した中性洗剤をきれいに拭き取ってください。熱湯やスチームによるお手入れはできません。
- 外装や内部に直接水をかけたり、異物を入れたりしないよう注意してください。また、クレンザー（磨き粉）、シンナー、石油、灯油、酸、およびこれに類するものは、絶対に使用しないでください。
- 長期保管の際は、キャスターなどから床への色移りを防ぐため、ベッドの下に布などを敷いてください。

製品仕様と保証について

＜製品仕様＞

品番	8-587-01
型番	FB4-60
サイズ	本体：600×1990×400mm 折りたたみ時：600×360×650mm マット：600×1900×30mm
材質	フレーム／スチール マット／ウレタンレザー
床面高さ	270mm
キャスター	φ50mm ポリプロピレン製
耐荷重※	150kg
重量	22kg

※使用者の体重と積載物の合計です。

製品の仕様は、改良・改善のために予告なく変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。

＜廃棄方法＞

本製品を廃棄するときは、法律や市町村の条例に定める廃棄方法に従って、廃棄してください。
無断で廃棄すると、違法行為となり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって罰則が科せられます。

<製品保証>

保証書

本製品は厳正な検査を経て出荷されておりますが、万一保証期間内に右記保証規定(1)に基づく正常な使用状態での故障の節は右記保証規定により修理いたします。

品名	折りたたみベッド
型式	FB4-60
機番	
保証期間	お買い上げ日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	様
ご住所	TEL:
取り扱い店名	担当者印
住 所	TEL:

アズワン株式会社

保証規定

- (1) 弊社商品を、当該商品の取扱説明書所定の使用方法及び使用条件、あるいは、当該商品の仕様または使用目的から導かれる通常の使用方法及び使用条件の下で使用され故障が生じた場合、お買い上げの日より一年間無償修理いたします。
- (2) 次の場合、保証期間中でも有償修理とさせていただきます。
 - ・誤使用、不当な修理・改造による故障。
 - ・本品納入後の移動や輸送あるいは落下等による故障。
 - ・火災、天災、異常電圧、公害、塩害等外部要因による故障。
 - ・接続している他の機器が原因による故障。
 - ・車両・船舶等での使用による故障。
 - ・消耗部品、付属部品の交換。
 - ・本保証書の字句を訂正した場合、購入年月日・購入店の記入がない場合、及び保証書の提示がない場合。
- (3) ここで言う保証とは、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦頂きます。
- (4) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

◎商品についてのお問い合わせは

カスタマー相談センター

TEL 0120 - 711 - 875



スマートフォンから

問い合わせ
専用URL

<https://help.as-1.co.jp/q>

受付時間：午前9時～午後5時30分
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

◎修理・校正についてのお問い合わせは

修理窓口

TEL 0120 - 788 - 535



スマートフォンから

問い合わせ
専用URL

<https://www.as-1.co.jp/faq/support/>
(E-mail) repair@so.as-1.co.jp

受付時間：午前9時～12時、午後1時～5時30分
土・日・祝日、および弊社休業日はご利用できません。

アズワン株式会社



(FB4-60 折りたたみベッド)

製品に関する最新の情報を弊社ホームページでご案内しています。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2023年7月 第1版
Made in China