

ナビス フィルムドレッシング

Transparent Film Dressing

タブ付フレームタイプのフィルムドレッシング



一般医療機器

一般の名称:カテーテル被覆・保護材(救急絆創膏)

販売名:ナビス フィルムドレッシング

医療機器届出番号:27B2X00303000073

navis

- ▶ タブ付フレームタイプの剥離紙のため、カテーテル穿刺部や留置針の固定時に貼りつけが行いやすいです。
- ▶ 透明なため、貼付したまま患部の状態を確認できます。
- ▶ 透湿性・防水性に優れています。
- ▶ 記録用シールがあるため、貼付時に日付等を記載できます。
- ▶ 20袋入りの少量包装のため、過剰在庫防止に繋がります。

記録用シール
貼付時に日付等
を記載可能




タブ付フレーム
カテーテル穿刺部や留置針の固定
時に貼りつけが行いやすい

使用例




患部の状態が確認しやすい透明フィルム


貼付方法

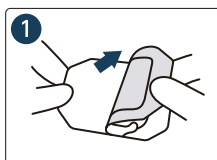

裏側の剥離紙をはがします。

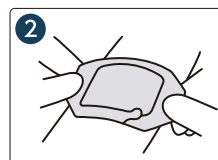

フィルムの粘着面に手が触れないようにしながら、傷あるいはカテーテル等の刺入部に本品中央を合わせて貼付します。本品を上から押さえ、しっかりと粘着させます。

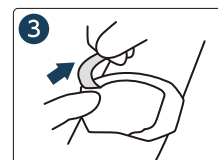

本品を押さえながらタブをつまみ、ゆっくりと表側の剥離紙を時計回りにはがしていきます。本品中央部から端に向かって優しく押さえ、良く粘着させます。

品番	型番	幅×長さ (mm)	入数	価格(税抜)
8-598-01	SD0607	60×70	1箱 (1枚/袋×20袋入)	¥1,000
8-598-02	SD1012	100×120		¥2,800

仕様

- 材質：PU（ポリウレタン）フィルム・アクリル系粘着剤
- EOG 滅菌済（個包装）
- 用途：創傷面等の被覆保護。注射針・カテーテル等の穿刺部の固定。

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))



製造販売業者

AS ONE **アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号