

— Breathing Trainer —

呼吸訓練器

用途に応じて選べる2種のラインナップ



収納時

(トレボール)



収納時

(容量式)

※本製品は医師または医療従事者が指定した処方及び指示の下でのみご使用ください。


※本製品はシングルパシエント用です。感染予防の観点より必ずお守りください。

一般

一般医療機器
 一般的名称 : 非能動型呼吸運動訓練装置
 販売名 : 呼吸訓練器
 医療機器認証番号: 27B2X00303000079

一般医療機器
 一般的名称 : 非能動型呼吸運動訓練装置
 販売名 : 容量型呼吸訓練器
 医療機器認証番号: 27B2X00303000080

挙上するボールの数と持続時間で回復状態を確認

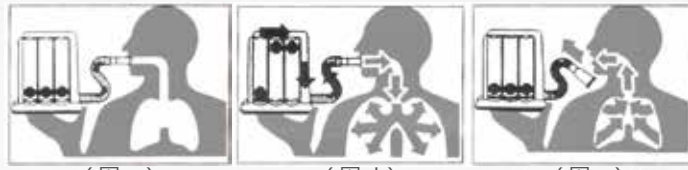

- (図 .a) (図 .b) (図 .c)
- ① 本商品をなるべく垂直になるように保持します。(図 .a)
 - ② 軽く深呼吸をし、マウスピースをしっかりと咥え最大限息を吸い込み 1~3 個ボールを浮かせ、2~3 秒ボールが浮いた状態を維持します。(図 .b)
 - ③ 鼻からゆっくりと息を吐きだしながらマウスピースを口から外します。(図 .c)
- * 訓練回数・時間目安は医師・医療従事者の指示に従ってください
* 肺に蓄積した分泌物を取り除くため 2~3 回咳をしてください。


呼吸訓練器 (トレボール)

品番	型番	最大吸気量(mL)	重量 (g)	入数	価格 (税抜)
8-606-01	A-SQ1	1,200	約140	1	2,500円
8-606-51	A-SQ1-5		約700	5	11,000円

材質

- 本体:PS(ポリスチレン)、カラーボール: ABS樹脂
- マウスピース:PP(ポリプロピレン)
- チューブ:PE(ポリエチレン)
- サイズ: 135×70×145mm ■ ラテックスフリー
- チューブ長: 約235mm ■ マウスピース長: 約65mm

2つの容量で患者様の訓練・回復状態を確認

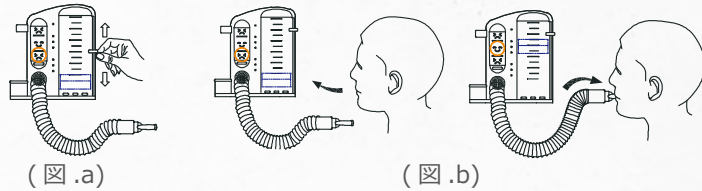

- (図 .a) (図 .b)
- ① マーカーで目標流量を設定し、なるべく垂直になるように保持します。(図 .a)
 - ② 軽く深呼吸をし、息を吐いた後マウスピースをしっかりと咥え 最大限息を吸い込み、ボールが顔マーク中央に浮いた状態を維持します。(図 .b)
 - ③ 鼻からゆっくりと息を吐きだしながらマウスピースを口から外します。
- * 訓練回数・時間目安は医師・医療従事者の指示に従ってください
* 肺に蓄積した分泌物を取り除くため 2~3 回咳をしてください。

呼吸訓練器 (容量式)

品番	型番	目盛範囲(mL)	重量 (g)	価格 (税抜)
8-565-01	LB1811-01A	250~3,000	約140	2,800円
8-565-02	LB1811-02A	500~5,000		

材質

- 本体:PS(ポリスチレン)、カラーボール: ABS樹脂
- マウスピース・フロート板・チューブ: PP(ポリプロピレン)
- マーカー:PE(ポリエチレン)
- サイズ: 150×67×175mm ■ ラテックスフリー
- チューブ長: 約103~380mm
- マウスピース長: 約40mm

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。
※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00~午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



製造販売元

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

■ ご用命は信頼ある代理店へ

navis*

[2401PASPB]