


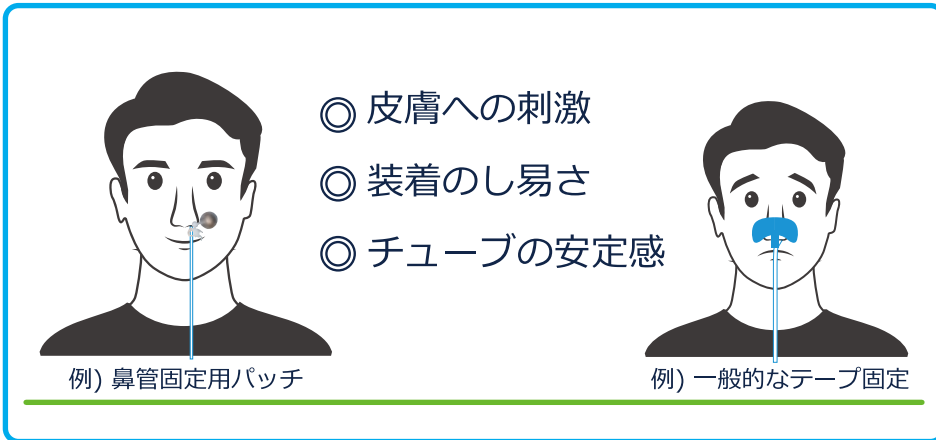

- ◆ 小さな範囲でしっかり固定 ◆ チューブ向きの変更も容易
- ◆ 処置時間の削減・不快感の解消にお役立てください

世界各国の展示会で  
アイデア商品として賞を獲得



8-611-01 / 装着イメージ

## 再使用禁止 チューブ固定用パッチ



8-611-01 / Q1-AS1  
鼻管固定用パッチ



8-610-01 / CSDV-NR  
ドレーンチューブ固定用パッチ

### 《使用方法》

- ① ご使用になるチューブを上記《チューブの固定》をご確認の上固定してください。  
使用可能なチューブ径をご確認の上、範囲内のチューブをご使用ください。
- ② 本品の装着部位を確認し、当該部位の皮膚をぬるま湯又は石鹸水でよくすすぎ、しっかりと水気を拭き取り清潔で乾燥した状態にしてください。
- ③ 基材裏面の剥離紙を剥がし、あらかじめ清潔にし乾燥させた貼り付け位置に貼り付け、周囲を軽く指で押して剥がれないように密着させてください。

### ※皮膚の状態をよく観察いただき、炎症がなくても 最長2日間での交換を推奨

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。  
最新情報はAXELでご確認ください。  
※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

### 《チューブの固定》



- リリースボタンをクリップ部に押し込むようにつまみ、ギアリングを開放します。
  - 固定するチューブを開放したギアリングで挟みこむようにして押し込み、固定します。
  - チューブを外す際は上記と同様の手順でギアリングを開放し取り外します。
- ※固定後はギアリングがしっかり固定されているか、締めつけすぎでないかご確認ください。

Made in Taiwan

品番	型番	使用可能なチューブ径	入数	価格(税抜)
8-611-01	Q1-AS1	5~18Fr	10セット	3,600円
8-610-01	CSDV-NR	5~40Fr	10セット	4,800円


### 材質

- 基材/不織布テープ (3M社), 固定具/TPU
- 基材径/ 鼻管固定用 約Φ28mm, ドレーンチューブ固定用 約Φ60mm




一般医療機器  
 一般的名称 : カテーテル固定用パッチ  
 販売名 : チューブ固定用パッチ  
 届出番号 : 27B2X00303000078  
 製造販売業者 : アズワン株式会社

## 鼻息の噴出状態、方向を視覚的に観察 言語療法における発音時の息の鼻漏れ確認に

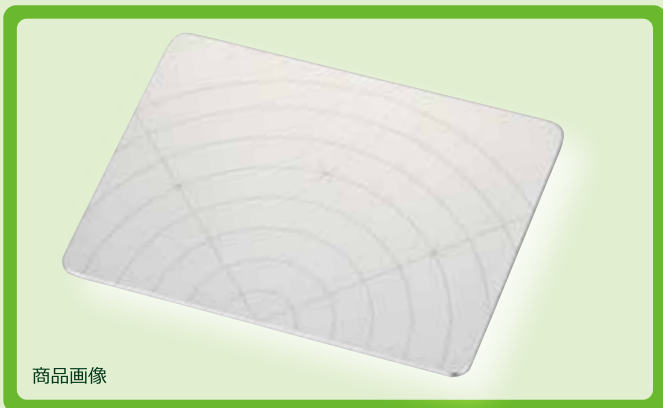

商品画像

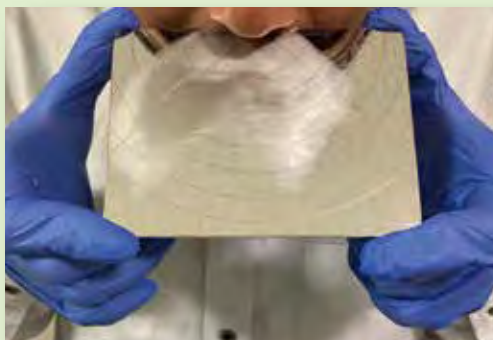

使用例

※ 環境によっては、  
本品が温まっている場合は  
うまくもりがでないこと  
があります。  
その場合は、少し冷まして  
からご使用ください。

Made in Japan

- ◆ 鏡面仕上げでしっかりと表面に曇りを反映
- ◆ 細部にわたり丁寧な仕上げで日々の診断・診察をサポートします。

### 《使用上のご注意》

- ① ご使用になる前に商品に傷、ひび割れがないことをご確認ください。
- ② きれいに鼻息の曇りを反映するために、表面に指紋や指油で汚れていない状態でご使用ください。  
表面がよごれている場合は曇り具合がうまく反映されない場合があります。
- ③ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合は、速やかに使用を中止し、  
医師の診断を受けてください。

### 《お手入れに関して》

- 本品に汚れが付着した場合は、腐食やシミの原因になるため流水でよく洗い流してください。  
\*次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、超酸性水、家庭用洗剤などは使用しないでください。
- 高圧蒸気滅菌は精製水を使用してください。(不純物が表面を傷つける恐れがあります)
- EOGガス滅菌により鏡面に曇りを生じさせることがあるので行わないでください。  
※その他の詳細については、商品添付文書をよくご確認ください

## ナビス 鼻息鏡

品番	型番	サイズ (mm)	入数	価格 (税抜)
8-435-01	NV-NM	約115×85	1	3,500円

### 材質

- ステンレス (鏡面仕上げ)

■ 商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

**TEL 0120-711-875 (ユーザー機用)**

(午前 9:00～午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))

商品の内容に関する  
お問い合わせは

アズワン FAQ

検索



販売元

**アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号

一般医療機器

一般的名称 : 鼻息鏡

販売名 : ナビス 鼻息鏡

届出番号 : 09B2X00010000830

製造販売業者 : 株式会社 シオダ