

類別 機械器具(06)呼吸補助器
一般的名称 人工呼吸器用マスク
販売名 ポケットマスク Adsafe

文書番号A-32

【禁忌・禁止】

1. 一方向弁の再使用禁止
2. フィルターの再使用禁止
3. 医療従事者以外の使用禁止

【形状・構造及び原理等】


右図を参照

マスククッション：塩化ビニル樹脂

マウス：硬質プラスチック製

大きさ：130mm x 106mm x 48mm

原理：口と鼻を覆うマスク

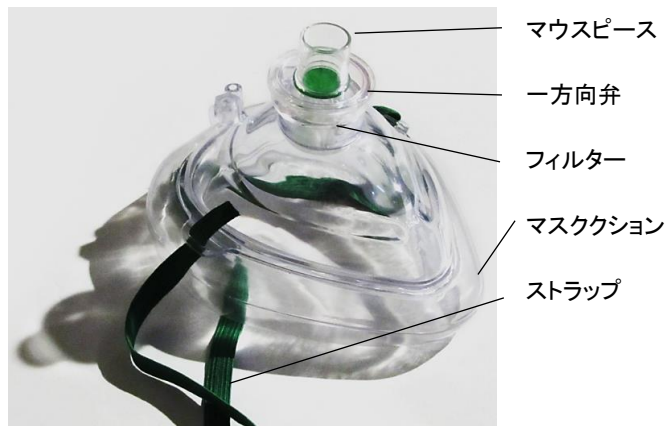

全体図

マウスピースを上押し上げた状態

【使用目的又は効果】

患者の鼻、口を覆って人口呼吸をおこなう。

【使用方法等】

1. ケースよりマスクを取り出す。
2. マスククッションを広げる、フィルターの位置を確認する。
3. 大人、小児に使用する時はマスクのふちにを顎と口下を合わせ、"nose"のマークが鼻の上にセットしてピッタリと密着させる。
4. マウスピースより息をゆっくりと吹き込む、胸が上がる事を注視する。
5. マウスピースより口を離し患者が息を吐き出すようにする、この動作を繰り返す。
この時の注意：もし患者が異物を吐いたらマスクをはずし、きれいにする事。
6. 必要に応じて付属しているニトリル製グローブを使用する(非医療機器)
7. 幼児に使用する場合はマスクを大人とは逆にフェイスにセットする。

【使用上の注意】

1. 十分に訓練した医療従事者が行う事。
2. 酸素を使用する場合は、その注意事項に従って遵守すること。
3. 一方向弁とフィルターはシングル使用であって、再使用はできません。
4. 事前に動作を試みる事そして各部分が異常がない事を確認する事。

【保管方法及び使用期間等】

作動環境：-18℃～40℃

湿度～85%

保管環境：作動環境と同等

使用期間について、3年以内(自己認証)又は材質の変色、破損、及び不具合等があった場合。

【保守・点検に関わる事項】

マスクを洗浄する時は、薄い石鹼水で洗い、きれいな水でよくすすぎ、異物がない事を認めてから良く乾燥する。

洗浄についての注意事項

煮沸、ガス滅菌、オートクレーブは使用できません。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所】

ユーメド貿易株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-39-9 山本ビル

TEL: 03-3815-4853 FAX: 03-3815-4872

一度使用したポケットマスクは使用できません