


ナビストリップ

Wound Closure Strip

10袋入りの少量包装な皮膚接合用テープ

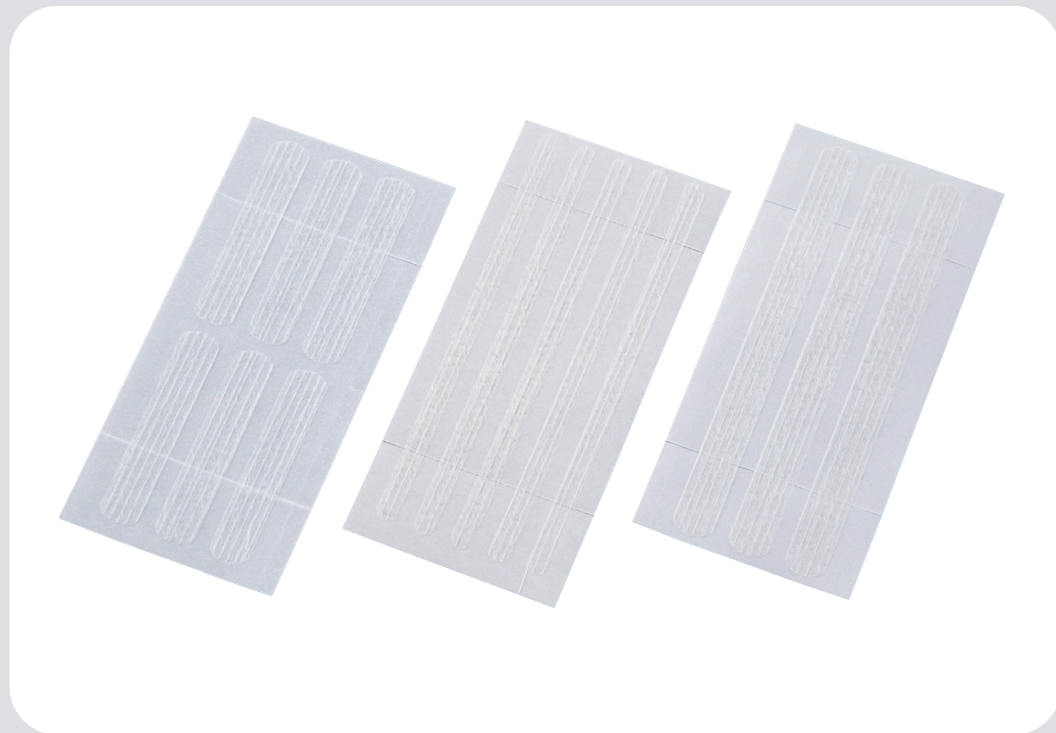


一般医療機器
一般的名称:皮膚接合用テープ
販売名:ナビストリップ
医療機器届出番号:27B2X00303000075

navis*

- ▶皮下縫合後の表皮接合や外来・救急での傷口の接合などに使用できる皮膚接合用テープです。
- ▶多孔質の素材により通気性に優れています。
- ▶テープの両端をラウンドカットしており、カドの剥がれを軽減する形状にしています。
- ▶10袋入りの少量包装のため、過剰在庫防止に繋がります。

ラウンドカット
カドの剥がれ軽減

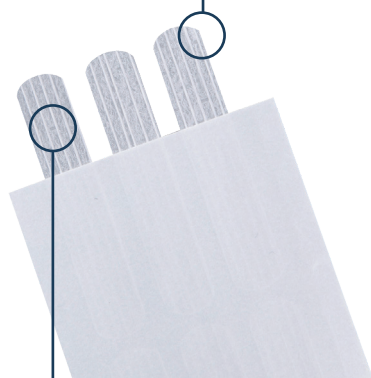

補強フィラメント
テープの強度を向上




使用例




[用途]

- 皮下縫合後の表皮接合
- 外来・救急での傷口の接合
- 抜糸、抜針後の創縁固定


貼付方法

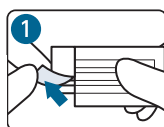


1 剥離紙にあるミシン目に沿って、剥離紙の一方を切り取ります。

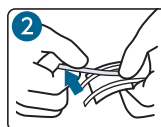

2 ストリップの端を、ピンセット又は手袋を着用した指で持ち、剥離紙からストリップをはがします。

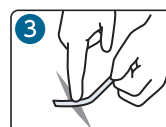

3 創部の中央に、創部に対して直角の向きになるようにストリップの半分を貼付します。

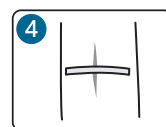

4 ピンセットまたは手袋を着用した指で創縁を引き合わせ、皮膚に緊張がかからないようにストリップの残り半分を貼付します。

品番	型番	幅×長さ (mm)	入数	価格(税抜)
8-682-01	SC638	6×38	1箱 (6本/袋×10袋入)	¥1,400
8-682-02	SC675	6×75	1箱 (3本/袋×10袋入)	¥1,400
8-682-03	SC375	3×75	1箱 (5本/袋×10袋入)	¥1,400

仕様

- 材質：レーヨン不織布・アクリル系粘着剤
- EOG 滅菌済 (個包装) ●ラテックスフリー

※仕様および価格は、製品開発・改良のため予告なく変更されることがあります。最新情報はAXELでご確認ください。

※商品写真は印刷の都合上、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

URL <https://help.as-1.co.jp/q>

(24時間受付)

TEL 0120-711-875 (ユーザー様用)

(午前 9:00～午後 5:30 受付 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く))



製造販売業者

AS ONE **アズワン株式会社**

〒550-8527 大阪市西区江戸堀二丁目1番27号