

# 温乳器簡易操作ガイド

## 操作パネル

電源スイッチ

保温スイッチ

お急ぎモードスイッチ

庫内除菌スイッチ



庫内温度を表示

## 準備

1. 電源プラグをコンセントに差し込み、**[電源スイッチ]**を押してください。
2. 扉を開けて、スノコと仕切りを庫内に入れてください。



## 1.保温

1. **[保温スイッチ]**を押してください。**[保温ランプ]**が点灯し保温を開始します。
2. 保温を停止する際は**[電源スイッチ]**を押してください。



## 2.お急ぎモード

1. **[お急ぎモードスイッチ]**を長押し（3秒以上）してください。**[お急ぎモードランプ]**が点灯し加温を開始します。
2. 加温終了後自動で保温に切り替わります。
3. 保温を停止する際は**[電源スイッチ]**を押してください。

お急ぎモード  
スイッチ



電源スイッチ



## 庫内除菌

1. 仕切り・スノコは庫内から取り出し、庫内を清掃後、電源プラグをコンセントに差し込み、**[電源スイッチ]**を押してください。
2. **[庫内除菌スイッチ]**を長押し（3秒以上）してください。**[庫内除菌ランプ]**が点灯し、自動的に除菌運転が始まります。  
※この時、絶対に哺乳瓶やシリンジを入れて加温しないでください。
3. 庫内 87℃を 5 分間維持して除菌運転を行います。
4. 除菌運転終了後は、庫内除菌ランプが消え、温度表示も消えた状態で、強制循環ファンが庫内の冷却のため、約 1 分間作動後停止します。

電源  
スイッチ



庫内  
除菌  
スイッチ

