

<オーラルバイト使用方法>



1. 幅の薄い方を横にして口内に挿入する。




2. 口内で奥歯に向かってスライドさせ、ひねって本品を起し奥歯で噛ませて安定させる。



3. 必要であれば、本品を把持しながら、噛ませた反対側の部位を清掃する。



4. 開口に拒否等がある場合、本品にジャム等をつけて開口を促す方法も有効である。

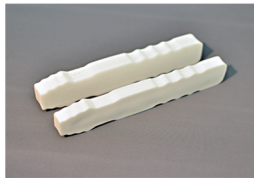

*オーラルバイト ワイドは厚みが約15mm
オーラルバイト スリムは厚みが約10mm
になります。

Ziecor International, Inc.