

予備洗浄スプレー

ピュアセーフ[®] MPuresafe[®] M

血液や体液などの凝固・乾燥を効果的に防止する中性の予備洗浄スプレーです。

一次洗浄を
廃止したい!すぐに洗浄できないから
血液が凝固
するの…生理食塩水も
付着するから医療器具が
錆びないか心配…ピュアセーフ[®] M
で問題解決!!

製品特長

○血液や体液などの凝固・乾燥を防止

医療器具に付着した血液・体液などの凝固・乾燥を効果的に防止します。

○微生物の増殖を抑制

抗菌剤の作用によって微生物の増殖を抑制します。

○優れた腐食防止効果

ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮を材質とした医療器具に使用できます。生理食塩水が付着した医療器具に対しても効果を発揮します。

○操作性を考えたスプレー容器

ノズルを切り替えてスプレー範囲を調整できます。半透明のため残量を目視で確認できます。



ピュアセーフ® M

用途	医療器具に付着した血液や体液などの凝固・乾燥防止		
主成分	乾燥防止剤		
	血液凝固防止剤		
	金属腐食防止剤		
	界面活性剤		
液性	抗菌剤		
	中性〔pH7.9(原液)〕		
製品仕様	500mL×6	500mL×12	10L×1



500mL

使用方法

- ノズルを切り替えてスプレー範囲を調整してください。
- 汚染物の量に対して等量以上スプレーしてください。
- 医療器具の使用後すぐにスプレーすると効果的です。
- 使用後長時間経過している場合はさらに多くの量をスプレーしてください。
- スプレー処理した医療器具を密閉容器で保管すると汚染物の乾燥・凝固防止効果が向上します。
- 低泡性のため、スプレー処理した医療器具はそのまま洗浄装置に投入することができます。

血液凝固防止評価

ヘパリン添加羊血液と1%硫酸プロタミン水溶液を混合させた疑似汚染物※を試験管に入れ、その直後に等量の予備洗浄スプレー液を添加し、密栓して25℃で7日間保管した。その後、試験管をゆっくりと傾けて10秒間排液し、試験管中に残った液量とその溶液状態から血液凝固防止力を評価した。
※医療現場における滅菌保証のガイドライン2015(日本医療機器学会)

試験結果

	10分後	3日後	7日後	排液後	結果の要点
ピュアセーフ® M					ほぼ全量が排液され、溶液の凝固も認められなかった。
他社品A					疑似汚染物とほぼ同量の溶液が排液されずに凝固していた。
疑似汚染物のみ					全量が排液されずに凝固していた。

ピュアセーフ® Mは
優れた血液凝固防止力を
発揮することが認められた。



使用上の注意 ◆用途以外には使用しないでください。◆使用時には必ず保護具を着用してください。◆他の薬剤との混合は避けてください。◆目の高さより高いところへのスプレーは避けてください。◆金属や樹脂の種類によっては変性・変色を起こす可能性がありますので、あらかじめ試験をしてから使用してください。◆使用後はノズルを×の位置に切り替えて保管してください。◆スプレー処理した医療器具は必ず洗浄してください。◆高温・直射日光を避けて室温で保管してください。◆子供の手の届かない場所に保管してください。

応急措置 ●吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。気分が悪いときは医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合、直ちに水で洗い流してください。異常がある場合は医師の診断を受けてください。●眼に入った場合、直ちに水で15分以上洗い(コンタクトレンズ着用時は容易に外せる場合は外す)医師の診断を受けてください。●飲み込んだ場合、無理に吐かせず、速やかに医師の診断を受けてください。

未来を清浄化する
アムテック株式会社
本社 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目27番9号
TEL 06-6447-6555 FAX 06-6447-6533

検索ワードはこちら!

ピュアセーフ M

検索

URL <http://www.amtecnet.co.jp>



FM 87934 / ISO 9001:2008 EMS 98155 / ISO 14001:2004
MD 552513 / ISO 13485:2003