

内視鏡検査台 FONCE (フォンセ)

前処置・移動・検査・リカバリーの全行程に対応



ネイビー



グレイジュ



ダークブラウン

Point1 寝台は電動で高さ調整



標準付属のハンドスイッチで、お好みの寝台高さに調整できます。

※別売でフットスイッチを増設できますので、お問い合わせください。

Point2 容体に合わせた手動の角度調整



背もたれハンドルに付いているロック解除レバーを操作して、患者の容体に合わせた角度調整を行います。

ロック解除レバーは本体の両側から操作できます。

Point3 ソフトクッション



耐圧分散性に優れた高反発ソフトクッションを採用。
包み込まれるような寝心地の良さと、患者の体位変換のしやすさを両立しています。

Point4 シート



アルコールや次亜塩素酸ナトリウムに耐性がある柔らかいシートです。
シートは分割型ではありませんので、汚れても清拭しやすく清潔な状態を保てます。

Point5 サイドガード



寝台の天面から高さ228mmあり安心です。
必要に応じて、背もたれ側と臀部側を別々に下ろすことができます。

Point6 ハンドル



ハンドルは直進に押しやすい横方向バーと、方向転換する際に力を入れやすい縦方向バーを備えた逆U字形状です。
また、背もたれのロック解除レバーは、ハンドルを握ったまま安心して操作ができます。
本体の両側に立った状態でも操作できますので、寝台が低い状態でも問題ありません。

Point7 キャスター



キャスターはφ125mmの双輪キャスターで安定した走行が可能です。
また、ブレーキは、本体の両側から操作できるシーソー型を採用しており、シーソーの両端を踏み込むことで、四輪ロック⇄四輪フリー⇄直進補助に切り替えができます。

Point8 バッテリー



バッテリーが標準付属のため、移動した先でコンセントが無くても、寝台部の高さ調整ができます。

※バッテリーは消耗品です。密封式鉛蓄電池ですので、できるだけ充電し続けた状態で満充電状態を維持してください。
※充電中も寝台部の高さ調整は可能です。

品番	型番	カラー	価格（税抜）
8-868-01	TR-E01-NV	ネイビー	¥550,000
8-868-02	TR-E01-GG	グレージュ	¥550,000
8-868-03	TR-E01-DB	ダークブラウン	¥550,000

※別売で、イルリガートル架やフットスイッチも対応可能ですので、お問合せ下さい。

- 幅×長さ×高さ：760×2000×500～880mm
- 材質：本体フレーム／スチール（塗装仕上げ） 本体マット・マクラ／ウレタンフォーム（ソフトポリウレタンカバー（耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃）
- 寝台サイズ：650×2000mm
- 耐荷重：静止時／200kg、昇降時／150kg
- 背もたれ角度：70度
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力：Max144W
- 電源コード長：約3.2m
- 昇降可能回数：約50回（6時間フル充電時）
- サイドガード高さ：寝台天面から228mm
- 重量：約65kg
- 付属品：ハンドスイッチ、まくら、バッテリー

商品URL



アズワン株式会社

URL: <https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 **0120-711-875**

代理店様用 **0120-776-967**

（価格・納期は営業まで）

電話受付時間 午前 9:00～12:00、午後 1:00～5:30

（土・日・祝日及び弊社休業日は除く）

■ご用命は信頼ある代理店へ