

作成年月日： 2025 年 10 月 29 日
改定年月日：

製造販売届出番号： 11B2X00040000723
医療機器製造販売業許可番号： 11B2X00040

【一般医療器】

類別：器 02

類別名称：医療用照明器

JMDN コード：32037000

一般的名称：汎用光源

クラス分類：I

特定保守：非該当

販売名： AIZEN LED メディカルペンライト Pro

【禁忌・禁止】

本品を曲げ、等の二次的加工（改造）することは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

【使用方法、又は効果】


診療に用いる強い光（冷光ということが多い）を発生させる装置である。

【形状、構造及び原理】

全長：145mm、直径：12mm、重さ：45g(電池を含む)

照明系：LED 電球

使用電池：単 4 電池（2 本）

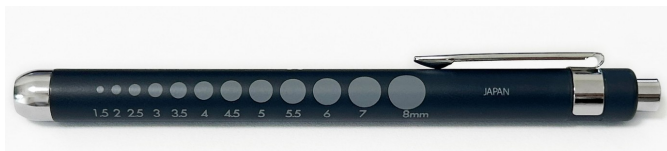

【使用方法】

クリップ部を指で押している間のみ点灯する。

【使用上の注意】

- 本製品に使用する交換用電球は、弊社指定の物以外は使用しないで下さい。
- 本製品に使用する電池は、単4型電池以外の電池は使用しないで下さい。特に初期電圧の高いタイプの電池（オキシ水酸化ニッケル使用の電池）を使用した場合、多くの電流が流れるため、ランプの寿命が極端に短くなり、またランプ取り付け部分が高温になり変形する場合があります。
- 電池の交換は2本を同時に交換してください。消耗した電池と新しい電池と一緒に使用すると、乾電池の発熱などが起こる可能性があります。
- 電池交換の際は、電池の向きに十分注意して下さい。電池の電極（＋）の向きを間違えた場合LED電球は点灯しません。また、電池や製品の破損を引き起こす場合があります。
- 本製品を高温・高湿又は腐食性ガスなどの環境に入れないで下さい。電池の破損や本体内部の錆び・腐食の原因になります。

- 本製品に入っている電池は点灯確認のための電池です。通常の電池寿命は保証されておりません。
- 機器を長時間使用しない時は、電池を取り外して下さい。
- 使用中に何らかの異常を感知した場合は、直ちに使用を中止して下さい。

【保守・点検に係る事項】

◆電球（ランプ）の交換

本体中央を持ち、先端の電球（ランプ）部分を回転させて取り外します。（誤ってスイッチ部分を回転させないで下さい。破損の原因になります）

◆電池の交換

先端の電球（ランプ）部分を取り外し、本体内に単4電池2本を電池のプラス（+）側が電球側を向くように2本を同じ向きに入れて下さい。電球（ランプ）部分を本体に回しながら取り付けます。取り付けの際には、電球部分を無理な力で取り付けしないで下さい。

◆洗浄・清掃方法

乾いた布でほこりを払って下さい。水分を付けて拭くと、水分・アルコールが本体内部に侵入し故障の原因となります）

【保管方法】

- ・乾いた布でほこりを払い、直射日光や電球の光に当たらない場所に保管すること。
- ・水のかからない場所に保管すること。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこりなどにより、悪影響の生ずる恐れのない場所に貯蔵・保管すること。

【製造元】

株式会社ティエムアイ

【医療機器製造販売業者】

株式会社ティエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1-2-10

Tel:048-481-2501Fax:048-481-9913