

ニオイの元となる汚物入れを病棟内に持ち込まない



# おむつ交換車

## (フルカバータイプ)

- ゴミ箱が見えないフルカバー仕様。
- カバー台車とワゴンに分かれ、清潔物と汚物を分離した衛生的な管理が可能。
- ゴミ箱はニオイ漏れ防止のパッキン付き。
- 邪魔にならないスリムサイズ。




### ゴミ箱への廃棄方法

- 1.カバー台車の上扉を開けます。
- 2.ゴミ箱のプッシュオープン蓋を開けて、使用済みオムツを廃棄します。ゴミ箱の蓋にはパッキンが付いているので、ゴミ箱の中から不快なニオイが漏れ出にくいのです。
- 3.上扉を閉めます。上扉はソフトクローズですので、手を離してもゆっくりと静かに閉まります。



### ゴミ箱の取出し方法

- 1.カバー台車の正面扉を開けます。プッシュオープン扉ですので、手を使わずに膝でも開けられます。(カバー台車のキャスターはロックしておいてください)
- 2.空のゴミ箱をセットし直し、正面扉をしっかりと閉めます。

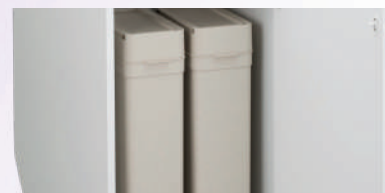

カバー台車とワゴンに分かれます。



#### <カバー台車>

25Lのゴミ箱を2個積載しています。ゴミ箱にはパッキン付きプッシュオープンのフタが付いているので、ニオイの漏れがほとんどありません。



#### <ワゴン>

衛生用品を入れられるバスケットを3個積載しています。2段目のバスケットは取付け高さを変更できます。

### 仕様

- 材質：カバー台車/フッ素コート化粧板、ワゴン/スチール(塗装仕上げ)、ゴミ箱/PP(ポリプロピレン)
- ワゴンサイズ：397×546×950mm
- バスケットサイズ：外寸法/約420×310×135mm、内寸法/約320×220×125mm
- カバー台車サイズ：474×921×1031mm
- ゴミ箱サイズ：337×170×625mm(容量25L)
- キャスター：φ75~100mmエラストマー製双輪キャスター
- 重量：カバー台車/約38kg、ワゴン/約10kg
- 付属品：ゴミ箱×2個、バスケット×3個

品番	商品名	型番	幅×長さ×高さ (mm)	価格 (税抜)
8-927-01	おむつ交換車	TS-FC-W	474×921×1031	¥195,000

# アズワン株式会社

URL:<https://www.as-1.co.jp/>

本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 **0120-711-875**

代理店様用 **0120-776-967**

(価格・納期は営業まで)

電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30

(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

■ご用命は信頼ある代理店へ