

洗浄から消毒、乾燥までを全自動で行える

卓上型ウォッシャーディスインフェクター



ポイント① 強力な水圧

天面と底面にある洗浄ノズルから強力な洗浄水を噴射し、対象物に付着した汚れをしっかりと落とします。

ポイント② 洗浄後の熱水消毒


洗浄・すすぎ後、90°Cの熱水による国際規格ISO15883に準拠した消毒を行います。

ポイント③ 最終工程の乾燥

工程の最後に、雑菌の繁殖や鋼製小物の錆び抑制ため、十分な乾燥を行います。



使用例

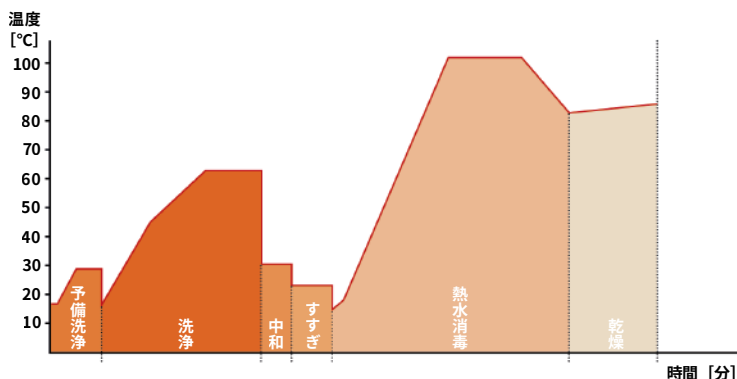

器材の汚れ具合に応じて選べる3つのプログラム

- ユニバーサルプログラム (標準的な汚れ)** 所要時間目安：76分
Ao=3000 (90°C・5分間) DIN EN ISO 15883に準ずる。
- クイックプログラム (汚れが少ないとき)** 所要時間目安：67分
Ao=3000 (90°C・5分間) 血液などで汚れていないインスツルメント向け。予備洗浄なし。
- インテンシブプログラム (汚れがひどいとき)** 所要時間目安：82分
Ao=3000 (90°C・5分間) ひどく汚れたインスツルメント向け。ユニバーサルプログラムで汚れが残るとき。予備洗浄・洗浄・すすぎの時間が長い。

特長

- 洗浄から消毒、乾燥までを全自動で行います。
- 槽内の上下に洗浄ノズルを備え、強力な噴射によりしっかりと汚れを落とします。
- 消毒は、90°C以上の熱水すすぎで、国際規格ISO 15883に準拠しているため、安心して使用可能です。
- 乾燥機能付きのため、雑菌の繁殖を防ぎます。
- 洗浄プログラムは3種類あり、洗浄対象物の状態に合わせて選べます。

仕様

- 洗浄室サイズ：455×423×290mm ■ 洗浄室容量：84L
- プログラム運転：3種類 (洗浄から乾燥までの所要時間の目安：67/76/82分)
- 最大排水温度：93°C
- 給水/排水/脱イオン化水注水ホース長：各1.8m
- 電源：AC220～240V 50/60Hz ■ 消費電力：3.3kW
- 電源コード長：約2m ■ 最大騒音：73dB ■ 平均騒音：68dB
- 重量：乾燥時/85kg、運転時/119kg

セット内容

- ▼ 電源コンバータ ×1式 ▼ CFカード ×1枚
- ▼ インジェクションバスケット ×1個 ▼ 弱アルカリ酵素洗剤5L ×1本
- ▼ 中和剤5L ×1本 ▼ 乾燥促進剤1L ×1本 ▼ 水質調整塩2kg ×1個

品番	商品名	型番	価格 (税抜)
8-947-01	卓上型ウォッシャーディスインフェクター	WD-MT10	¥2,350,000

AXEL商品ページ



アズワン株式会社

URL: <https://www.as-1.co.jp/>
 本社 〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口 カスタマー相談センター

ユーザー様用 **0120-711-875**

代理店様用 **0120-776-967**

(価格・納期は営業まで)
 電話受付時間 午前 9:00~12:00、午後 1:00~5:30
 (土・日・祝日及び弊社休業日は除く)

■ ご用命は信頼ある代理店へ